



Zuur neutraliserend spoelglansmiddel en dompelreiniger voor medische instrumentenreiniging en tevens geschikt voor bedpanspoelmachines.

Omschrijving

Suma Med Rinse Plus is een combinatie van een neutraliserend spoelglansmiddel en dompelreiniger voor medische instrumentenreiniging en tevens geschikt voor bedpanspoelmachines.

Eigenschappen


Suma Med Rinse Plus is zuur neutraliserend spoelglansmiddel en dompelreiniger voor medische instrumentenreiniging. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een uitgebreid gamma van reinigings- en desinfectieautomaten en vaatwasmachines. Het evenwichtige mengsel van niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen en een neutraliserend zuur maakt het product uitermate geschikt voor een snelle droging zonder strepen en vlekken van alle gereinigde oppervlakken. Het product kan gebruikt worden in alle waterhardheden. Suma Med Rinse Plus is eveneens een uitstekende dompelreiniger voor bloed- en roestvlekken en allerlei andere soorten vlekken. Het product bevat bovendien ook anti-schuimcomponenten en voorkomt de opbouw van kalkafzettingen.

Voordelen

- Unieke combinatie van neutraliserend spoelglansmiddel en dompelreiniger
- Zorgt voor een snelle droging
- Geeft een streep- en vlek vrij resultaat
- Laagschuimend voor een doeltreffende werking
- Verwijdert doeltreffend vuil en ingedroogde bloedresten
- Hooggeconcentreerd en daardoor economisch in gebruik
- Doeltreffende reiniging van bedpannen
- Voorkomt kalkaanslag op de bedpannen en machine

Gebruiksaanwijzing

Suma Med Rinse Plus (spoelglansmiddel) wordt normaal manueel gedoseerd in het spoelmiddelcompartiment van wasautomaten aan een concentratie van 0.2-0.4 ml/L. (Dompelreiniging) Doseer 1-2 liter Suma Med Rinse Plus in 10 liter warm water (temperatuur tussen 40-60°C). Laat gedurende 10 minute

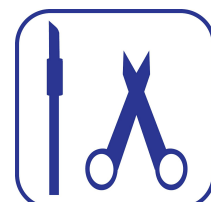



Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere vloeistof
pH-waarde (puur): ~ 2
pH-waarde (in gebruik): ~ 2.5
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.07

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

[CE marked]

Productcompatibiliteit

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Med Rinse Plus geschikt voor gebruik op de meest voorkomende materialen gebruikt in ziekenhuizen. Het geconcentreerde product echter niet gebruiken op koper, aluminium en messing. Het gebruik van koperen sproeikoppen vermijden. Gebruik ook roestvrijstalen slangen om het product te doseren.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7511767	Suma Med Rinse Plus 2x5L W3612	Automatische dosering

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 20/05/2022 nl-NL (P01216)