






Gebruiksaanwijzing veiligheidspennaalden

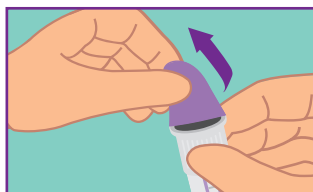


1. Controleer de juiste maatvoering veiligheidspennaald op het papieren beschermlaagje. Verwijder het papieren beschermlaagje van de veiligheidspennaald.

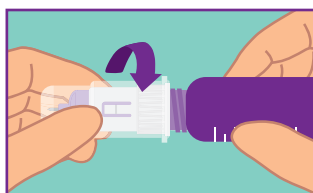


2. Bevestig de veiligheidspennaald. Draai de Betica veiligheidspennaald in een hoek van 180° recht op de insulinepen totdat je weerstand voelt.

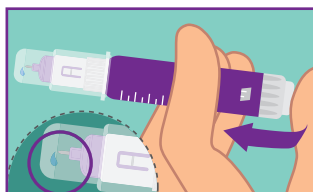


3. Ontlucht de veiligheidspennaald door twee eenheden insuline door te spuiten, totdat er zich een druppel op de naald vormt. Laat de transparante kap zitten en verwijder deze pas als je gaat injecteren.

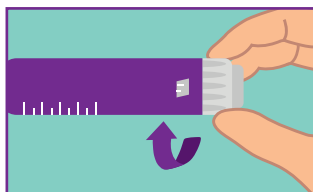

4. Stel het aantal eenheden insuline in volgens voorschrift van de behandelaar.

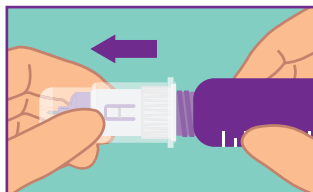


5. Verwijder de transparante buitenste beschermkap met een rechte beweging. Door de zichtbare naald bepaal je eenvoudig de juiste injectieplaats.

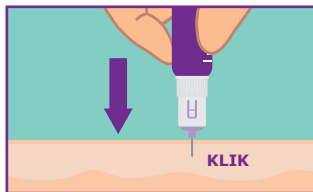


6. Breng de naald met een vloeiende beweging in de huid zodat de gekleurde naald-beschermer zich terugtrekt. Als je een klink hoort, is het veiligheidsmechanisme geactiveerd.



7. Oefen constante druk uit en injecteer de insuline volgens de instructie van de behandelend specialist of diabetesverpleegkundige. Verwijder de naald niet voordat je de volledige dosis hebt geïnjecteerd.

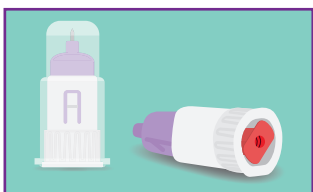

8. Na de injectie wordt de naald aan de cliëntzijde en de penzijde automatisch voorzien van een beschermende cover.

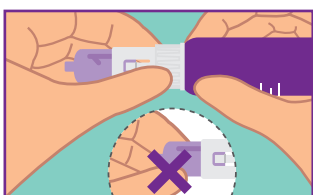

9. Verwijder de Betica-veiligheidspennaald door deze vast te pakken bij de witte naaldhub. Draai vervolgens de veiligheids-pennaald van de insulinepen door tegen de klok in te draaien.



10. Voer de gebruikte Betica veiligheids-pennaald volgens voorschrift af. Wij adviseren u deze in een naaldencontainer te werpen.

Combineerbaarheid

Betica Dual Safety Veiligheidspennaalden zijn te gebruiken in combinatie met onderstaande insulinepenen.

Sanofi Aventis	ClikSTAR, SoloSTAR, JuniorSTAR
Lilly	KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Luxura HD, HumaPen Luxura, HumaPen Savvio, HumaPen Ergo II, Humalog Pen
Novo Nordisk	FlexTouch, NovoPen 3, 4 en 5, Innolet, FlexPen, Victoza, NovoPen Echo
Owen Mumford	Autopen Classic, Autopen Junior
Berlin Chemie	BerliPen Areo, BerliPen Junior

55933-03-2020