


Drip SWAN® Transfusiesysteem – bijspuitpunt met SWAN-LOCK® R-LOCK – driewegkraan

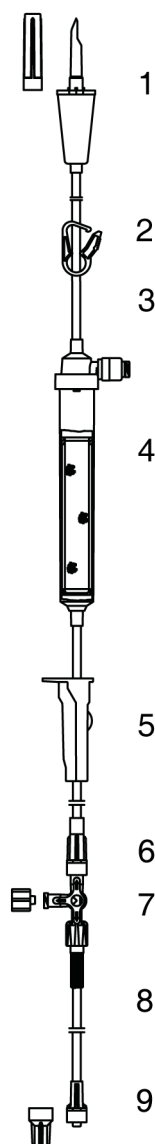

1. Onbeluchte kunststofnaald. De speciale vorm vereenvoudigt het aanprikken van infuuspooten en garandeert een veilige connectie. De beschermkap waarborgt de inwendige steriliteit.
2. Open/dicht klem.
3. Transparante flexibele PVC infuusslang (TOTM) i.d. 3.0 mm.
4. Drip SWAN®. Geïntegreerde Luer-Lock bijspuitpunt met Swan-Lock®, desinfecteerbaar. Voor het aansluiten van een koppelsysteem of toedienen van medicatie.
Druppelkamer, transparant voor een nauwkeurige controle van de ingestelde druppelsnelheid en markeringsring voor eenvoudige niveaubepaling. (20 druppels / 1 ml)
Het 200 µm filter (opp. 23,5 cm²) zorgt voor een goede filtratie, ook voor meerdere zakken bloed
5. Precisie druppelregelaar voor het nauwkeurig instellen van de gewenste infuussnelheid. Ook bij langdurige instelling blijft de nauwkeurigheid gehandhaafd. (± 10 %)
Tevens klem voor afklemmen of bevestigen infuusslang.
6. R-LOCK, terugslagventiel voorkomt terugstromen van vloeistof.
7. Loskoppelbare driewegkraan voor het bijspuiten van extra medicatie of koppelen van tweede toedieningssysteem. De afsluitkap garandeert de steriliteit van het systeem.
8. Transparante flexibele PVC infuusslang (TOTM) i.d. 2.5 mm. (knikvrij).
9. Luer-lock aansluiting voor een gemakkelijke en veilige koppeling. Inclusief FlowStop beschermkap die de inwendige steriliteit waarborgt en voorkomt lekkage van vloeistof tijdens vullen van het toedieningssysteem door geïntegreerd hydrofoob filter.

<u>Bestelnr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Verpakking</u>
76.3410	Drip SWAN® Transfusiesysteem, bijspuitpunt met SWAN-LOCK® R-LOCK, loskoppelbare driewegkraan, 12 cm knikvrije slang luer-lock met FlowStop. Lengte ± 275 cm.	80 stuks