



Hekura 15 cm CH08 gebruiksklare eenmalige katheter

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

De Hekura gebruiksklare eenmalige katheter kan de oplossing bieden voor blaasproblemen en is beschikbaar voor zowel mannen als vrouwen. Heeft jouw cliënt een verminderde handfunctie waardoor het openen van een verpakking lastig is? Geen probleem! Door het grote oog aan de bovenzijde van de pouch is de verpakking eenvoudig te openen, voor iedereen. Door een plakzijde aan de verpakking is de pouch eenvoudig op te hangen aan het badkamermeubel. Zo kan de katheter gemakkelijk ingebracht worden, en gebeurt het ook hygiënisch.

- Steriele gebruiksklare eenmalige katheter
- Nelaton tip
- Dikke connector voor een goede grip
- TPU (thermoplastisch polyurethaan)
- Hydrofiele PVP-coating
- Lengte: 15 cm inclusief connector, 10 cm exclusief connector
- Gebruiksduur max. 1 keer

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op hekura.nl/gebruiksklarekatheters

Omschrijving

De gebruiksklare eenmalige katheter, met Nelaton tip, is voor het afvoeren van urine bij vrouwen. De steriele katheter is gemaakt van TPU (thermoplastisch polyurethaan) en heeft een geactiveerde hydrofiele PVP-coating (polyvinylpyrrolidon). Max. 1 keer gebruiken. Lengte: 15cm inclusief connector, 10 cm exclusief connector.

Aditionele informatie

Artikelnummer	56762
Referentienummer	UZ6408
Toepassing	Instructie: • Was je handen goed met water en zeep. • Open de verpakking aan de bovenkant en haal de beschermlaag van de plakker op de achterkant van de verpakking. Plak de katheter in zijn verpakking op een schoon en droog oppervlak. • Reinig vóór het inbrengen van de katheter je handen en het gebied rondom de opening van de urinebuis goed. • Breng de katheter voorzichtig in de urinebuis in en ga door met opschuiven van de katheter in de urinebuis totdat de urine begint te stromen. • Als er geen urine meer uitstroomt, trek je de katheter voorzichtig terug. Ga door tot de blaas leeg is, dan verwijder je de katheter helemaal. • Gooi de katheter op de juiste manier weg. Bekijk de volledige instructievideo's op hekura.nl/gebruiksklarekatheters
Merk	Hekura
charriere	UZ6408, 15 cm, CH08
Button tekst	Vraag een gratis proefpakket aan
Outgoing Product Url	https://webshop.vanheek.com/proefpakket-gebruiksklare-katheters/
Inhoud verpakking	30 stuks
Inhoud overdoos	10 x 30 stuks
ZI-nummer	17030889
CNK code	4501862

