


GEBRUIKSAANWIJZING



ASSKEA proVisio M28

proVisio M28


- A - Opvangreservoir met geïntegreerde overloopbeveiliging in deksel
- B - Toetsenbord
- C - Aan/uit toets
- D - Aansluiting lichtnetadapter (12 V DC)
- E - Lichtnetadapter
- F - Netsnoer
- G - Zuigslang
- H - Afdekkap zuigpomp
- I - Handgreep

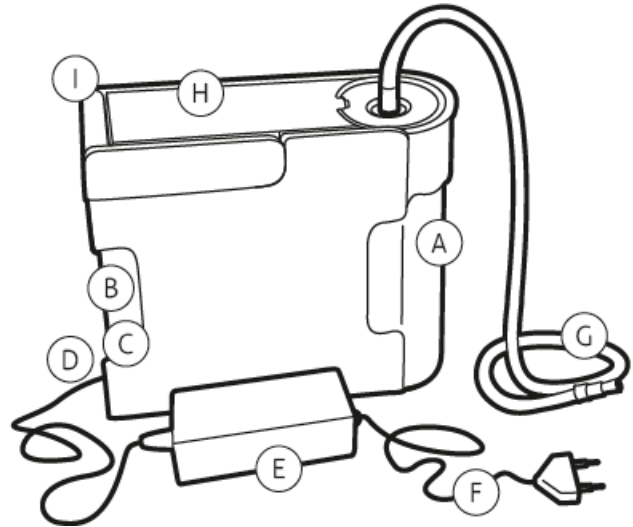

Voordat u de pomp de eerste keer in gebruik neemt dient de ingebouwde accu opgeladen te worden.

Sluit hiervoor de lichtnetadapter [E] aan op aansluiting [D] van de pomp en verbind het netsnoer [F] met de adapter. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact (100 V tot 240 V AC).
Op het toetsenbord [B] geeft de indicator [D] de laadtoestand weer.

TOETSENBORD [B]

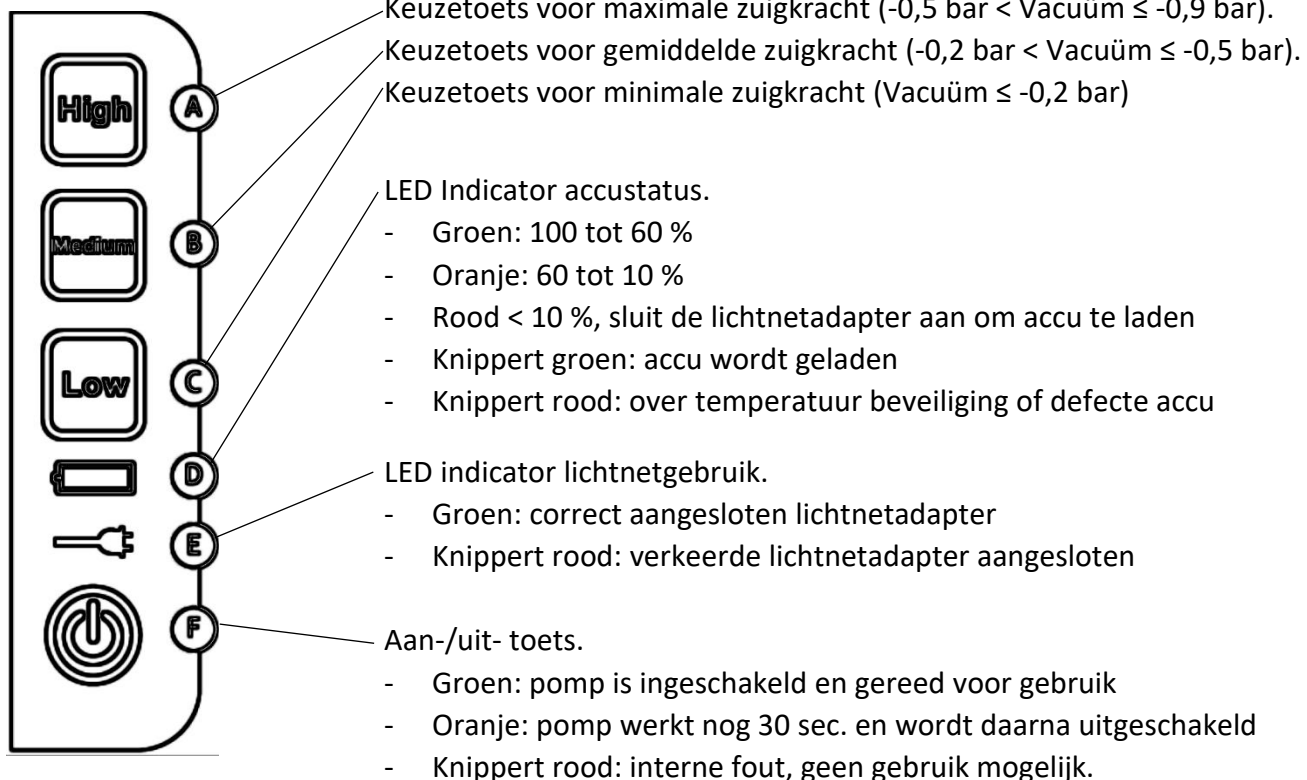

Gebruik


De pomp nooit in een vochtige of natte omgeving gebruiken en zorg ervoor dat kinderen of huisdieren de pomp niet kunnen omstoten.

Let op: Het opvangreservoir legen zodra dit maximaal half vol is.

Schakel de pomp altijd uit voordat u het reservoir verwijdt.

Opvangreservoir aansluiten

1 - Klap het beweegbare deel van het deksel (visioClick®) voorzichtig omhoog.

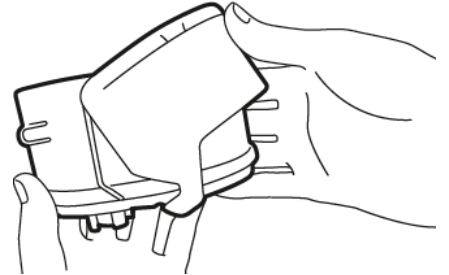



- Druk het deksel op het reservoir.




2 - Druk het beweegbare deel van het deksel (visioClick®) omlaag zodat de haken vastklikken en het reservoir goed afgesloten is.




3 - Plaats het reservoir eerst met de onderzijde en vervolgens met de bovenzijde in de pomp totdat deze vastklikt.

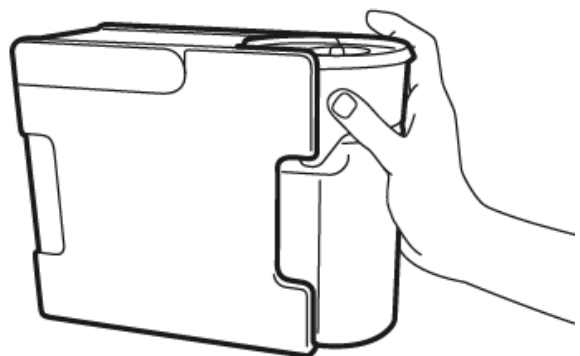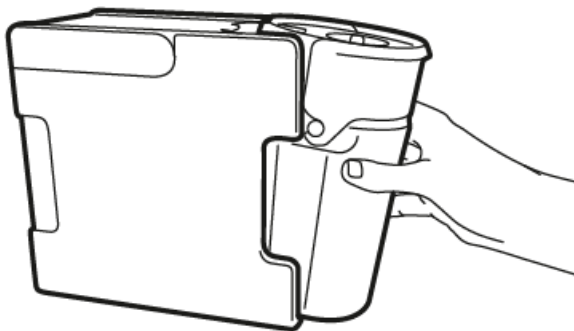

- 4 - Sluit de zuigslang aan op de nippel in het midden van het deksel en druk deze goed aan.

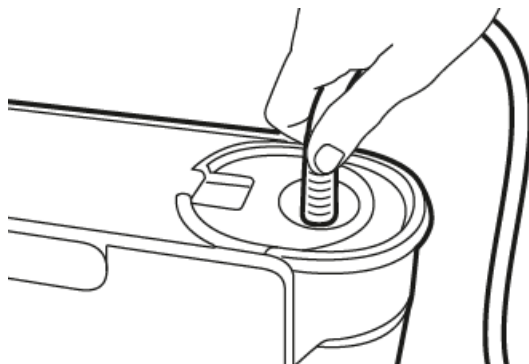


- 5 - Verbind het andere uiteinde van de zuigslang, via een vingertip met beluchtingsopening, met een uitzuigkatheter.

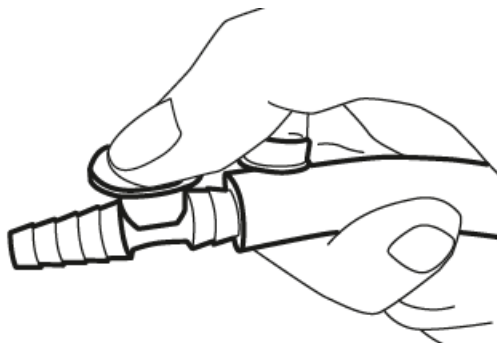


Bacteriefilter plaatsen

- 1 - Druk het filter in de hiervoor bestemde opening met de hendel naar onder gericht.

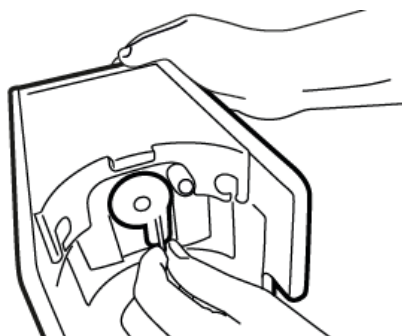

- 2 - Draai het filter rechtsom totdat dat de hendel horizontaal staat.

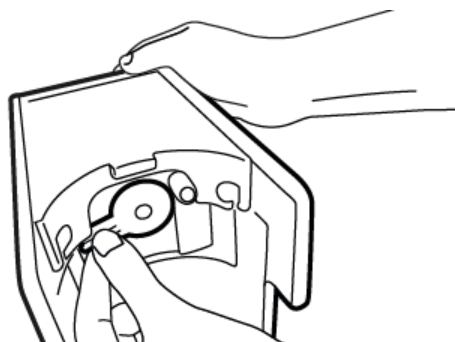

Let op:

Het opvangreservoir kan niet worden aangesloten wanneer het bacteriefilter niet juist is geplaatst. Verwissel het bacteriefilter minimaal elke twee weken.

Vacuüm instellen



- 1 - Schakel de pomp met de Aan-/uit- toets [F] in.
- 2 - Kies met de toetsen [A], [B] of [C] het gewenste maximale vacuümbereik.
- 3 - Met een vingertip met beluchtingsopening kan het vacuüm fijn worden geregeld.
- 4 - Om de pomp uit te schakelen de Aan-/uit- toets [F] enkele seconden indrukken.

Uit-/ afzuigen

- 1 - Volg altijd de door de arts of verpleegkundige gegeven instructies nauwkeurig op.
- 2 - Regel, door de beluchtingsopening op de vingertip met de duim af te sluiten, de gewenste zuigkracht.
- 3 - Schakel de pomp na gebruik uit en leeg het opvangreservoir.


Na gebruik

- 1 - Schakel de pomp uit door enkele seconden op de Aan-/uit- toets [F] te drukken
- 2 - Trek de stekker van de lichtnetadapter (indien aangesloten) uit het stopcontact en de apparatenstekker uit de pomp [D].
- 3 - Neem de zuigslang los van het deksel.
- 4 - Reinig de zuigslang.
- 5 - Neem het opvangreservoir uit de pomp door de vergrendeling in te drukken en

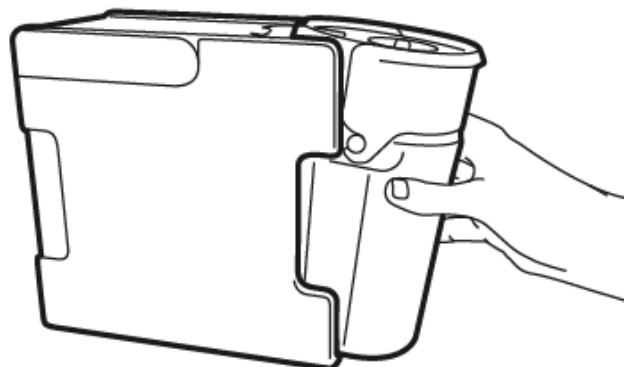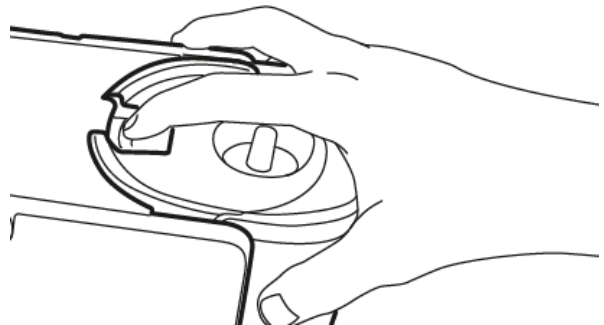

vervolgens het reservoir te kantelen.


- 6 - Klap het beweegbare deel van het deksel (visioClick®) omhoog zodat de haken loskomen en neem het deksel van het reservoir.

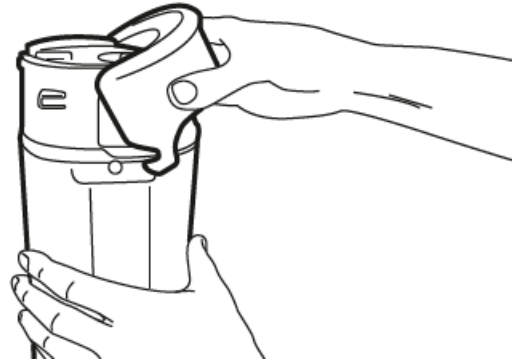


- 7 - Leeg het reservoir en reinig dit evenals het deksel.

Zie: Reiniging en desinfectie

- 8 - Verwijder het gebruikte bacteriefilter wanneer de pomp voor een volgende patiënt gereed wordt gemaakt of nadat het twee weken bij een patiënt in gebruik is. Draai de hendel van het filter linksom totdat dit verticaal (recht naar onder) staat.

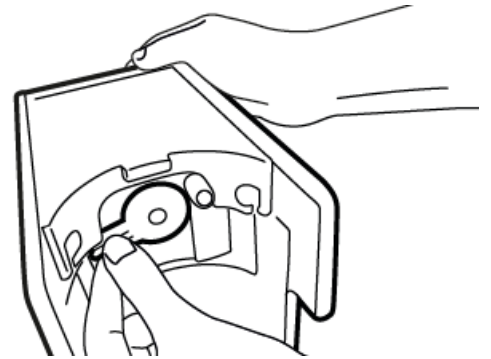


- 9 - Trek het bacteriefilter in deze positie uit de houder.

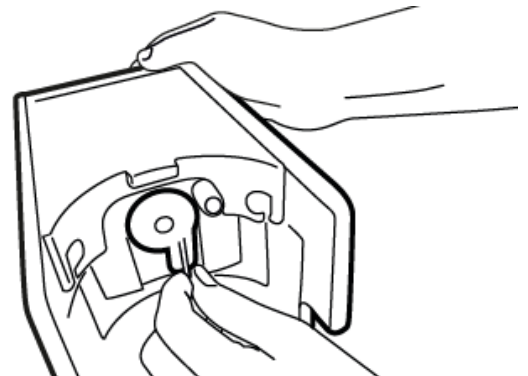

- 10 - Plaats een nieuw bacteriefilter.


Zie: Bacteriefilter plaatsen

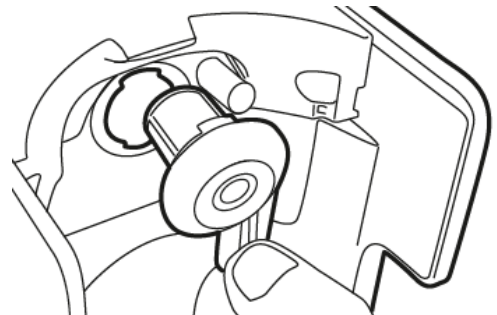

Reiniging en desinfectie

A = Deksel (visioClick®) opvangsysteem.

B = Overloopbeveiliging, kogel.

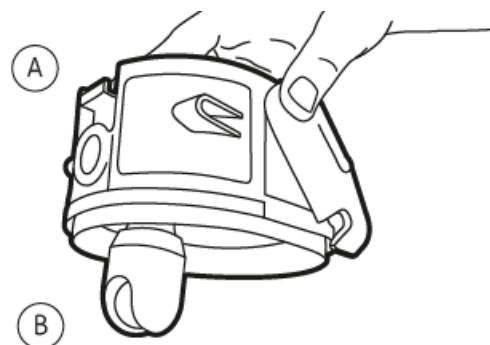

- 1- Leeg het opvangreservoir
- 2- Verwijder de kogel uit de overloopbeveiliging
- 3- Spoel alle onderdelen onder stromend water
- 4- Dompel alle onderdelen van het opvangsysteem in een oplossing met desinfectiemiddel
- 5- Spoel alle onderdelen grondig af en laat deze drogen
- 6- U kunt het opvangsysteem ook gedurende 20 minuten bij 121 °C steriliseren. In dit geval vooraf de overloopbeveiliging losnemen
- 7- Na het steriliseren de overloopbeveiliging weer in het deksel bevestigen, let hierbij op de juiste richting van de opening in het deksel
- 8- Plaats de kogel in de overloopbeveiliging terug

ASSKEA GmbH adviseert het opvangsysteem bij veelvuldig gebruik en desinfectie **elke 4 weken** om te wisselen.

Reinigen zuigslang

- 1- Indien de pomp voor een nieuwe patiënt gereed wordt gemaakt dient de zuigslang te worden vervangen.
- 2- Na elk gebruik bij dezelfde patiënt dient de zuigslang met schoon water te worden gespoeld. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgeleverde spoelflesje. ASSKEA adviseert de slang dagelijks te desinfecteren door deze in een desinfectieoplossing te leggen.
- 3- Spoel de slang altijd met schoon water na en laat deze daarna drogen.

ASSKEA GmbH adviseert ook bij gebruik door dezelfde patiënt minstens **elke 4 weken** de zuigslang om te wisselen omdat het materiaal door veelvuldig gebruik kan verkleuren en broos kan worden.

Probleemoplossingen

Storing:	Indicatie		Mogelijke oorzaak	Oplossing
Pomp start niet		Branden niet	Lege accu	Lichtnetadapter aansluiten
		Knippert rood	Lege accu en of verkeerde adapter aangesloten	Sluit juiste lichtnetadapter aan en controleer aanwezige netspanning
		knippert rood	Interne storing	Service invoeren
Apparaat laadt niet op	 	Knippert rood en Brand groen	- Accutemperatuur te hoog - Defecte accu	- Apparaat laten afkoelen - Service invoeren
		Knippert rood	verkeerde adapter aangesloten	Sluit juiste lichtnetadapter aan en controleer aanwezige netspanning
Weinig zuigkracht	 	Brand groen/oranje en/of Brand groen	- Verstopt bacteriefilter - Lekkage - Versleten pomp	- Bacteriefilter wisselen - deksel en slangverbindingen controleren - Service invoeren
Geen zuigkracht		Branden constant rood	- Kogel van de overloopbeveiliging sluit de opening in het deksel af - Verstopt bacteriefilter - Zuigslang verstopt - Geen bacteriefilter geplaatst	- reservoir legen - Bacteriefilter wisselen - Zuigslang wisselen - Bacteriefilter plaatsen
Apparaat schakelt uit		Knippert rood	Interne storing	Service invoeren