



## BEDPANSPOELERS

Reinigings- en  
desinfectieapparaten

### Reinigings- en desinfecteerapparatuur

De bedpanspoeler of pospoeler is een veilig en effectief apparaat voor het reinigen en desinfecteren van kruisbesmetting. TR-Care biedt een complete lijn, conform de nieuwste WIP-richtlijnen en met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

### Keuze uit

In ons assortiment heeft u keuze uit vier types bedpanspoelers, namelijk Piccolo, Compact, Boy en Master.

Deze bedpanspoelers worden vervaardigd van hoogwaardig roestvaststaal (1.4301). Het oppervlak is gepolijst, wat garant staat voor maximale hygiëne in de spoelkamer én aan de buitenzijde van het apparaat. Het kleine volume van de spoelkamer heeft als voordeel dat de gewenste desinfectie temperatuur snel wordt bereikt. Dit verkort het reinigingsproces. Tijdens het reinigingsproces wordt de spoelkamerdeur elektronisch vergrendeld en deze kan pas geopend worden nadat het programma volledig beëindigd is.



## Veiligheid en gezondheid medewerkers



### Veiligheid en gezondheid verzorger/medewerkers

De veiligheid van patiënten en medewerkers staat voorop. Bacteriën mogen geen enkele kans krijgen om zich verder te verspreiden. Om het risico op besmetting te minimaliseren, worden onze spoelers volgens het “handen-af”-principe geleverd: het openen en sluiten van de bedpanspoeler bedient u met een voetbutton en met de elleboogbutton kunt u het desinfectieprogramma starten.

Tijdens het hele proces hoeft de verzorger de spoeler niet aan te raken. Hierdoor wordt overdracht van bacteriën uitgesloten. Bovendien hoeft het personeel de binnenkant van de spoeler niet schoon te maken, dit gebeurt automatisch door het desinfectiesysteem. Hiermee wordt de veiligheid van de patiënten en van de verzorgers gegarandeerd, waarmee aan de eisen van de werkgroep infectiepreventie 2016 wordt voldaan.

# Typen bedpanspoelers

## Bedpanspoeler Piccolo

- ✓ Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
- ✓ Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk
- ✓ Roestvaststaal
- ✓ Programmabesturing met optisch zichtbaar programmaverloop
- ✓ Thermische desinfectie
- ✓ Leverbaar in stand of wandmodel



Piccolo 50



Piccolo 95

## Bedpanspoeler Boy

- ✓ Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
- ✓ Roestvaststaal
- ✓ Thermische desinfectie
- ✓ Leverbaar in stand of wandmodel
- ✓ Individuele kastaanbouw mogelijk
- ✓ Optioneel met slophopper



BOY 50



BOY PLUS



BOY 95

## Bedpanspoeler Master

- ✓ Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
- ✓ Roestvaststaal
- ✓ Thermische desinfectie
- ✓ Aanrecht model
- ✓ Leverbaar met wasbak en/of gootsteen



Master

## Bedpanspoeler Compact

- ✓ Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
- ✓ Roestvaststaal
- ✓ Thermische desinfectie
- ✓ Klein in afmeting: 860x500x570 mm
- ✓ Inbouwmodel (bijvoorbeeld onder werkblad)




Compact

# Hoe werkt het?


## De werking van de bedpanspoeler

Na het plaatsen van de te reinigen materialen wordt de spoelkamerdeur gesloten. De spoelkamerdeur wordt vergrendeld na het kiezen van het gewenste programma. Het groene controlelampje van 'in bedrijf' of 'verriegeling' (piccolo) licht op wat betekent dat het programma loopt. Afhankelijk van het programma vult de voorraadtank zich met warm- en/of koudwater. Als het gewenste waterniveau bereikt is, zal de pomp het reinigen en spoelen activeren. Dit zal zich enige malen herhalen totdat het desinfectieprogramma aanvangt. Zodra de verdamer stoom in de spoelkamer perst zal de temperatuur oplopen totdat de ingestelde desinfectie temperatuur is bereikt.


Deze temperatuur zal enige seconden gehandhaafd worden, waarna de naspoeling met koud water in combinatie met naglans en ontharder plaatsvindt. Tijdens deze naspoeling wordt de verdamer gevuld met koud water met naglans en ontharder, hierdoor wordt kalkaanslag op het verwarmingselement voorkomen. Door deze naspoeling wordt niet alleen het verwarmingselement ontkalkt, maar ook alle andere onderdelen en uiteraard de gereinigde materialen.

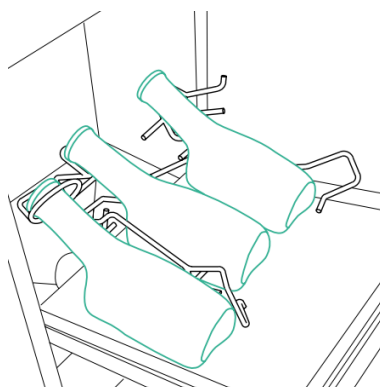


3 URINEFLESSEN

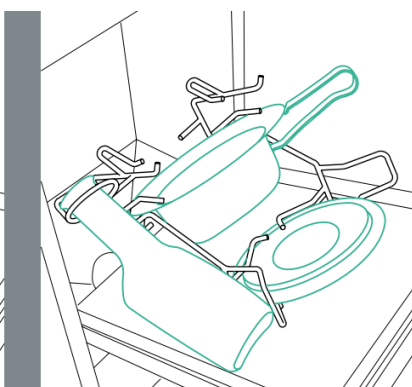


ONDERSTEEL/DEKSEL URINEFLES

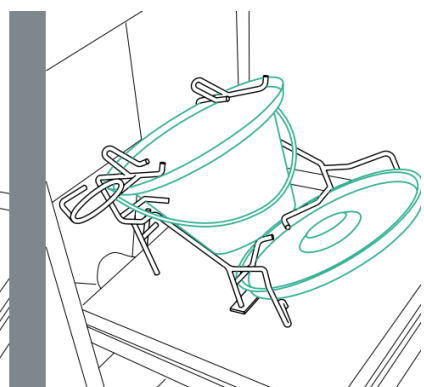


EMMER/DEKSEL

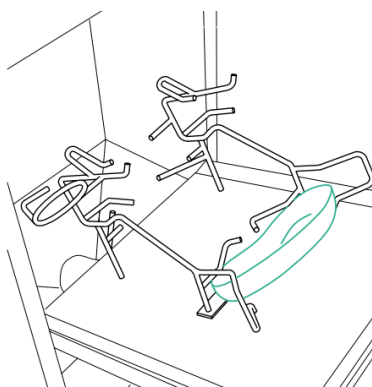

NIERBEKKENSCHAALTJE

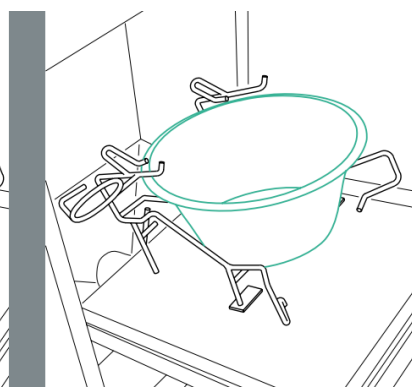

WASKOM

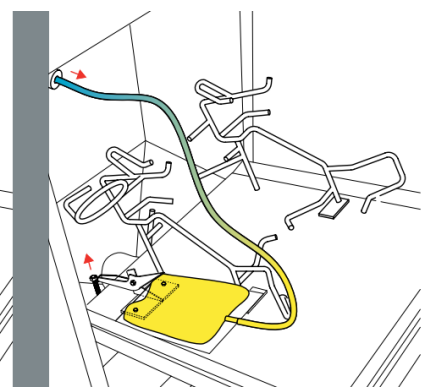

URINEZAKSNIJDER (optie)

## Technische gegevens

<b>Aansluiting</b>		
Piccolo-serie	230 Volt, 50 Hz	
Boy- en Master-serie	230/400 Volt, 50 Hz.	
Stroomafname	Zonder verdamper	0.5 kW
	Met verdamper	3,0 kW
	Respectievelijk	3,6 kW

<b>Stroomverbruik</b>		
In stand-by situatie	Boy/Master	0,006 kW/h
	Piccolo	0,003 kW/h
Normaal programma	Boy/Master	0,260 kW/h
	Piccolo	0,175 kW/h

<b>Waterverbruik</b>		<b>KW</b>	<b>WW</b>
Spaarprogramma	Boy/Master	8,0 L	8,0 L
	Piccolo	6,0 L	6,0 L
Normaal programma	Boy/Master	16,0 L	8,0 L
	Piccolo	12,0 L	12,0 L
Power programma	Boy/Master	16,0 L	16,0 L
	Piccolo	n.v.t.	
Naspoeling	Boy/Master	4,0 L	
	Piccolo	5,0 L	
Randspoeling	Boy/Master	8,0 L	

Naglans en ontharderverbruik per programma (afhankelijk van water hardheid)	3-12 ml
---	---------

<b>Water-en afvoeraansluiting</b>	
Warm- en koud water	Ø 15 mm
Waterdruk	0,5-8 bar
Warmwater temperatuur	Min. 60 C
Afvoer	DN 110 mm

## Kwaliteitskenmerken

Discher GmbH is gecertificeerd onder de internationale norm DIN en ISO 9001:2, DIN en ISO 13485, DIN en ISO 46001, Anhang 2 der Richtlinie 93/42/EWG. Alle apparaten worden volgend KIWA keur geïnstalleerd.



## Complete inrichting spoelruimte

TR-Care helpt graag bij het ontwikkelen van een complete strategie voor de inrichting van de spoelruimte. In de voorbereidende gesprekken denken wij mee en adviseren wij in de mogelijkheden. Op deze manier creëren wij samen een goed functionerende werkomgeving. Dit is met name belangrijk wanneer de bedpanspoeler onderdeel is van een complete spoelkeuken. De bedpanspoeler en de keuken moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Mede daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het inrichten van een totale keuken (RVS), inclusief bedpanspoeler. Wilt u dat wij met u meedenken over de inrichting van de keuken en de plaatsing van de bedpanspoeler? Neem dan contact met ons op.



**TR-Care**

# Contactgegevens



## Adres

Arkeneel 4  
3905 NS Veenendaal

## Contactgegevens

Telefoon: 085-4858390  
E-mail: [info@tr-care.nl](mailto:info@tr-care.nl)  
Website: [www.tr-care.nl](http://www.tr-care.nl)