

Baxter verzoekt u de volgende actie te ondernemen:

Klanten kunnen de Welch Allyn niet-automatische sphygmomanometer blijven gebruiken indien ze zijn geijkt. Het volstaat om de volgende snelle controle van ijking uit te voeren, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het product, om er zeker van te zijn dat het apparaat is geijkt.



Controleer bij nuldruk of de wijzer zich binnen het ovaal rond de nuldrukgradatie op de wijzerplaat bevindt. Het apparaat moet mogelijk worden geijkt als de wijzer zich volledig buiten de tolerantiezone bevindt (de donker gekleurde zone binnen de illustratie). Hoewel een drukloze lezing van nul geen nauwkeurigheid op alle schaalpunten garandeert, is er een duidelijk teken van een fout als de wijzer de nul niet aangeeft (± 3 mm Hg).

Voor verdere informatie over dit product, klik op de volgende link voor de gebruiksaanwijzing:
[Instructions for use - Welch Allyn™ Blood Pressure Gauges](#)