

Gebruiksaanwijzing



1. Verwijder de beschermfolie

Houd de strip in de ene hand en verwijder de bovenste beschermfolie met duim en wijsvinger van de andere.

2. Breng aan en verwijder de tweede beschermfolie aan

Plaats het wondkussen centraal op de wond. Zorg ervoor dat u alleen de pleister op de beschermfolie en de achterkant aanraakt, nooit het wondkussen zelf. Verwijder de resterende beschermfolie.

3. Strijk glad en druk erop

Strijk het verband glad zodat het gelijkmatig hecht. Oefen slechts lichte druk uit en vermijd spanning. Om de kleefkracht te vergroten, kunt u de pleister tussen de handpalmen opwarmen voordat u deze aanbrengt.