



200 mm

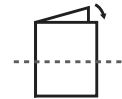

120 mm

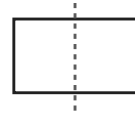

**AdvaCyn<sup>®</sup>**  
*hydrogel*



**Oculus Technologies of México S.A. de C.V.**  
Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte  
Zip Code 45130, Zapopan, Jalisco, México.  
Phone: + 52 33 38 33 67 22

EC REP



**Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.**  
**(Formerly Oculus Innovative Sciences Netherlands B.V.)**  
Boven de Wolfskuil 3, C30-C32,  
6049 LX Herten/Roermond The Netherlands  
Phone: +31 (0)475 318 666  
Fax: +31 (0)475 318 342  
www.sonomapharma.eu

IOCRD-170 Rev. 02  
Date of issue:  
October 22th 2024  
EOCAC-3643 ED-02



**AdvaCyn<sup>®</sup>**  
*hydrogel*

**Gebruiksaanwijzingen**



Breekbaar, met zorg hanteren



Droog houden



Uit de zon houden

200 mm

## Gebruiksaanwijzingen

NL

**Indicaties voor gebruik:** AdvaCyn® Hydrogel is geïndiceerd voor gebruik bij of op acute en chronische wonden, ulcera, snij-, schaaf- en brandwonden. AdvaCyn® Hydrogel kan vrijuit worden aangebracht als onderdeel van een uitgebreid wondbehandelingsplan.

**Beoogd doel:** AdvaCyn® Hydrogel is een geëlektrifyseerde hydrogel bestemd voor debridement en bevochtiging van acute en chronische wonden, ulcera, snij-, schaaf- en brandwonden.

**Verwachte klinische voordelen:** Door de microbiële belasting tijdens debridement te verminderen en een vochtige wondomgeving te helpen behouden, wordt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam ondersteund, waardoor de hersteltijd wordt verkort.

**Beoogde patiëntengroep:** Patiënten met behoefte aan wondzorg. Er zijn geen beperkingen op basis van leeftijd of medische aandoeningen, tenzij het gebruik van het product gecontra-indiceerd is door een zorgverlener.

**Beoogde gebruikers:** Zorgverleners en gebruikers in het algemeen.

**Hantering:** AdvaCyn® Hydrogel wordt goed verdragen bij gebruik zoals beoogd. Het is niet irriterend voor huid en ogen en sensibiliseert de huid niet. Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor hantering.

**Opslag:** AdvaCyn® Hydrogel vereist geen speciale opslagcondities met betrekking tot temperatuur. Houd de container goed gesloten en bewaar deze in de oorspronkelijke verpakking. Niet invriezen.

**Stabiliteit:** De stabiliteit van het ongeopende product is gewaarborgd van de productiedatum tot de uiterste gebruiksdatum (zie het productetiket voor de uiterste gebruiksdatum). Na opening blijft het product maximaal 60 dagen stabiel. Schrijf de datum van opening op de container in het gedeelte 'Datum geopend'.

**Aanwijzingen voor gebruik:** AdvaCyn® Hydrogel is klaar voor gebruik en hoeft niet te worden gemengd of verdund. Was uw handen grondig voordat u het product hanteert of het aangedane gebied reinigt. Breng AdvaCyn® Hydrogel rechtstreeks aan op het aangedane gebied.

**Behandeling:** Was uw handen grondig voordat u het product hanteert of het aangedane gebied reinigt. Reinig het gebied en droog het af met een steriel gaasje. Breng een dunne laag AdvaCyn® Hydrogel aan op de wond en de aangrenzende huid. Gebruik het product één of twee keer per dag en bedek het gebied met een verband.

### Contra-indicaties:

- Niet gebruiken in geval van allergie voor één of meerdere bestanddelen.
- Gebruik AdvaCyn® Hydrogel niet met andere topische oplossingen, tenzij geadviseerd door een zorgverlener.
- Vermijd contact met de ogen.

### Waarschuwingen en overwegingen:

- Gebruik het product niet als de veiligheidszegel is verbroken of ontbreekt.
- De container gesloten houden wanneer u het product niet gebruikt.
- Niet voor injectie of oraal gebruik.
- Dit product buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Praat met een zorgverlener als u diepe of ernstige wonden heeft, of als u zich zorgen maakt over de behandeling.
- Raadpleeg een arts als er tekenen van infectie (bijv. toegenomen pijn, bloeding, pus) optreden of als de wond geen tekenen van genezing vertoont.
- In sommige gevallen kunnen systemische of topische antibiotica nodig zijn naast AdvaCyn® Hydrogel.
- Meld elke bijwerking aan een zorgverlener.
- Neem in geval van ernstige verslechtering van de gezondheid of een ernstige bedreiging voor de gezondheid in verband met het product contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in uw land.

**Afvalverwijdering:** Hydrogel is niet-toxisch en veilig voor het milieu. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor afvoer.

**Bestanddelen:** Geëlektrifyseerd water, natriummagnesiumfluorosilicaat, natriumfosfaat, natriumchloride, natriumhypochloriet, hypochloorzuur.

### GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

**Inhoud 60 g, 100 g, 120 g, 236 g en 250 g:**

- 1 fles met dop
- 1 vernevelaar
- 1 geldispenser

**Gebruiksaanwijzing:** Verwijder de dop en doe de geldispenser of vernevelaar op de fles voor continu gebruik. Verwijder de geldispenser of vernevelaar niet meer nadat deze op zijn plaats zit.

**Inhoud 400 g:**

- 1 fles met geldispenser.

**Inhoud 400 g:**

- 1 container met dop.

120 mm



AdvaCyn®  
hydrogel

