


100 mm


100 mm






AdvaCyn® Wound Care


Gebruiksaanwijzingen




0 3 1 8




Breekbaar, met zorg hanteren




Droog houden



Uit de zon houden



Oculus Technologies of México S.A. de C.V.
 Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte
 Zip Code 45130, Zapopan, Jalisco, México,
 Phone: + 52 33 38 33 67 22

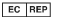

Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.
 (Formerly **Oculus Innovative Sciences Netherlands B.V.**)
 Boven de Wolfskuil 3, C30-C32
 6049 LX Herten/Roermond The Netherlands
 Phone: +31 (0)475 318 666
 Fax: +31 (0)475 318 342
 www.sonomapharma.eu

IOCRD-171 Rev. 02
 Date of issue:
 October 21st 2024
 EOCAC-3607 ED-02



Gebruiksaanwijzingen:

Indicaties voor gebruik: AdvaCyn® Wound Care is geïndiceerd voor gebruik in of op chirurgische wonden (zowel intraoperatief als postoperatief), evenals voor acute en chronische wonden, ulcera, snij-, schaaf- en brandwonden. AdvaCyn® Wound Care kan vrijuit worden toegepast als onderdeel van een uitgebreid wondbehandelingsplan.

Beoogd doel: AdvaCyn® Wound Care is een geëlektrolyseerde oplossing die is bedoeld voor gebruik bij debridement en bevochtiging van chirurgische wonden (zowel intra-operatief en postoperatief) en acute en chronische wonden, ulcera, snij-, schaaf- en brandwonden.

Verwachte klinische voordelen: Door de microbiële belasting tijdens debridement te verminderen en een vochtige wondomgeving te helpen behouden, wordt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam ondersteund, waardoor de hersteltijd wordt verkort.

Beoogde patiëntengroep: Patiënten met behoefte aan wondzorg. Er zijn geen beperkingen op basis van leeftijd of medische aandoeningen, tenzij het gebruik van het product contra-indiceerd is door een zorgverlener.

Beoogde gebruikers: Zorgverleners en gebruikers in het algemeen.

Hantering: AdvaCyn® Wound Care wordt goed verdragen bij gebruik zoals beoogd. Het is niet irriterend voor huid en ogen en sensibiliseert de huid niet. Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor hantering.

Opslag: AdvaCyn® Wound Care vereist geen speciale opslagcondities met betrekking tot temperatuur. Houd de container goed gesloten en bewaar deze in de oorspronkelijke verpakking. Niet invriezen.

Stabiliteit: De stabiliteit van het ongeopende product is gewaarborgd van de productiedatum tot de uiterste gebruiksdatum (zie het productetiket voor de uiterste gebruiksdatum). Na opening blijft het product maximaal 60 dagen stabiel. Schrijf de datum van opening op de container in het gedeelte 'Datum geopend'.

Aanwijzingen voor gebruik: AdvaCyn® Wound Care is klaar voor gebruik en hoeft niet te worden gemengd of verdund. Was uw handen grondig voordat u het product hanteert of het aangedane gebied reinigt. Breng AdvaCyn® Wound Care rechtstreeks aan op het aangedane gebied. Gebruik AdvaCyn® Wound Care bij elke verbandwissel. Door het verband te verzadigen met AdvaCyn® Wound Care kan het verband gemakkelijker worden verwijderd.

Behandeling: Was uw handen grondig voordat u het product hanteert of het aangedane gebied reinigt. Week/verzadig het verband met AdvaCyn® Wound Care bij elke verbandwissel, indien nodig. Gedurende de initiële behandelingsfase is dagelijks maximaal 15 minuten onderdompeling toegestaan.

Contra-indicaties:

- Niet gebruiken in geval van allergie voor één of meerdere bestanddelen.
- Gebruik AdvaCyn® Wound Care niet met andere topische oplossingen, tenzij een zorgverlener dit adviseert.

Waarschuwingen en overwegingen:

- Gebruik het product niet als de veiligheidszegel is verbroken of ontbreekt.
- De container gesloten houden wanneer u het product niet gebruikt.
- Niet voor injectie of oraal gebruik.
- AdvaCyn® Wound Care is veilig in geval van onbedoeld contact met de ogen of bij passage door de neus.
- Dit product buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Praat met een zorgverlener als u diepe of ernstige wonden heeft, of als u zich zorgen maakt over de behandeling.
- Raadpleeg een arts als er tekenen van infectie (bijv. toegenomen pijn, bloeding, pus) optreden of als de wond geen tekenen van genezing vertoont.
- In sommige gevallen kunnen systemische of topische antibiotica nodig zijn naast AdvaCyn® Wound Care.
- Meld elke bijwerking aan een zorgverlener.
- Neem in geval van ernstige verslechtering van de gezondheid of een ernstige bedreiging voor de gezondheid in verband met het product contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in uw land.

Afwijkingen: De oplossing is niet-toxisch en veilig voor het milieu. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor afvoer.

Bestanddelen: Geëlektrolyseerd water, natriumchloride, natriumhypochloriet en hypochlorzuur.

Inhoud: 100 ml, 120 ml en 250 ml:
 1 fles met dop
 1 vernevelaar

Gebruiksaanwijzing: Verwijder de dop en doe de vernevelaar op de fles voor continu gebruik. Verwijder de vernevelaar niet meer nadat deze op zijn plaats zit.

Inhoud: 500 ml:
 1 fles met vernevelaar/spuitmond.

Inhoud: 500 ml, 990 ml, 1 l en 5 l:
 1 fles met dop

120 mm