

UrgoTul Ag

UrgoTul Ag is een comfortabel niet-klevend verband met TLC-Ag (zilver) matrix om een lokale infectie tegen te gaan.



Artikelnaam URGOTUL AG 10 x 12 cm

Artikelnummer:553003

In de handel: 01-04-2019

Inhoud: 5 ST

Zlcode:16783913

BTW: 9%

Leveranciers Informatie:URGO Nederland B.V.

Laarderhoogtweg 25

1101 EB AMSTERDAM, NL

020-7986730

Productgroep

Wondverzorging en fixatie

► Wondverzorgingsproducten

► Vochttransporterend (wondcontactmateriaal)

▶ Geïmpregneerd

▶ Hydrocolloïddeeltjes, vaseline en zilverdeeltjes

Productinformatie

UrgoTul Ag, wondcontactlaag met zilverdeeltjes; voor wonden met tekenen van locale (of risico op) infectie.

De steriele wondcontactlaag bestaat uit een plooibaar polyester gaas dat geïmpregneerd is met hydrocolloïddeeltjes (CMC), vettige bestanddelen en zilverdeeltjes (TLC-Ag). De hydrocolloïddeeltjes vormen bij contact met wondvocht een gellaag. Deze gellaag vormt samen met het polyester gaas een lipide-colloïde film. De contactlaag laat wondvocht door naar een secundair wondverband, waardoor wond(rand)verweking voorkomen. De zilverdeeltjes hebben een antibacteriële werking op bacteriën, schimmels en gisten. De wondcontactlaag verkleeft niet aan de wond en is te verwijderen zonder het wondbed te verstoren. Verder voelt de contactlaag niet vet aan, is plooibaar en vormt zich naar de contouren van de wond. De wondcontactlaag is knipbaar en moet afgedekt worden met een secundair wondverband.

Specificatie:

- wondcontactlaag
- polyester gaas
- hydrocolloïddeeltjes (CMC)
- vettige bestanddelen
- zilverdeeltjes (TLC-Ag)
- antibacterieel
- gelvormend
- knipbaar
- afmeting 12x10cm
- steriel

Toepassen voor:

- chronische wonden

- decubitus
- beenulcera
- acute wonden
- partial thickness brandwonden
- dermatabrasie
- traumatische wonden
- chirurgische wonden

Niet toepassen bij:

- bekende gevoeligheid voor zilver
- indien een MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek wordt ondergaan

Vorbereiden:

- spoel de wond volgens lokaal protocol
- als eerst een ontsmettingsmiddel is gebruikt, spoelt u de wond grondig met normale zoutoplossing voordat het wondcontactverband wordt aangebracht
- knip het wondcontactverband eventueel op maat
- indien er handschoenen gebruikt worden, deze bevochtigen zodat het wondcontactverband bij het aanbrengen niet aan de handschoenen blijft kleven

Aanbrengen:

- plaats het wondcontactverband direct in een enkele laag over de wond
- bedek het wondcontactverband met een secundair verband, bijvoorbeeld een steriel gaasje of een absorberend verband
- fixeer het geheel met een zwachtel, buisverband of fixatietape

Verwijderen cq. verwisselen:

- verschoon het wondcontactverband elke 2 of 3 dagen, afhankelijk van de behandelde wond en de voortgang van de genezing
- kan tot maximaal 7 dagen in situ blijven

Waarschuwing:

- bij klinische aanwijzingen van plaatselijke infectie, kan de behandeling op advies van de arts worden voortgezet

- bij diepe wonden is het niet nodig meerdere lagen aan te brengen