

**BESCHRIJVING**

Cinesteam® is een niet-klevend secundair verband dat ontstekingsvocht absorbeert en kwalijke geurtjes verdrijft. Het bestaat uit een absorberende laag en een sachet (zakje) dat kaneel bevat.

Samenstelling: polyethyleen, polyester, polypropyleen en kaneel.

Kaneel adsorbeert vluchtige en slecht ruikende vluchtige bestanddelen die afkomstig zijn van de wond. Tegelijkertijd maskeert het de slechte restgeurtjes door een natuurlijke kruidengeur af te geven.

**INDICATIES**

Cinesteam® is een secundair verband dat is geïndiceerd voor de behandeling van slecht ruikende wonden.

**CONTRA-INDICATIES**

Cinesteam® mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen ervan, en dan vooral voor kaneel.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Cinesteam® moet worden aangebracht op een adequaat primair verband (het mag niet rechtstreeks contact maken met de wond). De absorberende laag (witte kant) moet worden aangebracht aan de kant van de wonde, op het primaire verband.

Aanbrengen van Cinesteam®

1. Kies het formaat van Cinesteam® zodat deze het primaire verband bedekt. Indien nodig, kunt u meerdere verbanden Cinesteam®.
2. Haal Cinesteam® uit de primaire verpakking en breng direct aan op het primaire verband.
3. Houd Cinesteam® op zijn plaats met geschikt medisch materiaal.

Vervangen van Cinesteam®

Verwijder Cinesteam® voorzichtig.

Cinesteam kan blijven zitten zolang het verband de slechte geurtjes voldoende absorbeert en maskeert (1 tot 7 dagen). Hoe vaak het verband vervangen dient te worden, hangt af van de hoeveelheid wondvocht.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

Gebruik Cinesteam® niet als primair verband.

Snijd Cinesteam® niet door, want daardoor kan de kaneel zich verspreiden.

Gebruik Cinesteam® niet als de primaire verpakking open of beschadigd is, of als het verband zelf gescheurd is.

Gebruik Cinesteam® niet in combinatie met actieve koolstofverbanden. Er is namelijk een risico dat het dan niet langer slechte geurtjes maskeert.

Bedek Cinesteam® niet met afsluitend bevestigingsmateriaal of een verband.

Slik de kaneel van Cinesteam® niet in.

Neem geen bad of douche met Cinesteam®.

Dompel Cinesteam® niet onder in water.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Meld elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden en dat verband houdt met Cinesteam® aan Cemag Care en aan uw bevoegde instantie.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

**BESCHIKBARE FORMATEN**

Cinesteam® is beschikbaar in:

- 11 x 19 cm

**BEWAREN EN SPECIFIEKE INSTRUCTIES**

Plat bewaren en vervoeren.



Beschut tegen het zonlicht bewaren.



Droog bewaren.



Niet opnieuw gebruiken.



De witte kant van het verband aanbrengen aan de kant van de wond.



Het verband niet doorsnijden.



Lees voor het gebruik de bijsluiters.



Productcode



Lotnummer



Houdbaarheidsdatum



CE-markering



CEMAG Care - 55, rue de Turbigo - 75003 Parijs – Frankrijk  
www.cinesteamcare.com