



Klinigrip® Sling

ARM-SLING TER ONDERSTEUNING VAN ARM OF POLS BIJ GIPS, BLESSURE OF NA EEN OPERATIE

Productinformatie

- vervaardigd van stevig, doorgestikt blauw foam materiaal
- comfortabel in de nek door gebruik van zachte materialen
- sterk doorgestikt foam materiaal rekt niet uit, dus arm blijft op zijn plaats

- eenvoudig vast te zetten met bijgeleverde Y-vormige klittenbandsluitingen
- door stevige klittenbandfixatie blijft sling goed vastzitten
- eenvoudig op maat te knippen
- zowel in ziekenhuisverpakking als in kleinverpakking (voor behandeling van één patiënt) leverbaar



GEBRUIKSINSTRUCTIE KLINIGRIP SLING

REF 132 590 (2 rollen 12 m x 5,5 cm)




Aanlegmogelijkheid 1



Verwijder de dispenserstrook aan de voorzijde van de verpakking en trek de Klinigrip Sling naar buiten.




Neem twee Y-vormige klittenbandsluitingen uit de bovenzijde van de doos.

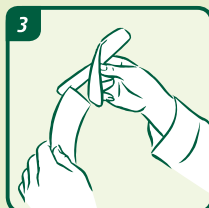


Plaats de Y-zijde van het klittenband op het uiteinde van de sling.




Maak van de sling een cirkel ter grootte van de arm (net onder de elleboog) en zet de enkele klittenband vast op de sling.

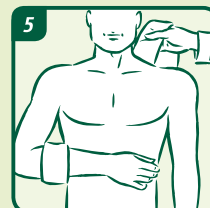

Plaats de geblesseerde arm in de opening en haal de sling onder deze arm door. Leg de sling schuin naar boven over de rug en haal deze over de andere schouder naar voren.

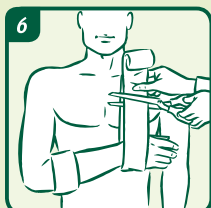

Houd de geblesseerde arm op de gewenste hoogte voor de borst en haal de sling hier van achter naar voren onderdoor. Knip de sling op de gewenste lengte af.

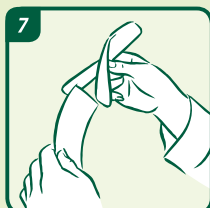

Neem de andere Y-vormige klittenbandsluiting en plaats deze met de Y-zijde op het uiteinde van de sling.



Bevestig de andere kant van deze klittenbandsluiting vervolgens op gewenste hoogte op de achterliggende sling.




Aanlegmogelijkheid 2



Verwijder de dispenserstrook aan de voorzijde van de verpakking en trek de Klinigrip Sling naar buiten.



Haal één Y-vormige klittenbandsluiting uit de bovenzijde van de doos.

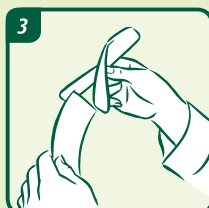

Plaats de Y-zijde van het klittenband op het uiteinde van de sling.



Houd de geblesseerde arm op de gewenste hoogte voor de borst. Leg de sling rond de nek en haal deze onder de arm door. Knip de sling af op de gewenste lengte.



Bevestig de klittenbandsluiting vervolgens op de gewenste hoogte op de achterliggende sling.



GEBRUIKSINSTRUCTIE KLINIGRIP SLING

REF 132 591 (1 rol 1,9 m x 5,5 cm)

- 1 Neem de Klinigrip Sling en de losse Y-vormige klittenbandsluiting uit de verpakking.
- 2 Ga direct verder met stap 4 van één van beide aanlegmogelijkheden.

BESTELINFORMATIE

REF.	Afmeting	Inhoud verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	ZI-memocode
132 590	12 m x 5,5 cm	2 rollen	3 x 2 rollen	15226026	KLINX1
132 591	1,9 m x 5,5 cm	1 rol	10 x 1 rol	15226034	KLINX1