

# 3M™ Cavilon™ Niet Prikkende Barrièrefilm

## Een oplossing voor huidbescherming tegen kleeflagen bij infuusfixatie.

Herhaalde verbandwissels en het gebruik van medische tapes kan een uitdaging zijn, zeker wanneer de patiënt een gevoelige huid heeft. Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm bevat een unieke polymeer die een ademende barrièrelaag op de huid vormt. Deze barrièrelaag beschermt de huid tegen (sterke) kleeflagen bij infuusfixatie.

### Niet alle barrièrefilms zijn hetzelfde.

Zeven karakteristieken die een barrièrefilm zou moeten hebben voor een optimale huidbescherming:

1. **Klinisch bewezen huidbescherming tegen (sterke) kleeflagen.**
2. **CHG compatibel**
  - Sommige barrièrefilms bevatten materialen die een negatieve invloed hebben op de antimicrobiële werking van Chloorhexidine Gluconaat
3. **Steriliteit**
  - De richtlijnen vragen om steriel materiaal en een steriele aanbreng techniek; sommige barrièrefilms zijn non-steriel.
4. **Sneldrogend en niet kleverig**
  - Voor gebruiksgemak en comfort van de patiënt.
5. **Niet-cytotoxisch**
  - Heeft geen negatieve invloed op het helingsproces van de huid
6. **Hypoallergeen**
7. **Niet prikkend**
  - Comfortabel, zelfs op een beschadigde huid.

### Huidbescherming infuusfixatie


Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm beschermt de huid rondom de insteekopening tegen sterke kleeflagen afkomstig van medische tapes en infuusfixatiemateriaal. Het product is verkrijgbaar in twee formaten die met name geschikt zijn voor gebruik onder infuusfixatiemateriaal: de 1ml swab en de 3ml swab

### Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm is compatibel met 3M Tegaderm™ CHG (Chloorhexidine Gluconaat)

3M™ Tegaderm™ CHG combineert de krachtige effectiviteit van CHG met het gemak van de Tegaderm™ folies om uw dagelijkse handelingen, volgens protocol, te vereenvoudigen.

- ▶ Bewezen effectief in het verminderen van huidflora\*.
- ▶ Transparant, waardoor inspectie van de insteekopening continue mogelijk is.
- ▶ Geïntegreerd ontwerp van de folie en de CHG-gelpad. Dit vermindert het aantal handelingen bij aanbrengen en verkleint zo de kans op fouten.
- ▶ Eenvoudig in gebruik, net als de andere Tegaderm™ folies.
- ▶ Absorbeert een kleine hoeveelheid vocht.
- ▶ Groot oppervlakte, voor bedekking van zowel de insteekopening als eventuele hechtingen.

\* Maki DG (2008), et al. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparative Study In Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.

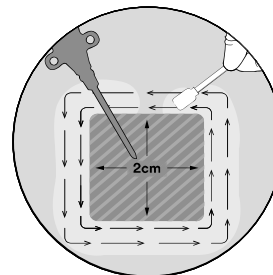

Juiste applicatiemethode  
Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm



### Toepassingsinstructies:


Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm is compatibel met zowel Chloorhexidine-bevattende als Povidone Iodine-bevattende oplossingen. De barrièrefilm mag worden aangebracht over de antimicrobiële oplossing wanneer deze volledig opgedroogd is. Vervolgens kan de 3M™ Tegaderm™ CHG worden geplaatst om de insteekopening te fixeren en te beschermen.

De steriele 3M™ Cavilon™ Niet Prikkende Barrièrefilm 1ml. swab (3343E) wordt aangeraden voor gebruik rondom insteekopeningen. Een 3ml. swab (3345E) is ook beschikbaar, bijvoorbeeld voor de centrale lijnen. Deze producten mogen opgenomen worden in verbandwissel kits, en hersteriliseerd worden volgens specifieke parameters.

*Let op! De Cavilon™ 28 ml. spray (3346E) is niet bedoeld voor gebruik bij infuusfixatie.*

1. Bereid de verbandwissel voor volgens het ziekenhuisprotocol.
2. Verwijder het verband.
  - Let op! Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm vormt een bescherm laag tussen huid en de kleeflaag. De barrière wordt verwijderd met de kleeflaag en moet zodoende opnieuw worden aangebracht met iedere verbandwissel.
3. Ga verder met een antiseptische preparatie volgens protocol. Laat de oplossing volledig drogen voordat Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm word aangebracht.

4. Breng een egale laag Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm aan op het gebied dat zal worden bedekt door de kleeflaag. Zorg hierbij dat de directe omgeving van de insteekopening wordt vermeden. Wanneer een fixatiemateriaal wordt gebruikt waarin Chlorhexidine Gluconate (CHG) zit, **breng dan geen barrièrefilm aan op de huid waarover de CHG gel pad wordt geplaatst.**
5. Breng vervolgens het verband aan volgens protocol.

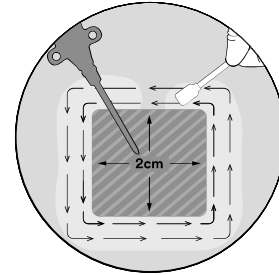

Juiste applicatiemethode  
Cavilon Niet Prikkende Barrièrefilm



### Bestelinformatie

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud
3343E	Niet Prikkende Barrièrefilm 1 ml Swabs	25 Swabs/Verpakking



**3M Nederland B.V.**  
3M Health Care  
Postbus 1002  
2600 BA Delft  
Tel: 015 782 23 33  
[www.cavilon.nl](http://www.cavilon.nl)

**3M Belgium bvba/sprl**  
3M Health Care  
Hermessaan 7  
1831 Diegem  
Tel: 02 722 53 51  
[www.cavilon.be](http://www.cavilon.be)