

SenSura® Mio Convex

2-delig gesloten flex stomazakje

Stomahuidplak

Stomazorg



Gebruiksaanwijzing

23324443 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.

Alle rechten voorbehouden. © 2020-09-29

Beoogde doel

Het stomazakje is bedoeld om passief ontlasting/urine uit een stoma op te vangen. De huidplak is aan het stomazakje bevestigd en is bedoeld om te hechten aan de intacte huid rondom de stoma.

Indicaties

Het hulpmiddel is geïndiceerd voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik wordt niet aanbevolen, er kan namelijk kruisbesmetting optreden.

Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw verpleegkundige voordat u een convex product gaat gebruiken, zodat u het product correct gebruikt.

Informatie

Stomazakje voor eenmalig gebruik.

Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie staat, zoals serienummer, vervaldatum en een unieke streepjescode.

Het hulpmiddel dient niet verwijderd te worden voor een MR scan, aangezien het MR veilig is.


Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Speciale bewaarcondities


Sla de huidplak horizontaal op.

Beschermen tegen zonlicht.

Voorbereiding

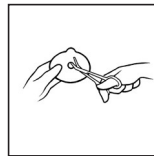

Knip met behulp van een kleine gebogen schaar en de kniplijnen op de huidplak een opening in de huidplak met dezelfde grootte en vorm als de stoma. U kunt de grootte en vorm van de stoma met het bijgeleverde stomamalletje opmeten. Een perfecte aansluiting tussen de opening en de stoma is belangrijk om het risico op lekkage en huidproblemen te verminderen.

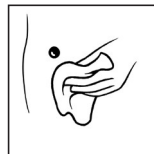


Reinig de stoma en de omliggende huid grondig. De huid moet volledig droog zijn voordat u de huidplak aanbrengt.

Aanbrengen




Trek de beschermfolie van de huidplak.

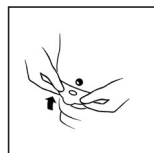


Breng de huidplak aan rond de stoma en oefen druk uit op de huidplak, zodat deze snel hecht en de huidplak perfect aansluit op de huid rond de stoma. De huidplak moet precies rondom de stoma passen. Een goede afdichting rondom de stoma is belangrijk om lekken te voorkomen.


Wanneer u de huidplak op de buik plaatst, begint u met het gebied rondom de stoma en drukt u de huidplak op de huid. Wrijf met uw vinger rondom de stoma, zodat de huidplak goed afdicht. Druk de huidplak aan, waarbij u begint bij de stoma en vervolgens naar buiten beweegt, naar de randen toe. De huidplak moet overal contact maken met de huid.

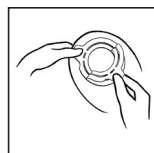

Zorg dat de koppeling op de huidplak schoon en droog is (gebruik bij het reinigen uitsluitend water). Verwijder het beschermepapier van de kleefring van het zakje. Voorkom dat u aan de schuimring trekt of deze uitrekt.

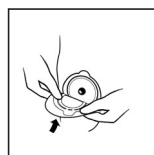

Zorg ervoor dat de onderkant van de koppeling van het zakje gelijk ligt met de turquoise lijn op de buitenste rand van de huidplak.

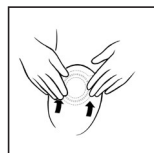


Gebruik uw vingers om vanaf de onderkant lichte druk uit te oefenen op het zakje en de huidplak en beweeg over de koppelingsring tot u bovenaan bent. Na aanbrengen kan het zakje nog eenmaal worden herplaatst. Zorg ervoor dat de flens schoon is, wanneer het zakje opnieuw wordt aangebracht.

Verwijderen



Oefen lichte druk uit op de kraag met één hand en verwijder de zak met de andere hand, waarbij u aan het turquoise lipje trekt. Doe dit langzaam zodat het zakje gemakkelijk los komt.

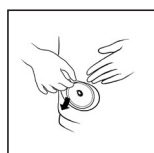

Verwijder de huidplak voorzichtig door het verwijderingslipje aan de huidplak weg te trekken van de buik en de huidplak langzaam omlaag te rollen. Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggooiën afval

Het product is bestemd voor eenmalig gebruik en moet met het normale huishoudelijk afval worden weggegooid.


Spoel het product niet door het toilet.

Filtersticker



Plaats zo nodig één van de bijgesloten filterstickers op het filter om te voorkomen dat er gas ontsnapt.

Gordel

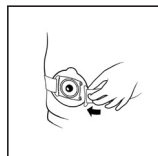

Stel de lengte van de gordel af door aan de banden te trekken, zodat deze goed past. U hoeft de stof aan de gesp niet te verwijderen.
Bevestig de vier gordelhaken aan de bevestigingsogen aan weerszijden van de huidplak. Begin aan de voorkant en oefen lichte druk uit richting de buik. Trek de gordelhaken daarna weg van de koppeling totdat ze op hun plaats klikken.

(Uitsluitend voor huidplakken met bevestigingsogen).

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Fabricagedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Unieke productidentificatie



(Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Deze kant boven



Recyclebare verpakking



MRI-veilig