

Barrière crème



Gebruiksaanwijzing

23325526 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.

Alle rechten voorbehouden.© 2021-01-18

Coloplast BV
Softwareweg 1
Postbus 1111
3800 BC Amersfoort
e-mail:
nlcare@coloplast.com
Tel.: 033-4 54 44 44
Fax: 033-4 54 44 55

Beoogd doeleind

De Brava-barrièrecrème is bedoeld voor gebruik op intacte huid rondom de stoma om de huid te beschermen tegen darminhoud, urine en pus.

Indicatie

Brava-barrièrecrème is geïndiceerd voor mensen met een stoma.

Voorzorgsmaatregelen

Beschermen tegen zonlicht, want dat kan de kwaliteit van het product beïnvloeden.

Informatie

Het product is een barrièrecrème die stomahuidplakken laat plakken.

Bestanddelen

water, cetearylolivaat, sorbitanolivaat, tetrahydroxypr opylethyleendiamine, conserveermiddel, emulgator

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Bijzondere bewaarcondities

Houdt uit direct zonlicht.

Hoe te gebruiken

Wrijf voorzichtig een heel dun laagje crème op een schone huid. Verwijder overtollige crème met een doekje voordat u de stomahuidplak aanbrengt.

Weggoeien afval

Het product moet met het normale huishoudelijke afval of volgens de plaatselijke richtlijnen worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Fabricagedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Unieke productidentificatie



Niet blootstellen aan zonlicht



Recyclebare verpakking