

Brava[®]

 **Coloplast**

Lijmverwijderaarspray



Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebruiksaanwijzing

23323493 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden.©
2020-05-14

Beoogde doel

Brava huidplakverwijderaarspray is bedoeld voor de verwijdering van medische plakstrips vanaf intacte huid.

Voorzorgsmaatregelen

Voorkom rechtstreeks gebruik op niet-intacte huid, b.v. wondbedden en slijmvliezen (ogen, oren, neus, mond, vagina) omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.

Rechtstreekse inhalatie voorkomen, want dat kan leiden tot tijdelijke irritatie van de luchtwegen.

Vanwege hun onvolgroeide huid niet aanbevolen voor gebruik bij premature baby's, pasgeborenen of baby's die minder wegen dan 4 kg.

Zeer licht ontvlambare aerosol - Gevaar

Houder onder druk: Kan openbarsten bij verhitting.

Buiten bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken.

Niet op een open vlam of andere ontstekingsbron spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Informatie

Het product is op basis van siliconen en herbruikbaar. Het product droogt binnen enkele seconden en heeft geen effect op de hechting van ander materiaal.

Bestanddelen: bevat een mengsel van alkylsiloxanen.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als dit product niet op de door Coloplast aanbevolen manier wordt gebruikt.

Het product gebruiken

Gebruiksaanwijzing

1. Spuit het product rond de rand van de huidplak.
2. Verwijder na enkele seconden voorzichtig de huidplak. Herhaal de procedure indien nodig.

Weggoeien

Het product moet samen met andere spuitbussen overeenkomstig de plaatselijke regelgeving worden verwijderd.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Productiedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Geeft de bovenste temperatuurgrens aan waaraan het medisch hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.



Let op



Geeft een streepjescode aan die een unieke hulpmiddelidentificatie bevat



(Global Trade Item Number)
Wereldwijd handelsartikelnummer



Uit de buurt van zonlicht houden



Recyclebare verpakking



Voldoet aan de aerosolrichtlijn
75/324/EEG



Zeer licht ontvlambaar