

Huidbeschermingsfilm tissues (iso huidreinigingsdoekjes)



Gebruiksaanwijzing

23323894 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden.©
2020-07-02

Beoogde doel

Het product is bedoeld om intacte huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van lichaamsafval en medische plakstrips.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik is niet aangewezen, kruisbesmetting kan optreden.

Herverwerking, wassen, desinfecteren en/of steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor meer risico ontstaat op letsel of infectie voor de gebruiker.

Voorzorgsmaatregelen

Voorkom rechtstreeks gebruik op niet-intacte huid, b.v. wondbedden en slijmvliesen (ogen, oren, neus, mond, vagina) omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.

Vanwege hun onvolgroeide huid niet aanbevolen voor gebruik bij premature baby's, pasgeborenen of baby's die minder wegen dan 4 kg.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Informatie

Het product is op siliconen gebaseerd. Het product droogt binnen enkele seconden en heeft geen invloed op de kleefkracht van ander materiaal.

Bestanddelen: bevat een mengsel van alkylsiloxanen.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als dit product niet op de door Coloplast aanbevolen manier wordt gebruikt.

Het product gebruiken

1. Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.
2. Scheur het zakje open, neem het doekje eruit en vouw het open.
3. Wrijf de tissue voorzichtig over de te beschermen huid.
4. Zodra de huid volledig droog is, kan het materiaal zoals gebruikelijk worden aangebracht.

Bij iedere vervanging van materiaal moet het product opnieuw worden gebruikt.

Weggoeien

De zak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met het normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in
overeenstemming is met de
Europese wetgeving voor medische
hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Productiedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet voor hergebruik



Geeft een streepjescode aan die een
unieke hulpmiddelidentificatie bevat



(Global Trade Item Number)
Wereldwijd handelsartikelnummer



Uit de buurt van zonlicht houden



Recyclebare verpakking