

Brava®



nl Kneadbare ring

Vult oneffenheden/plooiën op

Stomazorg



Gebruiksaanwijzing

Lees aandachtig de volgende aanwijzingen.

23340483 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. © 2021-10-13

Productbeschrijving

Het product is bedoeld voor het opvullen van plooiën en rimpels in de intacte huid rondom de stoma. Dit zorgt voor een afdichting tussen de stoma en de stoma huidplak en beschermt de huid tegen de ontlasting/urine van de stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik wordt niet aanbevolen. Er kan kruisbesmetting optreden, wat in potentie kan leiden tot een lokale infectie.

Herverwerking, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor meer risico ontstaat op letsel of infectie voor de gebruiker.

Voorzorgsmaatregelen

Dit product is niet-steriel en dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij voortijdig geboren baby's en zeer jonge kinderen die couveusezorg krijgen, omdat het kan leiden tot verhoogde infectierisico's.

Alleen voor uitwendig gebruik.


Houd het uit direct zonlicht.

Informatie

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.


Het product gebruiken

Vorbereiding

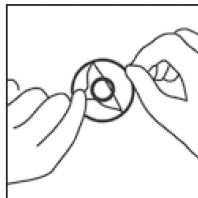


Zorg ervoor dat de huid rond de stoma schoon en droog is voordat u de kneadbare ring aanbrengt.

Verwijder de ring uit de doordrukstrip en trek vervolgens het bescherm papier van beide zijden door de verwijderingslipjes vast te pakken.

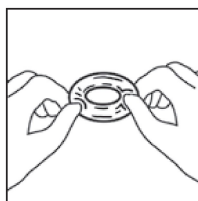


Kneed en rek het product in de gewenste vorm.


Inbrengen

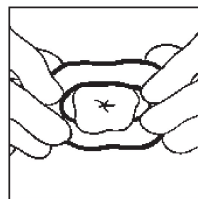

Breng de ring aan op de huid rond de stoma. Indien nodig kunt u de vorm aanpassen. Kneed de pasta met uw vingers zodat de rand van de ring stevig wordt gladgestreken op de huid.

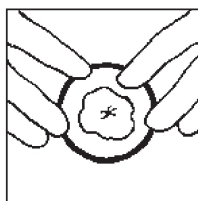

Wanneer u 2-delig stomaopvangmateriaal gebruikt, kunt u de ring direct op de zijde waar ook de koppeling van de huidplak zit aanbrengen, zodat deze nauwsluitend rond de stoma past.

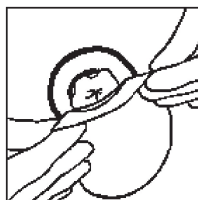

Breng het stomazakje op de gebruikelijke manier aan op de huidplak.

Verwijderen

Verwijder de kneadbare ring na gebruik voorzichtig van de huid door deze geleidelijk naar beneden te rollen. De kneadbare ring moet samen met de plakstrip van de huid verwijderd worden. Indien er kleine resten op de huid achterblijven zijn deze niet schadelijk voor de huid of hebben ze geen effect op de hechting van de volgende kneadbare ring.

Weggoaien

Het product moet met het normale huishoudelijke afval of volgens plaatselijke richtlijnen worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (JJJJ-MM-DD)



Lotnummer



Fabricagedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Uniek productidentificatie



(Global Trade Item Number)
Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Recyclebare verpakking



MRI-veilig