

Brava Beschermende Ring

Stomazorg



Gebruiksaanwijzing

23325689 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.

Alle rechten voorbehouden. © 2021-01-25

Beoogd doeleind

Brava Beschermende Ring is bedoeld om een afsluiting tussen de intacte huid rondom de stoma en een stomahuidplak te creëren, ter bescherming van de huid tegen de ontlasting/urine van de stoma. Het product is ontworpen voor het opvullen van de oneffenheden/plooien in de huid rondom de stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik kan letsel opleveren voor de gebruiker.

Herverwerking, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor meer risico ontstaat op letsel of infectie voor de gebruiker.

Voorzorgsmaatregelen


Houdt uit direct zonlicht.

Informatie

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.


Hoe te gebruiken

Vorbereiding

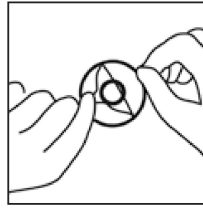


Voordat u Brava Beschermende Ring aanbrengt, moet u controleren of de huid rondom de stoma schoon en droog is.

Verwijder het product uit de blisterverpakking en trek vervolgens het beschermepapier van beide zijden door de aftreklipjes vast te pakken.

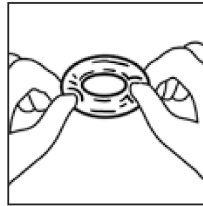


Kneedt het product in de gewenste vorm.

Aanbrengen

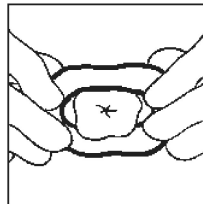

Breng Brava Beschermende Ring aan op de huid rondom de stoma. Indien nodig kunt u de vorm aanpassen. Vorm het product met uw vingers zodat de rand van het product stevig aangedrukt op de huid is bevestigd.

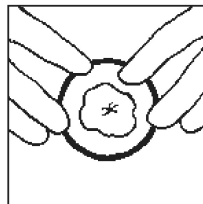

Het product kan ook op de huidplak worden aangebracht voordat de huidplak en de Beschermende Ring samen op de huid worden aangebracht.

Indien u 2-delig stomamateriaal gebruikt, kunt u Brava Beschermende Ring ook rechtstreeks aanbrengen op de zijde van de huidplak waar het zakje wordt aangebracht, zodat hij goed rond de stoma aansluit.

Breng het stomazakje op de gebruikelijke manier aan op de huidplak.

Verwijderen

Na gebruik verwijdert u de huidplak en Brava Beschermende Ring voorzichtig van de huid. Het product moet samen met de huidplak van de huid komen. Indien er kleine resten op de huid achterblijven kunt u deze laten zitten, ze zijn niet schadelijk voor de huid. Ze hebben ook geen effect op de hechting van het volgende product dat wordt aangebracht.

Weggoien afval


Het product moet met het normale huishoudelijke afval of volgens plaatselijke richtlijnen worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.





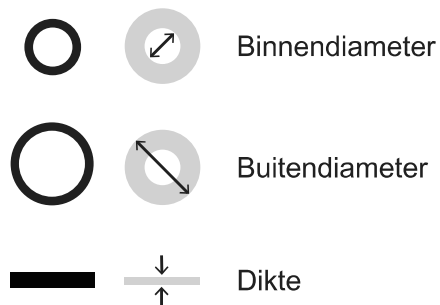


Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Symbolen



Verklaring van de symbolen

	Medisch hulpmiddel
	Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen
	Referentienummer
	Vervaldatum (DD-MM-JJJJ)
	Lotnummer
	Fabricagedatum (DD-MM-JJJJ)
	Fabrikant
	Gebruiksaanwijzing raadplegen
	Niet opnieuw gebruiken
	Unieke productidentificatie
	(Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer
	Niet blootstellen aan zonlicht
	Recyclebare verpakking
	MRI-veilig