

Brava[®]

 **Coloplast**

Glijgel

Stomazorg



Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebruiksaanwijzing

23325898 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.

Alle rechten voorbehouden. © 2021-01-26

Beoogd doeleind

Brava glijmiddeldeodorant is bedoeld om de geur van de inhoud van een stomazakje te neutraliseren en om de inhoud te bevochtigen.

Voorzorgsmaatregelen

Houdt uit direct zonlicht.


Informatie

Bestanddelen:

Water, cocamidopropylbetaïne, hydroxypropylguar, parfum, tetranatium-EDTA, imidiazolidinylureum, citroenzuur.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Hoe te gebruiken

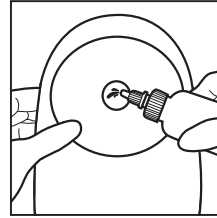

Voeg 5-10 ml of één zakje toe aan het zakje en wrijf er voorzichtig overheen om de Brava glijmiddeldeodorant gelijkmatig te verdelen.

Pas de hoeveelheid aan op de grootte van uw stomazakje.



Als u een ileostomazakje gebruikt, kunt u de gel via de opening toevoegen.

Herhaal na het legen van het zakje.

Weggoaien afval

Het product moet met het normale huishoudelijke afval of volgens plaatselijke richtlijnen worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Fabricagedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Unieke productidentificatie



(Global Trade Item Number)
Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Recyclebare verpakking