

Assura[®]

 **Coloplast**

nl Stomazakje
1-delig gesloten zakje

Stomazorg



Gebruiksaanwijzing

Lees aandachtig de volgende aanwijzingen.

23327824 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
Alle rechten voorbehouden. © 2021-07-16

Productbeschrijving

Het stomazakje is bedoeld om passief ontlasting/urine uit een stoma op te vangen. De huidplak is aan het stomazakje bevestigd en is bedoeld om te hechten aan de intacte huid rondom de stoma.

Indicatie

Het hulpmiddel is geïndiceerd voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik wordt niet aanbevolen. Er kan kruisbesmetting optreden, wat in potentie kan leiden tot een lokale infectie.

Recyclen, wassen, ontsmetten en/of (her)steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw verpleegkundige voordat u een convex product gaat gebruiken, zodat u het product correct gebruikt.

Dit product is niet-steriel en dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij voortijdig geboren baby's en zeer jonge kinderen die couveusezorg krijgen, omdat het kan leiden tot verhoogde infectierisico's.

Informatie

Stomazakje voor eenmalig gebruik.

Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie staat, zoals serienummer, vervaldatum en een unieke streepjescode.

Het hulpmiddel hoeft niet verwijderd te worden voor een MRI-scan, aangezien het MRI-veilig is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.


Bijzondere bewaarcondities

Houd uit het directe zonlicht.

Horizontaal bewaren.

Het product gebruiken

Vorbereiding

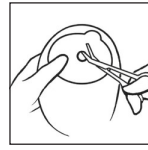


Knip met behulp van een kleine gebogen schaar en de kniplijnen op de huidplak een opening in de huidplak met dezelfde grootte en vorm als de stoma.
U kunt de grootte en vorm van de stoma met het bijgeleverde stomamalletje opmeten.
Een perfecte aansluiting tussen de opening en de stoma is belangrijk om het risico op lekkage en huidproblemen te verminderen.




Reinig de stoma en de omliggende huid grondig. De huid moet volledig droog zijn voordat de huidplak wordt aangebracht.

Aanbrengen

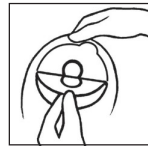

Trek de beschermfolie van de huidplak.

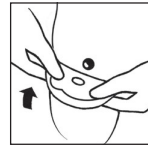


Vouw de huidplak naar achteren, breng hem aan rond de stoma en druk hem stevig op de huid.
De huidplak moet precies rondom de stoma passen. Een goede afdichting rondom de stoma is belangrijk om lekken te voorkomen. Wanneer u de huidplak op de buik plaatst, begint u met het gebied rondom de stoma en drukt u de huidplak op de huid. Wrijf met uw vinger rondom de stoma, zodat de huidplak goed afdicht.
Druk de huidplak aan, waarbij u begint bij de stoma en vervolgens naar buiten beweegt, naar de randen toe. De huidplak moet overal contact maken met de huid.



Druk op het zakje, zodat het snel hecht en de huidplak perfect aansluit op de huid rond de stoma.

Verwijderen

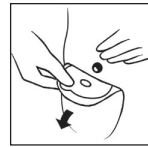


Verwijder het zakje voorzichtig door het verwijderingslipje aan de huidplak weg van de buik te trekken en de huidplak langzaam omlaag te rollen.
Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggoien

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden weggegooid, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Filtersticker

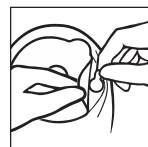

Plaats zo nodig één van de bijgesloten filterstickers op het filter om te voorkomen dat er gas ontsnapt.

Melden van incidenten

Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als resultaat van het gebruik, gelieve dit dan aan de fabrikant en aan uw nationale instantie te melden.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (JJJJ-MM-DD)



Lotnummer



Fabricagedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Geeft een drager aan met informatie over de Unique Device Identifier



(Global Trade Item Number)
Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Deze kant boven



Recyclebare verpakking



MRI-veilig