

SenSura® SenSura® Convex

Click 2-delig gesloten stomazakje

Stomahuidplak

Stomazorg



Hoe te gebruiken

Vorbereiding



Knip met behulp van een kleine gebogen schaar en de kniplijnen op de huidplak een opening in de huidplak met dezelfde grootte en vorm als de stoma.
U kunt de grootte en vorm van de stoma met het bijgeleverde stomamalletje opmeten.
Een perfecte aansluiting tussen de opening en de stoma is belangrijk om het risico op lekkage en huidproblemen te verminderen.




Reinig de stoma en de omliggende huid grondig. De huid moet volledig droog zijn voordat u de huidplak aanbrengt.


Aanbrengen




Verwijder de beschermfolie van de huidplak.

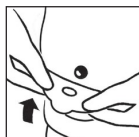


Breng de huidplak aan rond de stoma en oefen druk uit op de huidplak, zodat deze snel hecht en de huidplak perfect aansluit op de huid rond de stoma.
De huidplak moet precies rondom de stoma passen. Een goede afdichting rondom de stoma is belangrijk om lekken te voorkomen. Wanneer u de huidplak op de buik plaatst, begint u met het gebied rondom de stoma en drukt u de huidplak op de huid. Wrijf met uw vinger rondom de stoma, zodat de huidplak goed afdicht. Druk de huidplak aan, waarbij u begint bij de stoma en vervolgens naar buiten beweegt, naar de randen toe. De huidplak moet overal contact maken met de huid.

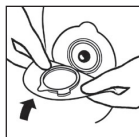

Zorg dat de koppeling op de huidplak schoon en droog is (gebruik bij het reinigen uitsluitend water).
Zorg ervoor dat de borging open is. Plaats de onderkant van de koppeling van het zakje tegen de onderkant van de koppeling van de huidplak.

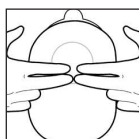

Druk het zakje en de huidplak vanaf de onderkant aan. Gebruik hiervoor de middelste vingers.

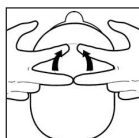

Met uw wijsvingers volgt u met een lichte druk de contouren van de koppeling. Beweeg hiervoor uw vingers naar de bovenzijde van de ring.



Sluit de borging door deze tussen wijsvinger en duim samen te drukken. Het zakje is stevig op de huidplak bevestigd als u een klik hoort.



Gebruiksaanwijzing

23326799 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
Alle rechten voorbehouden. © 2021-03-09

Productbeschrijving

Het stomazakje is bedoeld om passief ontlasting/urine uit een stoma op te vangen. De huidplak is aan het stomazakje bevestigd en is bedoeld om te hechten aan de intacte huid rondom de stoma.

Indicatie

Het hulpmiddel is geïndiceerd voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in.

Recyclen, wassen, ontsmetten en/of (her)steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw verpleegkundige voordat u een convex product gaat gebruiken, zodat u het product correct gebruikt.

Informatie

Stomazakje voor eenmalig gebruik.

Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie staat, zoals serienummer, vervaldatum en een unieke streepjescode.

Het hulpmiddel hoeft niet verwijderd te worden voor een MRI-scan, aangezien het MRI-veilig is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Bijzondere bewaarcondities

Horizontaal bewaren.

Houd uit het directe zonlicht.

Verwijderen



Verwijder het zakje door met de vingertop op het kleine lipje te drukken dat naar uw buik wijst en zo de borging te openen.



Houd het verwijderingslipje vast en verwijder het zakje door het voorzichtig van de huidplak weg te trekken.




Verwijder de huidplak voorzichtig door het aan het verwijderingslipje van de huidplak van de buik weg te trekken en de huidplak langzaam omlaag te rollen. Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggooiën

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Filtersticker

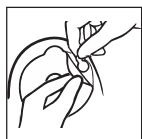

Plaats zo nodig één van de bijgesloten filterstickers op het filter om te voorkomen dat er gas ontsnapt.

Gordel



Stel de lengte van de gordel af door aan de banden te trekken, zodat deze goed past. U hoeft de stof aan de gesp niet te verwijderen.
Haak het haakje van de gordel in het bevestigingssoog voor de gordel op het stomazakje of de huidplak. Sla de gordel vervolgens om het lichaam. Haak daarbij het haakje dat zich aan het andere uiteinde van de gordel bevindt, in het andere bevestigingssoog op het stomazakje of de huidplak.
Pas de lengte van de gordel zo nodig aan.
(Uitsluitend voor huidplakken met bevestigingsogen).

Melden van incidenten

Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als resultaat van het gebruik, gelieve dit dan aan de fabrikant en aan uw nationale instantie te melden.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (JJJJ-MM-DD)



Lotnummer



Fabricagedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Unieke productidentificatie



(Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Deze kant boven



Recyclebare verpakking



MRI-veilig