

Gebruiksaanwijzing

Lees aandachtig de volgende aanwijzingen.

23340597 Version 1 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. © 2021-10-25
Velcro® is eigendom van Velcro Industries B.V.

Productbeschrijving

Het stomazakje is bedoeld om passief ontlasting/urine uit een stoma op te vangen. De huidplak is aan het stomazakje bevestigd en is bedoeld om te hechten aan de intacte huid rondom de stoma.

Indicatie

Het hulpmiddel is geïndiceerd voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik wordt niet aanbevolen. Er kan kruisbesmetting optreden, wat in potentie kan leiden tot een lokale infectie.

Recyclen, wassen, ontsmetten en/of (her)steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw verpleegkundige voordat u een convex product gaat gebruiken, zodat u het product correct gebruikt.

Dit product is niet-steriel en dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij voortijdig geboren baby's en zeer jonge kinderen die couveusezorg krijgen, omdat het kan leiden tot verhoogde infectierisico's.

Informatie

Stomazakje voor eenmalig gebruik.

Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie staat, zoals serienummer, vervaldatum en een unieke streepjescode.

Het hulpmiddel hoeft niet verwijderd te worden voor een MRI-scan, aangezien het MRI-veilig is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.


Bijzondere bewaarcondities

Houd het uit direct zonlicht.


Bewaar de huidplak horizontaal.

Het product gebruiken


Vorbereiding

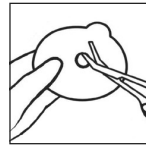

Knip met behulp van een kleine gebogen schaar en de kniplijnen op de huidplak een opening in de huidplak met dezelfde grootte en vorm als de stoma.
U kunt de grootte en vorm van de stoma met het bijgeleverde stomamalletje opmeten.
Een perfecte aansluiting tussen de opening en de stoma is belangrijk om het risico op lekkage en huidproblemen te verminderen.

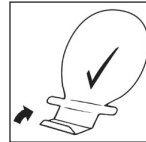

Plaats het zakje op een vlakke ondergrond met de koppeling naar beneden.
Sluit de sluiting door de onderkant van de sluiting drie keer op te vouwen totdat u de 'Velcro®' klittenbandstrook ziet.

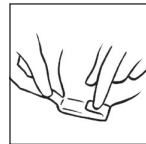

Vouw de twee lipjes naar binnen om het Velcro®-klittenband vast te maken.



De sluiting kan worden verborgen onder het non-woven materiaal.



Reinig de stoma en de omliggende huid grondig. De huid moet volledig droog zijn voordat u de huidplak aanbrengt.


Inbrengen



Trek de beschermfolie van de huidplak.



Breng de huidplak aan rond de stoma en oefen druk uit op de huidplak, zodat deze snel hecht en de huidplak perfect aansluit op de huid rond de stoma.
De huidplak moet precies rondom de stoma passen. Een goede afdichting rondom de stoma is belangrijk om lekken te voorkomen. Wanneer u de huidplak op de buik plaatst, begint u met het gebied rondom de stoma en drukt u de huidplak op de huid. Wrijf met uw vinger rondom de stoma, zodat de huidplak goed afdicht.
Druk de huidplak aan, waarbij u begint bij de stoma en vervolgens naar buiten beweegt, naar de randen toe. De huidplak moet overal contact maken met de huid.

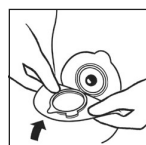

Zorg dat de koppeling op de huidplak schoon en droog is (gebruik bij het reinigen uitsluitend water).
Zorg ervoor dat de borging open is. Plaats de onderkant van de koppeling van het zakje tegen de onderkant van de koppeling van de huidplak.



Druk het zakje en de huidplak vanaf de onderkant aan. Gebruik hiervoor de middelste vingers.



Sluit de borgring door deze tussen wijsvinger en duim samen te drukken. Het zakje is stevig op de huidplak bevestigd als u een klik hoort.

Het zakje leegmaken



Open de sluiting en leeg het zakje in het toilet wanneer dat nodig is.




Reinig de sluiting met bijvoorbeeld toiletpapier. Vouw de sluiting weer op en maak hem weer vast nadat het zakje is geleegd.

Verwijderen



Om het zakje te verwijderen, open de vergrendelring door met een vingertop op het lipje te drukken.

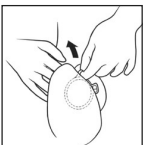

Houd het verwijderingslipje vast en verwijder het zakje door het voorzichtig van de huidplak weg te trekken.



Verwijder de huidplak voorzichtig door het verwijderingslipje aan de huidplak weg te trekken van de buik en de huidplak langzaam omlaag te rollen. Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggoaien

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden weggegooid, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Filtersticker



Plaats zo nodig één van de bijgesloten filterstickers op het filter om te voorkomen dat er gas ontsnapt.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (JJJJ-MM-DD)



Lotnummer



Fabricagedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Uniek productidentificatie



(Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Deze kant boven



Recyclebare verpakking



MRI-veilig