

Peristeen® Anal Plug

nl Anale plug en gel



Gebruiksaanwijzing

Lees de volgende instructies aandachtig door.

23342822 Version 2

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. © 2025-06-30

Beoogde doel

Het product is bedoeld als barrière tegen feces in de endeldarm.

Indicaties

Het product is geïndiceerd voor mensen die last hebben van fecale incontinentie.

Het product is bestemd voor zowel mannen als vrouwen en kinderen vanaf 3 jaar.

Contra-indicaties

De Peristeen anale plug mag niet worden gebruikt als u last hebt van:

- hemorrhoiden (3e en 4e graads)
- anale stenose

Waarschuwingen

Hergebruik van het product voor eenmalig gebruik wordt niet aanbevolen aangezien kruisbesmetting kan optreden, wat tot infectie kan leiden.

Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Let op

Dit product mag niet worden gebruikt zonder beoordeling door een zorgverlener.

Het product mag niet langer dan 12 uur gebruikt worden, omdat het gasje dan los kan raken van de plug.

Buiten bereik van kinderen houden. Als het product in de mond wordt gestopt, zet het uit en kan het tot verstikking leiden.

Informatie

Het product is een schuimplug voor eenmalig gebruik.

Het kan even duren voordat u aan het product gewend bent als u een normaal gevoel heeft in het rectale gebied. Dit is vaak niet het geval bij mensen met een verminderd of beperkt gevoel.

Sommige mensen die de anale plug regelmatig gebruiken, zullen merken dat de plug af en toe uit de endeldarm wordt geduwd. Als de anale plug om onverwachte redenen uit de endeldarm wordt gedrukt, leert de ervaring dat gebruikers na een korte periode zonder plug een nieuwe anale plug kunnen inbrengen.

Als u herhaaldelijk pijn ervaart bij het gebruik van de plug, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw zorgverlener.

Het product is verkrijgbaar in twee maten, klein en groot. Begin met de kleine plug. Als de kleine maat er onverwacht uit komt of als u last hebt van lekkage, probeer dan de grotere maat.

Verwijder de anale plug als u aandrang voelt om te ontlasten. Als u geen gevoel hebt in het endeldarmgebied en geen aandrang voelt om te ontlasten, wordt het aanbevolen om de plug regelmatig te vervangen.

Als u last heeft van diarree, kan de anale plug eruit komen.

Er kan onmiddellijk na het verwijderen van de oude anale plug een nieuwe worden ingebracht.

Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de anale plug, neem dan contact op met uw zorgverlener.

De gel bestaat uit:

- Water (> 50%)
- Glycerine (< 45%)
- Glycerylacrylaat/acrylzuurcopolymeer (< 2,1%)
- Propyleenglycol (< 1,1%)
- Methylparabeen (< 0,13%)
- Propylparabeen (< 0,04%)

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de huidige gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.


Hoe te gebruiken

Vorbereiden



Was uw handen en neem de plug uit de verpakking. Smeer een kleine hoeveelheid Peristeen anale plug-gel op de plug. Er mogen ook andere smeermiddelen worden gebruikt.

Inbrengen

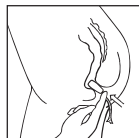


Ontspan uw spieren en duw de plug voorzichtig net voorbij de gespierde opening van de endeldarm (sluitspijeren), zodat de hele plug in de endeldarm wordt ingebracht. Laat het gas buiten uw lichaam hangen.



Wanneer de plug in de endeldarm wordt geplaatst, zal deze snel volledig uitzetten wanneer de folie oplost.

Verwijderen

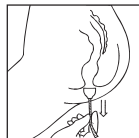

De plug wordt uit de endeldarm verwijderd door voorzichtig aan het gas te trekken.

Was uw handen nadat u het afval hebt weggegooid.

Weggooiën afval

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden weggegooid, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als resultaat van het gebruik, gelieve dit dan aan de fabrikant en aan uw nationale autoriteit te melden.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (JJJJ-MM-DD)



Lotnummer



Productiedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet voor hergebruik



Wijst op een drager die informatie over unieke productidentificatie bevat



Niet blootstellen aan zonlicht



Recycleerbare verpakking



MRI-veilig