

## Hoe te gebruiken

### Voorbereiding



1

**Beoogd doelkind**  
Het stoma-zakje is bedoeld om passief ontlastingruimte uit een stoma op te vangen. De huid rondom de stoma is normaal te verzorgen en te beschermen om te voorkomen dat het risico huidirritatie of wonden ontstaat.

**Indicatie**  
Het hulpmiddel is geadapted voor mensen met een stoma.

**Waarschuwingen**  
Gebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in.

Recyclen, wassen, ontvetten en/of afreageren kunnen de producteigenschappen veranderen, wat voor de gebruiker een mogelijk risico op lichamelijke schade of infectie inhoudt.

**Informatie**  
Bewaren op een koele, droge plaats.

Wanneer de houder van het hulpmiddel is afgebroken, is de inhoud te beschermen tegen vocht en licht. Het hulpmiddel moet worden beschermd tegen vocht en licht.

Het hulpmiddel dient niet te worden gebruikt voor een MRI-scan, aangezien het MRI-veilig is.

Colofon: Het hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik op het gezicht of andere gevoelige gebieden. Het gebruik van dit product op een andere wijze dan voor Coloplast in de gebruikershandleiding wordt niet aanbevolen.

**Bijzondere bewaarcondities**  
Het product horizontaal bewaren.

Beschermen tegen zonlicht.

**Melden van incidenten**  
Kopen: Indien het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident oplevert, wordt verzocht de gebruiker hiervan in kennis te stellen.

### Aanbrengen



3

Voor het aanbrengen van de hulpsticker, klap alle 5 schubben om.



4

Trek de beschermfolie van de hulpsticker.



5

Pak de hulpsticker vast met de schubben naar achteren en trek de beschermfolie van het middengedeelte van de hulpsticker voorzichtig van de stoma.  
Druk het middengedeelte voorzichtig op de huid.  
Klap vervolgens de schubben naar voren over het gebode gebied.



6

Druk de hulpsticker vast met het midden naar buiten stevig op de huid.



7

Gebruik uw wijsvinger om de zachte stabilisatie ring te verwijderen die uw stoma omringt. Oefen voorzichtig druk uit op de hulpsticker tussen de ring en uw stoma (of rechtstreeks op de hulpsticker) om te zorgen dat het middengedeelte van de hulpsticker goed contact op de huid.



8

Oefen druk uit vanuit het middengedeelte van de hulpsticker en trek de beschermfolie van de hulpsticker voorzichtig van de stoma. Het middengedeelte van de hulpsticker moet goed contact op de huid.

### Filtersticker



Innen is het mogelijk ontlasting van gas uit het zakje uit te voorschieten, dikens aan een van de bijgeleverde filterstickers over het filter om het te sluiten. Het voor langere periodes sluiten van het filter, zal het zakje opblazen; dus dit mag alleen voor een korte periode gebeuren.



**Instructies voor gebruik nu beschikbaar op video**  
Om de instructies te zien kunt u de QR-code scannen of gaat u naar <http://coloplast.nl/coverflp/video/gestolen>


## Verwijderen



Verwijder het zielepe voorziening door het verwijderen van de huidzak weg van de buik te trekken en de huidzak langzaam ontlaag te rollen.

Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

## Producteigenschappen

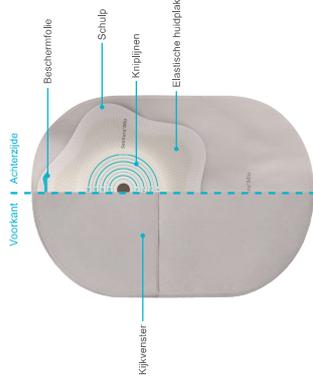

## Weggooiën afval

Het product is ontworpen bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd. Bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Speel het product niet door het balie.

## Omgaan met terugkerende problemen

### De huidzak plakt niet goed aan de huid

Volgt de gebruiksaanwijzingen in deze bijlatten nauwkeurig op en zorg dat uw huid volledig schoon en droog is voordat u de huidzak aanbrengt. Het is belangrijk dat er volledig contact is tussen de huidzak en de huid. Oefen zachte druk uit op de huidzak bij het aanbrengen om voor een goede hechting te zorgen.

### De huid is rood en/of geïrriteerd onder de huidzak

Geïrriteerde huid kan veel oorzaken hebben. Het kan worden veroorzaakt door het gebruik van een huidzak die niet bij uw lichaamsprofiel past of bijvoorbeeld het te groot is. Het kan ook het gevolg zijn van onvoldoende reiniging van de huid of te snel verwijderen van de huidzak. Bespreek het probleem zo snel mogelijk met uw stomaverzorger.

### Lekkage onder de huidzak

Lekkage kan meerdere oorzaken hebben. Het kan het gevolg zijn van een verandering in de vorm van het lichaam en/of de vorm, of het opjut aanbrengen van de huidzak. Om te zien of uw lichaamsprofiel is veranderd kunt u de oefen zelfbeoordelingskast doen op [www.coloplast-fibrocryl.com](http://www.coloplast-fibrocryl.com). Wanneer de vorm van uw lichaam is veranderd is mogelijk ander overwegingsmateriaal of een onderstaartproduct wenselijk. Bespreek de keuze zo snel mogelijk met uw stomaverzorger.

## Verklaring van de symbolen

<b>MID</b>	Medisch hulpmiddel	<b>UDI</b>	Niet opnieuw gebruiken
<b>CE</b>	Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese normgeving voor medische hulpmiddelen	<b>GTIN</b>	Unieke productidentificatie (Global Trade Item Number) Wordt vaak gebruikt voor nummer
<b>REF</b>	Referentienummer	<b>MR</b>	Niet blootstellen aan zonlicht
<b>LOT</b>	Vervaldatum (DD-MN-JJJ)	<b>↑↓</b>	Dit is kant boven
<b>MFL</b>	Lotnummer	<b>♻️</b>	Recycleerbare verpakking
<b>MA</b>	Fabricagedatum (DD-MN-JJJ)	<b>MR</b>	MR-veilig
<b>MA</b>	Fabrikant		
<b>MR</b>	Gebruiksaanwijzing raadplegen		

**CE** Medisch hulpmiddel conform de Europese normgeving voor medische hulpmiddelen

**Gebruiksaanwijzing**  
Zie de gebruiksaanwijzing voor het Coloplast-ops. Het Coloplast-ops is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden © 2020-12-19



## SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Flip

### Convex Flip stomazakje 1-delig gesloten zakje



## Gebruiksaanwijzing