

Beoogd doeleind
Het stomazakje is bedoeld om passief ontlastinglumen uit een stoma op te vangen. De huidplak is aan het stomazakje bevestigd en is bedoeld om te hechten aan de intacte huid rondom de stoma.

Indicatie
Het hulpmiddel is geadiseerd voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen
Het gebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in.

Recyden, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijke letsel of infectie inhoudt.

Informatie
Stomazakje voor eenmalig gebruik.

Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en op de stickers van de doos belangrijke informatie staat, zoals serienummer, vervaldatum en een unieke streepjescode.

Het hulpmiddel dient niet verwijderd te worden voor een MR scan, aangezien het MR veilig is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.


Bijzondere bewaarcondities
Het product horizontaal bewaren.

Beschermen tegen zonlicht.

Melden van incidenten
Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

Hoe te gebruiken

Vorbereiding


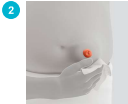


Knip met behulp van een kleine gebogen schaar en de knijplijnen op de huidplak een opening in de huidplak met dezelfde grootte en vorm als de stoma.
U kunt de grootte en vorm van de stoma met het bijgeleverde stomamatielje opmeten.
De vorm van uw stoma kan veranderen, dus wordt aanbevolen dat u deze meet wanneer deze op zijn grootst is. Dit is vaak wanneer u zit.

Een perfecte aansluiting tussen de opening en de stoma is belangrijk om het risico op lekkage en huidproblemen te verminderen.

Reinig de stoma en de omliggende huid grondig. De huid moet volledig droog zijn voordat de huidplak wordt aangebracht.

Aanbrengen

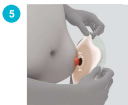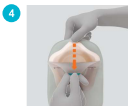

Voor het aanbrengen van de huidplak, knip alle 5 schuilen om.

Trek de beschermfolie van de huidplak.


Pak de huidplak vast met de schuilen naar achteren gevouwen. Positioneer het middengedeelte van de huidplak rondom de stoma.
Druk het middengedeelte voorzichtig op de huid.
Klap vervolgens de schuilen naar beneden over het gebolde gebied.



Druk de huidplak vanuit het midden naar buiten stevig op de huid.



Gebruik uw wijsvinger om de zachte stabilisatorring te vinden die uw stoma omringt. Oefen voorzichtig druk uit op de huidplak tussen de ring en uw stoma (of rechtstreeks op de stabilisatorring) om te zorgen dat het middengedeelte van de huidplak goed aansluit op de huid.

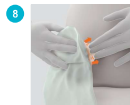

Oefen druk uit vanuit het middengedeelte van de huidplak en naar buiten toe in meerdere richtingen om de aanhechting tussen de huidplak en de huid rond de stoma te bevorderen.

Filtersticker




Indien u het tijdelijk ontsnappen van gas uit het zakje wilt voorkomen, plaats dan een van de bijgedoten filterstickers over het filter om het te sluiten. Het voor langere periodes sluiten van het filter, zal het zakje opblazen; dus dit mag alleen voor een korte periode gebeuren.



Instructies voor gebruik nu beschikbaar op video

Om de instructievideo te zien kunt u de QR-code scannen of gaat u naar <http://coloplast.nl/convexlip/video/gedaten>

Producteigenschappen

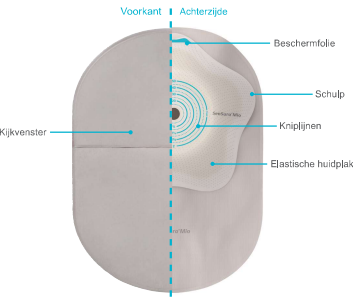

Verwijderen



Verwijder het zakje voorzichtig door het verwijderingsstijpje aan de huidplak weg van de buik te trekken en de huidplak langzaam ontlsg te rollen.
Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggooien afval

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.
Spoel het product niet door het toilet.

Omgaan met terugkerende problemen

- De huidplak plakt niet goed aan de huid**
Volg de gebruiksaanwijzingen in deze bijzaker nauwkeurig op en zorg dat uw huid volledig schoon en droog is voordat u de huidplak aanbrengt. Het is belangrijk dat er volledig contact is tussen de huidplak en de huid. Oefen zachte druk uit op de huidplak bij het aanbrengen om voor een goede hechting te zorgen.
- De huid is rood en/of geïrriteerd onder de huidplak**
Geïrriteerde huid kan veel oorzaken hebben. Het kan worden veroorzaakt door het gebruiken van een huidplak die niet bij uw lichaamsprofiel past of bijvoorbeeld het te groot/klein knippen van de opening. Het kan ook het gevolg zijn van onvoldoende reiniging van de huid of te snel verwijderen van de huidplak. Bespreek het probleem zo snel mogelijk met uw stomaverpleegkundige.
- Lekkage onder de huidplak**
Lekkage kan meerdere oorzaken hebben. Het kan het gevolg zijn van een verandering in de vorm van het lichaam en/of de stoma, of het onjuist aanbrengen van de huidplak. Om te zien of uw lichaamsprofiel is veranderd kunt u de online zelfbeoordelingstest doen op www.coloplast.nl/bodycheck. Wanneer de vorm van uw lichaam is veranderd is mogelijk ander opvangmateriaal of een ondersteund product wenselijk. Bespreek lekkage zo snel mogelijk met uw stomaverpleegkundige.

Verklaring van de symbolen

- MD** Medisch hulpmiddel
- CE** Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen
- REF** Referentienummer
- LOT** Lotnummer
- WT** Vervaldatum (DD-MM-JJJJ)
- Fab** Fabricagedatum (DD-MM-JJJJ)
- Fab** Fabrikant
- i** Gebruiksaanwijzing raadplegen
- Niet opnieuw gebruiken**
- UDI** Unieke productidentificatie
- GTIN** (Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer
- Niet blootstellen aan zonlicht**
- Deze kant boven**
- Recyclebare verpakking**
- MR** MRI-veilig

Gebruiksaanwijzing
23325237 Versie 1
Het Coloplast-Logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. © 2020-12-16



SenSura® Mio Convex Flip

Convex Flip stomazakje
1-delig gesloten zakje



Gebruiksaanwijzing