

### Nacht-urinstomazak



#### Gebruiksaanwijzing

23323917 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.  
Alle rechten voorbehouden. © 2020-07-03

#### Beoogde doel

De nacht-urinstomazak is bedoeld om passief urine op te vangen.

#### Productbeschrijving

De nacht-urinstomazak is geïndiceerd voor mensen die lijden aan urine-incontinentie en/of retentie met welke oorzaak dan ook.

#### Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik wordt afgeraden, kruisbesmetting kan optreden.

Herverwerking, wassen, desinfecteren en/of steriliseren kan een nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor meer risico ontstaat op letsel of infectie voor de gebruiker.

#### Informatie

De zak is niet steriel en is ontworpen voor eenmalig gebruik.

Het product heeft een capaciteit van 2000 ml.

De nacht-urinstomazak kan worden gebruikt met alle Coloplast urinstomazakken.


De geïntegreerde connector van de nachtzak kan veilig worden bevestigd aan de opening van de Coloplast-urinstomazak.

De afgedrukte volume-indicator is slechts een indicatieve volumetrische meetschaal.


Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie zoals serienummer, vervaldatum en een unieke streepjescode staat.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als dit product niet op de door Coloplast aanbevolen manier wordt gebruikt.


#### Vorbereitung

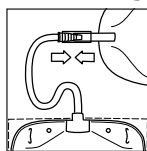


Voor aankoppeling gedurende de gehele nacht moet de nacht-urinstomazak worden uitgerust met de flexibele openingsslang die in de doos zit.

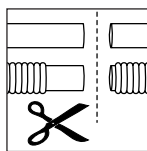


Houd bij het knippen van de geribbelde slang zo veel mogelijk van het rechte deel over. Bij het aanbrengen van de connector zorgt dit voor een stevige aansluiting tussen de slang en de connector.

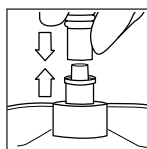

Bevestig de slang aan de zak door het afgesneden uiteinde van de slang stevig op de connector van de zak te duwen.

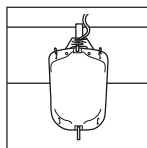


U kunt een Conveen-zakhanger of standaard gebruiken om de bedopvangzak aan op te hangen.

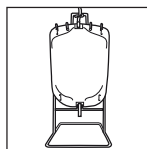

Bevestig de zak stevig aan de hanger of standaard door de tanden van de hanger of standaard in de sleuven aan de bovenzijde van de zak te doen. Haak de zakhanger aan de bedrand of zet de standaard op de grond naast het bed.

Om optimale drainage te verzekeren, is het belangrijk dat de nachtzak zich lager dan uzelf bevindt wanneer u in bed ligt.

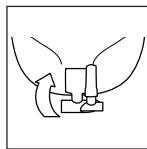


Zorg dat het aftapkraantje gesloten is.

De klep wijst naar boven als deze gesloten is.

Uw urinstoma voor de nacht is nu klaar om te worden gekoppeld aan uw nachturinstomazak.


Hygiënisch 2-staps kraantje

#### Aanbrengen

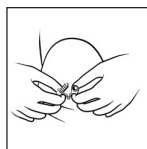


Houd de plug/einde van de opening naar boven gericht op uw urinstoma en knijp in het uiteinde van de opening, trek de plug er uit en houd de opening vast.

U kunt uw urinstomazak legen voordat u het bevestigt aan uw nachturinstomazak.

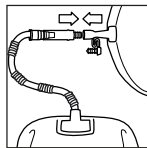

Irrigatieslang met voorgemonteerde connector

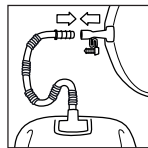


Verkorte slang met voorgemonteerde connectoren

Bevestig de nacht-urinstomazak aan de opening van de urinstoma.

Het urine-opvangsysteem functioneert nu.

## Legen

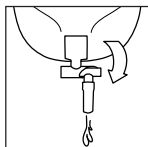

Open en sluit het zakje in 2 stappen.


- 1) Druk de klep naar beneden
- 2) Druk op de zijkant voor leging

We raden aan de zak te legen als het iets meer dan half vol is, om te zorgen voor optimale leging.

## Verwijderen

Als de nacht-urinstomazak aan de urinstomazak gekoppeld is, sluit u het sluitingskraantje van de urinstomazak. Ontkoppel vervolgens de nachtzak. Vermijd aanraking van het open uiteinde van de opening van de urine-opvangzak.

## Weggoaien

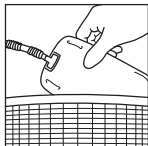

Vervang de nachtzak volgens plaatselijke richtlijnen en aanbevelingen.

Maak de zak leeg alvorens het weg te gooien.

De zak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met het normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.

## Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale instantie.

## Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Catalogusnummer



Te gebruiken tot (DD-MM-JJJJ)



Lotnummer



Productiedatum (DD-MM-JJJJ)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet voor hergebruik



Geeft een streepjescode aan die een unieke hulpmiddelidentificatie bevat



(Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer



Uit de buurt van zonlicht houden



Recyclebare verpakking