

# eakin® pouches: platte en zachte bolstomazakjes

## OVER DIT PRODUCT

**eakin®** zakjes worden gebruikt om uitgaand materiaal van een stoma te verzamelen. De basisplaat die aan het zakje is bevestigd, is bedoeld om het aan de peristomale huid te worden bevestigd.

Individuele draagtijden kunnen verschillen.

**eakin®** zachte bolzakjes kunnen alleen na beoordeling door een zorgspecialist geschikt zijn voor teruggetrokken, gespoelde of andere uitdagende stoma's.

**eakin®** vooraf geknipte zakjes kunnen geschikt zijn voor stoma's met een onregelmatige vorm en afmetingen. **eakin®** cut-to-fit zakjes maken een aangepaste pasvorm mogelijk.

Wie extra veiligheid nodig heeft, kan gebruik maken van een stomariem. (Productbeschikbaarheid kan variëren in uw land).

## WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Raadpleeg een zorgprofessional als u huidirritatie, roodheid of ongemak ervaart voorafgaand aan productgebruik. Raadpleeg een zorgprofessional en staak het productgebruik indien u na aanbrengen huidirritatie, roodheid of ongemak ervaart. Niet aanbrengen op kapotte huid of open wonden.

Alleen voor eenmalig gebruik. Hergebruik van een wegwerpproduct kan schade toebrengen aan de gebruiker door het risico van vervuiling en verstoring van de productfunctie.

De hechting aan de huid en de draagtijd kan verminderen in omstandigheden met een verhoogde temperatuur of vochtigheid of als de basisplaat wordt verplaatst na de eerste toepassing.

## ANDERE INFORMATIE

Bewaren tussen 10 en 30 graden Celsius. Rechtopstaand in het karton bewaren. Niet koelen.

**eakin®** aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verwondingen of ander verlies door mogelijk gebruik van dit product dat in tegenstelling is met de aanbevelingen van **eakin®**.

Ernstige ongevallen als gevolg van het gebruik van deze toepassing moeten gemeld worden aan de producten en de bevoegde instantie in het land van gebruik. Een ernstig ongeval is een ongeval dat de dood of een ernstige achteruitgang van de gezondheid van de patiënt tot gevolg heeft.

# Gebruiksaanwijzingen

## 1. VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het huid schoon en droog is voor de toepassing (1.a).

Gebruik de bijgesloten stoma-afmetingmeetgids om de afmetingen en de vorm van de stoma te meten (1.b). Het is van belang om een exacte pasvorm tussen de opening van de basisplaat en de stoma te garanderen om het risico op lekken en huidproblemen te reduceren.

Als uw stoma geen exacte cirkel of ovaal is zoals weergegeven op de stoma-afmetingmeetgids, moet u de instructies van de bijgesloten stoma-afmetingmeetgids volgen om de afmetingen van uw stoma en zakje te bepalen.

Gebruik de snijgids op de basisplaat, knip met een kartelschaar een opening die past op de exacte, vooraf gemeten afmeting en vorm van de stoma. Zorg ervoor dat u niet door de zakfilm aan de andere kant (1.c) knipt.

Voor vooraf geknipte zakjes selecteert u de variant die past bij de afmetingen van de stoma.



## 2. TOEPASSING

Haal de beschermingsfilm van de basisplaat (2.a).

Lijn de centrale opening van de basisplaat rond de stoma uit.

Druk de basisplaat onderaan zachtjes tegen uw huid, werk verder naar boven en naar buiten om te garanderen dat de volledige basisplaat goed aan de huid is bevestigd. (2.b).

(Filterdeksel zijn bijgesloten, deze kunnen worden gebruikt bij het baden of om "verkleven" te voorkomen. Breng het deksel aan door het gesplitste weefsel op te tillen en het deksel over de filter te plaatsen. Deze is herkenbaar als een donkere cirkel).

