


## **Gebbruksinstructies SAFEBAG™** Bedpan and Commode Liner



# Gebruiksaanwijzing SAFEBAG™

## Bedpan and Commode Liner

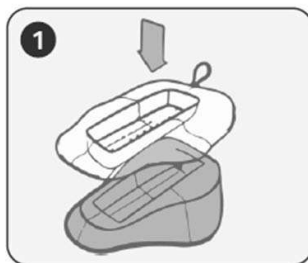

### Plaats

- Pak de SAFEBAG zakken en scheur één zak van de rol.
- Open SAFEBAG en plaats de zak volledig om de Suupport of in de postool (afhankelijk van de toepassing).
- Zorg ervoor dat de absorptie pad recht ligt. Hiermee zorg je voor een zo efficiënt mogelijke opname van het vocht.



### Plaats en positioneer

- Plaats gebruiker op postool of support SAFEBAG is klaar voor gebruik.



### Verwijder

- Na gebruik, én nadat de vloeistof is vast geworden, kan SAFEBAG voorzichtig verwijderd worden.
- Trek aan het koord om SAFEBAG met inhoud af te sluiten.



### Voer af

- Voer SAFEBAG af naar de dichtstbijzijnde afvaltrolley.

