



Protocol

Braakzak PRO gerecycled 7733190

CareBag
Sacs absorbants

Zie procedures en technical datasheet

Definitie	De CareBag® braakzak PRO gerecycled is een disposable braakzak voorzien van een geïntegreerde ring en met een super absorberend poeder (SAP) zakje (500 ml) voor 100 % gemaakt van gerecycled plastic. Het maakt de opvang, het transport en het afvoeren van braaksel veilig en hygiënisch.
Informatie Wanneer gebruikt u deze braakzak PRO gerecycled?	Voor patiënten die misselijk zijn en moeten overgeven, met name voor de volgende doelgroepen: - Patiënten die moeten braken zonder voorzieningen: bv ambulance, SEH, onderweg, thuis etc. - Patiënten met een BRMO: bv MRSA, ESBL. - Patiënten met CPE, Clostridium difficile infecties, Gastro-enteritis. - Patiënten met het Noro of Corona virus. - Patiënten die chemotherapie of radioactieve therapie ondergaan. - Mensen met bijvoorbeeld buikgriep.
Hoe te gebruiken	<ol style="list-style-type: none">1. Open de zak en neem er een braakzak uit.2. Open de braakzak door deze uit te trekken. Plaats de ring voor de mond.3. Braak in de zak. Lees, indien gewenst, op de zijkant van de zak de hoeveelheid braaksel af.4. Het oplosbare zakje absorbeert het braaksel en zet deze om in gel en maskeert de geur. Wacht tot de inhoud volledig is omgezet in gel.5. Sluit te zak door deze te draaien.6. Plaats het smalle gedraaide deel in één van de inkepingen van de ring. Gooi de zak weg bij het restafval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling of het ziekenhuis.
Voorzorgsmaatregelen	Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag bij voorkeur een halterschort en bij een verdenking van een infectie een halterschort/jasschort, mondneusmasker (conform de richtlijnen behorend bij de infectie).

Gebruiksaanwijzing

1



Open de braakzak

2



Braak in de zak

3



Sluit de zak als de vloeistof is omgezet in gel en gooi de zak weg bij het restafval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling of ziekenhuis
NIET DOOR HET TOILET SPOELEN

4



Desinfecteer de handen

Cleanis
CREATEUR ONTDEKEN

22, Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil Cedex
Frankrijk



Exclusief gedistribueerd door:

OmniMedical
Weverstraat 28 | 4061 AP Ophemert
Tel.: 0344 651 444
info@omnimedical.nl | www.omnimedical.nl

OmniMedical
the WISH company