



Protocol


Braakzak – 7733987/VOM

CareBag
Sacs absorbants

Zie procedures en technical datasheet

Definitie	De CareBag® braakzak is een disposable zak met (geur)absorberende inlegger (450 ml). Het maakt de opvang, het transport en het afvoeren van braaksel veilig en hygiënisch.
Informatie Wanneer gebruikt u deze braakzak – VOM?	Voor patiënten die misselijk zijn en moeten overgeven, met name voor de volgende doelgroepen: - Patiënten die niet in staat zijn naar het toilet te gaan: bv thuis, ambulance, SEH etc. - Patiënten met een BRMO: bv MRSA, ESBL. - Patiënten met CPE, Clostridium difficile infecties, Gastro-enteritis. - Patiënten met het Noro of Corona virus. - Patiënten die chemotherapie of radioactieve therapie ondergaan. - Bij personen met bijvoorbeeld buikgriep. ➤ Bij impulsief braken kan een waskom of emmer voorzien van de CB1 bedpanliner of CB2 commodeliner ook uitkomst bieden.
Hoe te gebruiken	1. Open de doos en neem er een zak uit. 2. Open de zak en houdt deze met beide handen open, plaats hem over neus en mond. 3. Braak in de zak. 4. Wacht enige tijd tot de inlegger in gel is veranderd. 5. Sluit te zak door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht, zowel bovenop als om de hals (dubbele knoop indien mogelijk). 6. Gooi de zak weg bij het restafval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling.
Voorzorgsmaatregelen	Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag bij voorkeur een halterschort en bij een verdenking van een infectie een halterschort/jasschort, mondneusmasker (conform de richtlijnen behorend bij de infectie).

Gebruiksaanwijzing

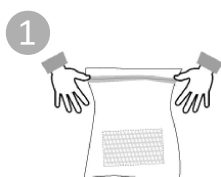


Houd de zak met beide handen open. Plaats over neus en mond.



Braak in de zak.



Sluit de zak als de vloeistof is omgezet in gel en gooi de zak weg bij het restafval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling.
NIET DOOR HET TOILET SPOELEN

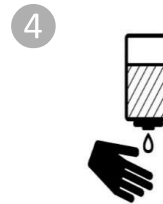

Desinfecteer de handen conform de richtlijn.

CleanS
CREATOR ONYGENE
22, Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil Cedex
Frankrijk



Exclusief gedistribueerd door:
OmniMedical
Weverstraat 28 | 4061 AP Ophemert
Tel.: 0344 651 444
info@omnimedical.nl | www.omnimedical.nl

OmniMedical
the WISH company