

System assembled by 3M Company
 3M Deutschland GmbH
 Health Care Business



www.littmann.com



Made in USA with Globally Sourced Materials 3M Company 2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144 USA	3M Deutschland GmbH Health Care Business Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss, Germany	Made in Malaysia Eko Devices, Inc. 1212 Broadway, Suite 100 Oakland, CA 94612 USA	Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

©2022 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.
 3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.
 Unauthorized use prohibited.
 Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2022-03
 34-8728-3019-4



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software



3M™ Littmann® CORE digitale stethoscoop

Snelstartgids

Laad de Littmann CORE-stethoscoop voorafgaand aan het eerste gebruik op. Nadat de stethoscoop is opgeladen, is deze klaar voor gebruik.

Download de Eko-app (indien beschikbaar) in de Apple App Store® of de Google Play Store® om extra functies van de Littmann CORE-stethoscoop te gebruiken, waaronder draadloos luisteren, geavanceerde regeling voor geluid en filteren, automatische detectie van hartaandoeningen (indien beschikbaar, hiervoor is mogelijk een extra abonnement vereist) en het opslaan en delen van opnames.




Scan met uw telefooncamera om de Eko-app te downloaden.

Inhoud doos

- Eko CORE digitaal opzetstuk en 3M™ Littmann® Cardiology IV™-stethoscoop
- Extra set met 3M Littmann Klikvaste oordopjes met zachte afdichting (klein)
- Antikoude kelkmof
- USB-oplaadkabel
- Snelstartgids

Oordopjes

Houd de oordopjes naar voren gericht als u deze in doet.

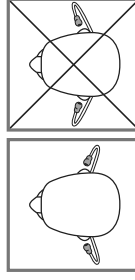

Volume

Pas het volume met de knoppen (+) en (-) aan. Er zijn 7 volumestappen.

In- en uitschakelen

Als de CORE uitgeschakeld is, werkt deze als een stethoscoop zonder versterking.

Druk op de aan/uit-knop om de CORE in te schakelen. Het licht begint te knipperen. U hoort nu versterkte en gefilterde geluiden door de oordopjes.

Telemedische en AI-functies

Eko biedt telemedische en AI-functies waarvoor een softwareabonnement vereist is (apart verkocht indien leverbaar).

U kunt zich hiervoor online via ekohealth.com aanmelden

Actieve ruisonderdrukking

De CORE-stethoscoop bevat actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluiden te onderdrukken. Actieve ruisonderdrukking kan via de Eko-App worden uit- of ingeschakeld.


Meldingen



CORE-stethoscoop is ingeschakeld en het apparaat aan het zoeken



CORE-stethoscoop is uitgeschakeld en aan het opladen

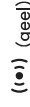

De batterij van de CORE-stethoscoop is bijna leeg




CORE-stethoscoop is volledig ingeschakeld en verbonden



CORE-stethoscoop is aan het opnemen

Opnemen

Klik op de knop (o) om de opname te starten als de CORE met de Eko-App verbonden is.

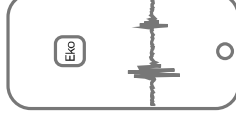

Opladen

Sluit de micro-USB-kabel op de CORE-stethoscoop aan en maak gebruik van een UL-gecertificeerde of CE-gemarkeerde 5 V USB-wandlader. Het duurt ongeveer 2 uur totdat de CORE-stethoscoop volledig opgeladen is. Het lampje wordt groen als de CORE-stethoscoop volledig opgeladen is.

Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding door alvorens uw Littmann CORE-stethoscoop te gebruiken. Om de handleiding te bekijken, gaat u naar: ekohealth.com/getstarted

Ga naar HCBGRegulatory.3M.com voor meer informatie over 3M-hulpmiddelen.

Onderhoud en ondersteuning

Als u zich in de VS bevindt, gaat u naar littmann.com/service of neemt u contact op op 1-800-228-3957. Als u zich buiten de VS bevindt, gaat u naar littmann.com voor de contactgegevens van uw lokale 3M-vestiging.

Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG
LBL 143 Rev B