


VERKORTE HANDLEIDING MEDA MD6000P Bladderscanner

- **LET OP: doe allereerst het koordje om de pols!**

1. Opstarten en afsluiten

Druk 1 à 2 seconden op de aan/uitknop aan de onderkant van het apparaat om het apparaat te starten.

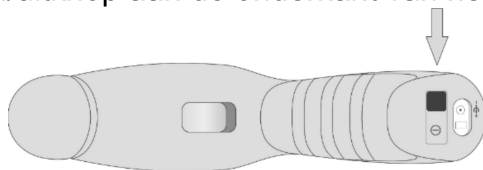


2. Scanvoorbereiding`

Laat de patiënt op de rug liggen en maak de huid van de onderbuik schoon met ontsmettingsalcohol. Smeer de gel 2,5 cm boven het schaambeen. Plaats de probe op de onderbuik plm. 2 cm boven het schaambeen

3. Patiëntconfiguratie


Klik op de linker toets, vervolgens op de rechter toets om Male, Female of Pediatrics te selecteren

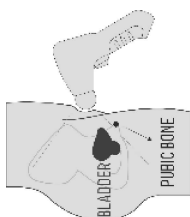

4. Pre-scan positioneringsmodus

Druk op de knop "SCAN" (blauwe schakelaar onder de MD6000P) om het apparaat in de pre-scan positioneringsmodus te zetten. Volg de pijltjes op het onderste gedeelte van het LCD-scherm om het apparaat op de goede plek te plaatsen.

De blaas wordt het nauwkeurigst gepositioneerd wanneer het midden van de cirkelvormige projectie zich dicht bij de centrale lijn bevindt. Een 👍 geeft aan dat je goed zit.

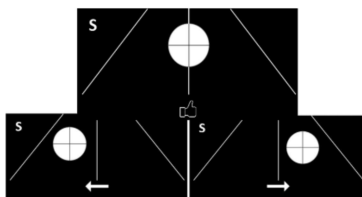

5. Blaasvolumemeting

Laat de knop "SCAN" los en houd het apparaat 3-5 seconden stil, totdat deze stopt met scannen, je voelt geen trilling meer en je ziet het gemeten blaasvolume in de display.



Houd de aan/uitknop 3 ~ 4 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen