

Gebruikershandleiding – Nederlands



Jamy 3

REF

20000130



200kg

MD
CE UK
CA

Inhoudsopgave

Over deze handleiding	3
1 Beoogd gebruik, gebruiker en omgeving	4
2 Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen	5
3 Jamy 3 Overzicht.....	7
4 De Jamy 3 gebruiken	14
5 Onderhoud en service	18
6 Probleemoplossing en reparatie.....	21
7 Technische gegevens	22
8 Onderdelenlijst	24
9 Opslag- en transportomstandigheden	27
10 Levensduur van het product.....	27
11 Garantie	27
12 Symbolen en tekens.....	28
13 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).....	29
14 Een incident melden.....	30
Over United Care.....	31

Over deze handleiding

We hopen dat dit product aan uw verwachtingen voldoet of deze overtreft.

Deze handleiding is bedoeld om gebruikers bekend te maken met de Jamy 3. De handleiding geeft informatie over wat de Jamy 3 is en hoe deze gebruikt moet worden. Er wordt ook technische informatie beschreven over de onderdelen, het onderhoud en de service van het product. Voor nieuwe gebruikers is het verplicht om deze handleiding te lezen en te begrijpen voor gebruik. Gebruikers die vertrouwd zijn met de lift kunnen secties overslaan, maar het wordt aanbevolen om te weten wat er in de handleiding staat.

Deze handleiding is van toepassing op de volgende producten:

Product	Artikelnummer
Jamy 3	20000130

1 Beoogd gebruik, gebruiker en omgeving

De Jamy 3 is een Actieve mobiele tillift voor gebruik binnenshuis die, samen met goedgekeurde accessoires, helpt om bewust zijnde patiënten/zorgvragers met een verminderde spierfunctie van zittende naar staande positie of omgekeerd te brengen, en om hen in staande positie over korte afstanden van en naar bijvoorbeeld een (rol)stoel of bed te verplaatsen. De apparaten ontlasten zorgverleners ook van fysiek belastende taken, waardoor het risico op werkgerelateerd letsel afneemt.

De Jamy 3 wordt gebruikt door/voor:

- **Patiënt/zorgvrager:** bewuste personen met verminderde spierfunctie die onder de zorg van een verzorger vallen en een gewicht van minimaal >25 kg en een lichaamslengte van >150 cm hebben. (>130 cm bij gebruik van het voetverhogingsaccessoire.) De persoon is in staat om zichzelf in zittende positie te helpen en deze positie zelfstandig of met behulp van een soort steun, zoals een leuning of handgreep, vast te houden. Enige mate van kracht voor het bovenlichaam of de armen is vereist
- **Zorgverleners met een medische opleiding:** zorgverleners met een medische opleiding op verschillende niveaus, die de lift bedienen en een patiënt/zorgvrager met een lichamelijke beperking helpen met een transfer of mobiliteitstraining. Hebben kennis van de beoogde medische indicatie en hoe een patiënt/zorgvrager te benaderen. Kunnen lezen en interpreteren de gebruiksaanwijzing.
- **Zorgverleners zonder medische opleiding:** leken zonder medische opleiding die de lift bedienen en een patiënt/zorgvrager met een lichamelijke beperking bijstaan na een producttraining. Geletterd zijn en de gebruiksaanwijzing kunnen lezen en interpreteren, training hebben gekregen van United Care of DHG gecertificeerde trainers.
- **Servicepersoneel:** technisch onderlegd personeel bij professionele zorginstellingen of dat zorgverleners in de thuiszorgomgeving helpt bij het repareren van de lift. Servicepersoneel heeft training gekregen van United Care / DHG of United Care / DHG gecertificeerde trainers over hoe de lift gerepareerd moet worden.
- **United care / DHG Servicetechnici:** technisch onderlegd United care / DHG-personeel met expertise in het repareren en onderhouden van de lift.

Jamy 3 is bedoeld voor gebruik in:

- **Huishoudelijke Gezondheidszorg-omgeving,** beperkt tot huishoudelijke binnenruimten, met uitzondering van badkamers, sauna's, zwembaden en andere ruimten met hoge temperaturen/vochtigheid. De bedrijfsomstandigheden zijn +5°C tot +40°C, RH van 15%-90% atmosferische druk van 70kPa - 106kPa.
- **Professionele omgeving van gezondheidszorgfaciliteiten** omvat langdurige zorg (woonzorg-, revalidatie- en geriatrische faciliteiten), klinieken, faciliteiten voor beperkte zorg, ziekenhuizen (kamers voor patiënten/zorgvragers, spoedeisende hulp, intensive care, operatiekamers behalve in de buurt van hoogfrequente chirurgische apparatuur)

2 Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

Het niet naleven van de volgende aandachtspunten en de verdere beschrijvingen in deze gebruikershandleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties. Onjuist en onzorgvuldig gebruik kan schade aan de Jamy 3 veroorzaken, en dus ook tot gevaarlijke situaties leiden. Stel de stoel in dergelijke situaties buiten gebruik en neem contact op met de leverancier.

Contra-indicaties

- De lift mag niet worden gebruikt voor patiënten/zorgvragers boven het maximale gewicht dat op het label van de lift, de tilband en in deze gebruikershandleiding staat aangegeven.
- Het is niet toegestaan om iets anders (bijvoorbeeld een stoel of rolstoel) samen met de zorgontvanger op te tillen.
- De lift is ontworpen om zorgontvangers op te tillen en te verplaatsen in combinatie met een geschikte tilband en mag als zodanig alleen voor dit doel worden gebruikt. Elk ander gebruiksdoel is niet toegestaan.
- De lift mag niet gebruikt worden op hellende oppervlakken met een hoek van meer dan 5 graden.


Voorzorgsmaatregelen

- Behandel de lift met zorg en zorg voor een schone, opgeruimde werkomgeving.
- Controleer de toestand en functies van de lift regelmatig zoals aangegeven in deze handleiding.
- Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door getrainde personen. De levensduur van de lift kan worden verkort door onjuist onderhoud.
- Het vervangen van spreidstangen of andere constructiedelen van de lift is alleen toegestaan door getrainde personen.
- Bediening van de lift is alleen toegestaan door getrainde personen.
- Het opladen van de batterij moet altijd in een goed geventileerde, droge ruimte gebeuren.
- Laders moeten worden aangesloten volgens de installatiehandleiding en moeten minstens één keer per jaar periodiek worden gecontroleerd.
- Controleer bij het verplaatsen van de lift altijd of de ruimte waar de transfer plaatsvindt vrij is van obstakels. Controleer ook onder bedden en/of (rol)stoelen waar de poten van de lift moeten komen te staan. De lift mag niet vastlopen of vast blijven zitten.
- De lift moet minstens één keer per jaar periodiek worden geïnspecteerd.
- Meld defecten aan de lift altijd aan de leverancier.
- Controleer bij het optillen altijd of er voldoende ruimte boven de lift is.
- Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats voor de gebruikers van de lift.

Waarschuwingen


- Laat de patiënt/zorgvrager nooit zonder toezicht achter tijdens een transfersituatie.

- Gebruik de lift alleen met goedgekeurde accessoires. (Neem altijd contact op met United Care als u een ander type tilband wilt gebruiken).
- Het bevestigen van de clips van een tilband moet zorgvuldig gebeuren. Een onjuiste bevestiging van een clip kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Gebruik voor service en reparatie uitsluitend originele onderdelen die door United Care zijn geleverd.
- Gebruik de lift niet als het defect is. Als er een rode sticker met "afkeur" op de lift zit, mag de lift ook niet gebruikt worden.
- Als er vervormingen aan de lift zijn ontstaan door verkeerd gebruik of transport, mag de lift niet meer gebruikt worden.
- Gebruik geen van de accessoires als de toestand ervan onvoldoende is.
- De lift mag niet in een vochtige of natte omgeving achtergelaten of bewaard worden.
- De lift mag niet met stoom gereinigd worden.
- De lift mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Belast de lift nooit zwaarder dan de aangegeven maximale capaciteit. Als de lift, accessoire en de tilband verschillende maximumgewichten hebben, moet de laagste capaciteit in aanmerking worden genomen.
- De hefmotor is uitsluitend bedoeld om de hefarm omhoog en omlaag te brengen, zodat de patiënt/zorgvrager kan staan en zitten. Hij mag nooit als steun of handvat worden gebruikt. (rode pijl)
- Houd handen, benen en voeten altijd uit de buurt van de bewegende en inklapbare delen. De Jamy 3 is veilig te bedienen op plekken aangegeven met de blauwe pijlen.
- De lift is veilig voor patiënten/zorgvragers om op te staan en zich vast te grijpen aan onderdelen die worden aangegeven door de groene pijlen die op de volgende pagina te zien zijn. Deze onderdelen worden ook beschouwd als toegepaste onderdelen.

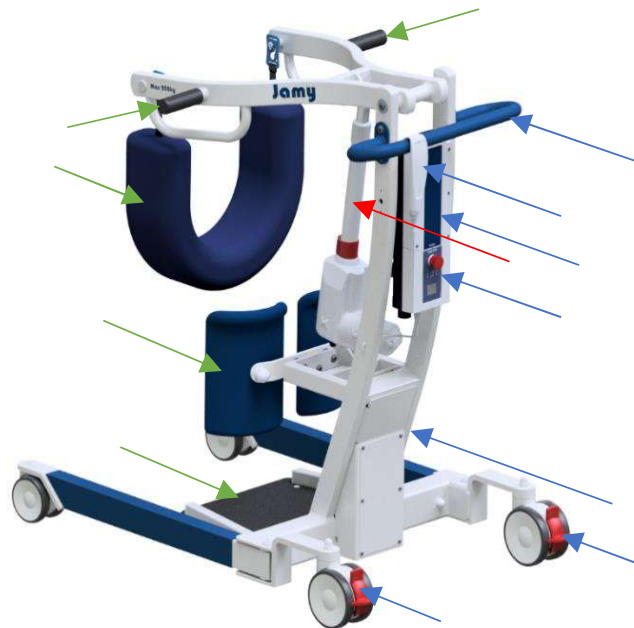

3 Jamy 3 Overzicht

De volgende onderdelen worden in de volgende paragrafen uitgebreider beschreven.

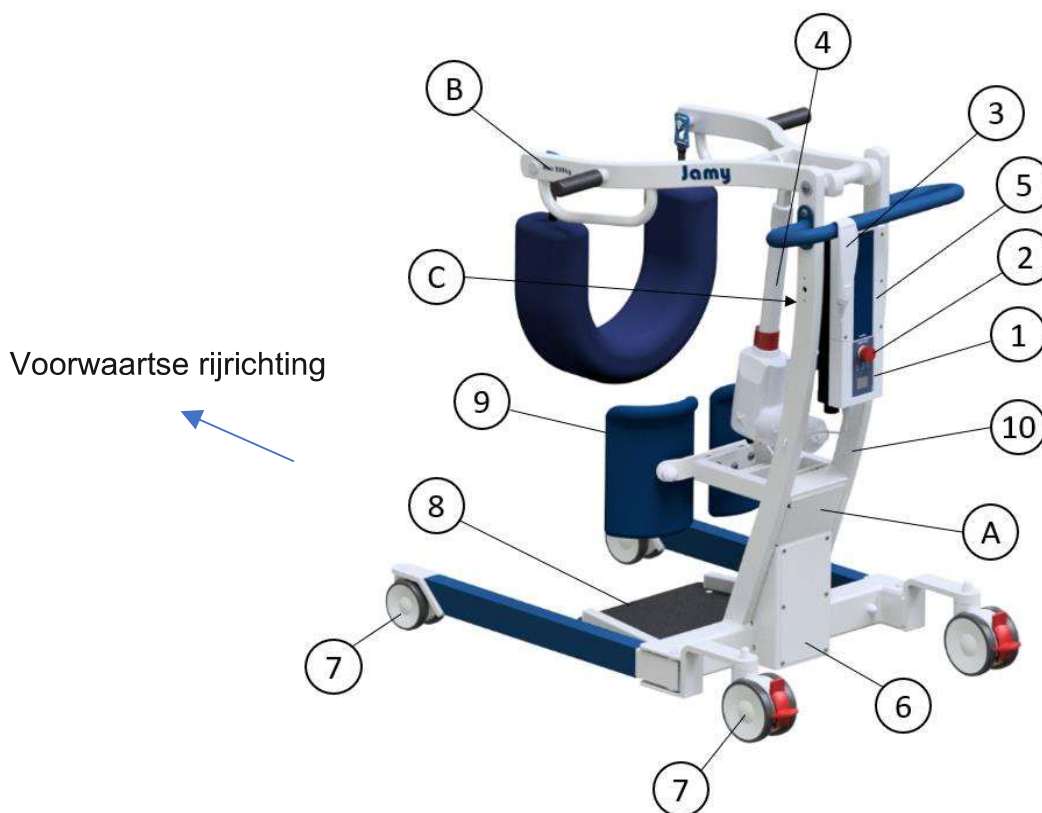

Nr.	Deel	Hoofdstuk
1	Controlebox	3.1
2	Noodknop	3.1.1
3	Handbediening	3.2
4	Hefmotor	3.3
5	Batterij	3.4
6	Potenspreider	3.5
7	Wielen (4x)	3.6
8	Voetensteun	3.7
9	Kniesteun	3.8
10	Frame	3.9

A	Label met serienummer
B	Sticker voor maximaal gewicht
C	Service controlesticker

Hoe het UDI-nummer (serienummerlabel) te lezen

(01) 87206181431742 (11) 230119 (21) 2202167

(01) Identificatienummer, GTIN

(11) Productiedatum, JJMMDD

(21) Serienummer: de eerste 2 cijfers zijn het jaar, de laatste 5 cijfers zijn het traceernummer

Jamy 3

Max Load
200 kg


Tot. Weight
262 kg

(01) 8 7206181 43174 2 (11) 230119 (21) 2202167

REF 20000130
 Rev. A
SN 2202167

3.1 Controlebox

De hef- en potenspreidmotor worden aangestuurd door controlebox dat zich onder de duwstang bevindt, aan de bedieningskant van de lift. De batterij is bovenop controlebox geplaatst. De handbediening, motoren en het netsnoer worden aangesloten aan de onderkant van controlebox. De controlebox maakt de besturing, de eindaanslagen en de beveiliging van de motoren mogelijk. Er is een rode noodknop waarmee u de lift aan en uit kunt zetten, en waarmee u de stroomtoevoer in geval van nood kunt uitschakelen. Onder deze knop bevindt zich de elektrische noodneer die de lift in geval van nood kan laten zakken. Op het display wordt de batterijstatus, bedrijfsuren en status van de servicecontrole weergegeven.

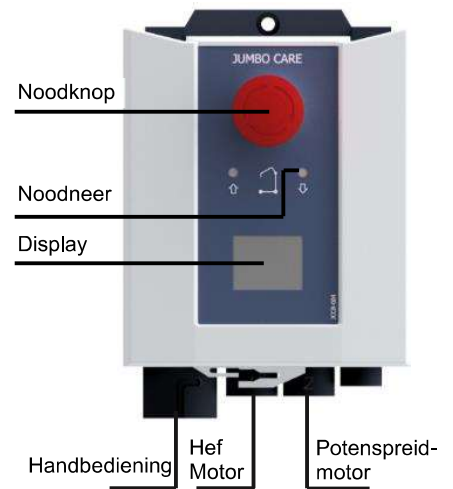

3.1.1 Noodknop

Door op de rode noodknop te drukken, wordt de stroom uitgeschakeld en zal de lift onmiddellijk stoppen met bewegen. De noodstopknop wordt ook gebruikt om de lift aan en uit te zetten.

- Druk op de rode knop om de noodstop te activeren.
- Om de noodstop op te heffen, draait u de rode knop rechtsom.


Tip: Druk op de noodknop wanneer u de lift wegzet. Zo voorkomt u dat de batterijen langzaam leeglopen.

3.1.2 Elektrische noodneer

De elektrische noodneer wordt gebruikt bij een storing of defect buiten de controlebox of batterij. Deze noodbediening ontgrendelt de motor en gebruikt de laatste restspanning van de batterij om de hefarm te laten zakken. Om deze functie te activeren, moet de gebruiker met een potlood of ander dun voorwerp in de opening "Nood" drukken. Dit werkt alleen als de batterij geïnstalleerd is.

3.1.3 Display

Op de controlebox bevindt zich een display waarop de batterijstatus wordt weergegeven:

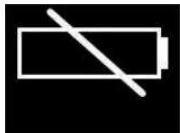


Batterij-indicatie:

Een volledig gekleurd pictogram betekent dat de batterij volledig is opgeladen. Om lege batterijen te voorkomen, wordt geadviseerd om de batterij op te laden zodra de capaciteit minder dan de helft is. Dit verlengt de levensduur van de batterij.



Aanduiding voor gebruik en onderhoud:

Als u kort op de knop omhoog drukt, verschijnt de gebruiks- en serviceaanduiding. Hier kunt u meer informatie lezen over hoeveel de lift gebruikt is en wanneer onderhoud nodig is.

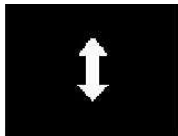

Cycli hefmotor:

Dit geeft aan hoeveel cycli de hefmotor heeft gemaakt. Eén cyclus van de hefmotor wordt geteld voor elk gebruik van minstens 5 seconden met een stroomopname van meer dan 1,5 A en een teruglooptijd van minstens 2 seconden.



Gebruik hefmotor:

Hier kunt u aflezen hoeveel de hefmotor gebruikt heeft in ampère per seconde (ampère x seconde). Dit geeft een goede indicatie van de totale looptijd van de hefmotor.



Maximale hefcapaciteit:

Hier kunt u aflezen hoe vaak de lift meer dan de maximale hefcapaciteit heeft getild.



Teller voor inspectiedatum:

Dit laat zien wanneer de lift voor het laatst is geïnspecteerd. Bijv. 90/- betekent dat de lift 90 dagen geleden gekeurd is. Het is mogelijk om een onderhoudsinterval in te stellen, bijv. 90/360 betekent dat de lift over 270 dagen moet worden geïnspecteerd. Wanneer de teller 360 dagen bereikt, gaat het servicelampje op de handbediening branden. Na inspectie zal de monteur de teller opnieuw instellen.

3.2 Handbediening

De lift wordt bediend met een handbediening. Dankzij het flexibele koord op de handbediening kan de zorgverlener naast de zorgvrager staan terwijl deze getild wordt. Met de handbediening kunnen de volgende functies van de tillift worden bediend:

- De hefarm omhoog en omlaag bewegen.
- De breedte van de poten aanpassen.

De bedieningsknoppen worden hieronder weergegeven:



Hefarm omhoog



Hefarm omlaag



Poten spreiden



Poten sluiten



Aan de achterkant van de handbediening zit een haak om hem aan de lift te hangen. Trek het spiraalsnoer altijd op een gecontroleerde manier uit de handbediening. Overmatig trekken aan het koord kan de handbediening beschadigen en dit valt niet onder de garantie.

3.3 Hefmotor

De Jamy 3 is uitgerust met een sterke en zeer stille motor met kogelomloopspindel en veiligheidsmoer. De motor is aangesloten op poort 1 van de controlebox. Op de motor zit een knop ten behoeve van de mechanische noodneer. Trek deze omhoog in geval van nood. De patiënt/zorgvrager gaat gecontroleerd naar beneden. Deze noodneerfunctie heeft altijd wat gewicht nodig om te zakken.



3.4 Batterij

Er zijn twee soorten oplaadbare batterijen beschikbaar. Loodhoudende (Pb) en Lithium-Ion (Li-ion) batterijen. De lift wordt standaard geleverd met één Pb-batterij. Alle batterijen hebben de eigenschap dat wanneer deze bijna leeg zijn, de hefarm altijd nog naar beneden kan met de resterende stroom. Pb-batterijen gaan redelijkerwijs twee tot drie jaar mee. Li-ion batterijen hebben een langere levensduur, zijn lichter, milieuvriendelijker en kunnen langer stilstaan en de zelfontlading is minimaal. Ze gaan redelijkerwijs 7 jaar mee.



De Li-ion batterij gaat in slaapstand na een week niet te zijn gebruikt en niet te zijn opgeladen. Hij kan uit de slaapstand worden gehaald door hem op de lader te leggen.

De batterij heeft een eenvoudig bevestigingsmechanisme. Aan de achterkant van de batterij zit een handvat waarmee de batterij gemakkelijk kan worden vervangen.



Zorg er altijd voor dat de batterij voldoende is opgeladen voordat u de lift gebruikt.

3.4.1 Levensduur van de batterij

Het aantal hefbewegingen dat met een volledig opgeladen batterij gemaakt kan worden, hangt af van de duur van de hefbewegingen, het opgetilde gewicht en de conditie van de batterij. Om de levensduur te verlengen, is het raadzaam om de batterij bij normaal gebruik altijd boven 50% opgeladen te houden. U kunt de batterij één keer per jaar tot 25% (of net daaronder) ontladen en daarna volledig opladen. Dit komt de levensduur en het vermogen van de batterijen ten goede.

Een batterij die lange tijd niet gebruikt wordt, zal zelfontladen. Dit geldt voor de batterij in de lift en voor de reservebatterijen los van de lift. Dit kan de batterij vernietigen of het aantal hefbewerkingen met een volledig opgeladen batterij verminderen.



Een loodzuurbatterij te ver ontladen is schadelijk voor zijn capaciteit.

3.4.2 Opladen van de batterij

Batterijen worden opgeladen met de meegeleverde batterijlader. Deze batterijlader bevindt zich apart van de lift. De batterijen worden op dezelfde manier op de batterijlader geplaatst als op de controlebox van de lift. Het wordt aanbevolen om de oplader aan de muur te bevestigen. Dit voorkomt schade aan de oplader, het snoer en de batterij door verschuiven, vallen, enz. Het is ook duidelijk waar de oplader zich bevindt en u zult hem niet kwijtraken. Bij de batterijlader wordt ook een netsnoer meegeleverd. De ene kant past in de oplader en de andere kant in het stopcontact. Steek eerst de stekker in de oplader en daarna de stekker in het stopcontact. Plaats dan pas de batterij op de oplader.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de batterij is het belangrijk om de batterijen regelmatig volledig op te laden. Het wordt aanbevolen om dit minstens één keer per week te doen. U kunt zien hoe vol de batterij nog is op de batterij-indicator van de controlebox.

Tip: Controleer na elke transfer de batterij-indicator. Als de capaciteit minder dan 50% is, wordt geadviseerd om de batterij op te laden voor verder gebruik.

Laad de batterij op volgens onderstaande procedure:

- Sluit de batterijlader aan op het lichtnet.
- Het indicatielampje "aan" gaat branden.
- Haal de batterij uit de lift en plaats deze op de lader.
- Het opladen van de batterij begint automatisch.
- Tijdens het opladen brandt het lampje "opladen".
- Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het "opladen"-lampje uit.
- Verwacht een oplaadtijd van ongeveer 8 uur.


3.5 Potenspreider

Beide poten kunnen worden gespreid om ruimte te maken voor bijvoorbeeld een stoel. De poten zijn elektrisch verstelbaar door middel van de knoppen op de handbediening. Verplaats zorgvragers op de Jamy 3 met de liftpoten in de gesloten stand om schade aan de lift, de zorgvrager of de omgeving te voorkomen.



Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is om de poten te spreiden. Als de poten vast komen te zitten, kan er schade ontstaan aan de lift en de omgeving.

Wanneer onderdelen van de pootafstelling vervangen moeten worden, moet u ervoor zorgen dat de poten correct zijn afgesteld! Aan de voor- en achterkant van het frame naast de poten zitten stelschroeven die de marge van de poten in de uiterste posities eruit halen. Draai deze stelschroeven los. Laat de motor volledig inlopen. Stel vervolgens de poten loodrecht op het frame in door de M10 kogelgewrichten in het frame naar binnen of naar buiten te draaien. Met de stelschroeven kunt u de resterende speling in beide uiterste posities

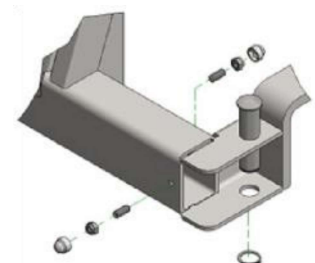

opheffen. Niet te vast aandraaien! Zo voorkomt u problemen met de motor of de kogelgewrichten

3.6 Wielen

De lift heeft vier zwenkwielen, voor Ø100 en achter Ø125mm met remmen. De rem van het achterste wiel stopt het wiel in rol- en draairichting. Bedien de rem met de punt van de voet. Doe dit altijd voorzichtig.

De wielen hebben een zeer lage rolweerstand door de volledig kogelgelagerde draaipunten. Het verplaatsen van de lift vanuit stilstand kost de minste moeite als de wielen van het onderstel al in de rijrichting staan. Om de lift op gang te helpen, zet met de voet af op het frame.



Ontgrendeld



Vergrendeld wiel




Controleer altijd de werking van de remmen en of de wielen intact zijn.

3.7 Voetensteun

De voetensteun is gemaakt van PU-rubber en dient ter ondersteuning van de patiënt/zorgvrager tijdens een transfer. Hij is gemakkelijk te verwijderen en te reinigen met een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Voor patiënten/zorgvragers met kleiner postuur is een verhoogde voetensteun beschikbaar als accessoire om er voor te zorgen dat de Jamy 3 comfortabel gebuikt kan worden. De verhoging wordt geplaatst tussen de voetensteun en de onderste plaat en verhoogt het geheel met 10 cm.

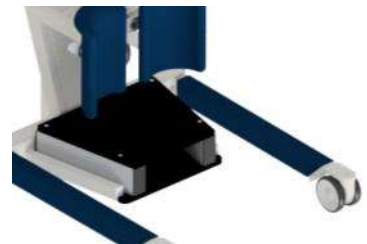

3.8 Kniesteun

De kniesteun is robuust en flexibel gemonteerd om de knieën van de patiënt/zorgvrager comfortabel te ondersteunen tijdens een transfer. Hij is gemaakt van hetzelfde materiaal als de voetensteun en is gemakkelijk te reinigen met een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Om meer versteviging bij de patiënt/zorgvrager te brengen is er een fixatieriem beschikbaar als accessoire. Door de kuit te fixeren wordt er voor gezorgd dat de benen beter vast zitten en dus beter ondersteuning te geven bij het opstaan.



3.9 Frame

Het frame bestaat uit meerdere aan elkaar gelaste stalen onderdelen voor een stevige en stijve constructie. Het frame is voorzien van een witte poedercoating voor een nette afwerking.



Gebruik de lift niet als er zichtbare scheuren of vervormingen in het frame zijn. De structurele integriteit kan aangetast zijn en het gebruik van de lift in deze toestand kan tot gevaarlijke situaties leiden.

3.10 Accessoires

De volgende accessoires zijn beschikbaar voor de Jamy 3.

Accessoire	Artikelnummer
Voetverhoger 5 cm	20400151
Voetverhoger 10 cm	20400150
Kuitfixatie	20400140
Batterij Lithium-Ion (2,25 Ah)	31101071
Batterij Lithium-Ion high capacity (4,5 Ah)	31101072

4 De Jamy 3 gebruiken

4.1 Voor gebruik

Zorg ervoor dat u de volgende stappen volgt, voordat u de Jamy 3 gebruikt:

1. Inspecteer de lift visueel. Er moet gecontroleerd worden of de volgende punten voorkomen;
 - Scheuren in het frame.
 - Vervorming van het frame.
 - Vervorming van de poten.
 - Schade aan de wielen.
 - Schade aan de voetsteun.
 - Schade aan de scheensteun.
 - Schade aan kabels en connectoren.

Als een van deze punten van toepassing is, moet het product worden weggegooid of moeten onderdelen worden vervangen door reserveonderdelen. Voer de afgedankte producten of onderdelen zo milieuvriendelijk mogelijk af volgens de plaatselijke voorschriften.

2. Plaats de batterij in de Jamy 3, indien van toepassing.
3. Schakel de lift in door de noodstopknop rechtsom te draaien. Dit moet een gemakkelijke en krachtloze beweging zijn.
4. Controleer de batterijstatus op de batterij-indicator op het controleboxje door kort op de omhoog- of omlaag-knop te drukken.
5. Controleer de toestand van de low-zone tilband (indien van toepassing).
6. Controleer de staat van de clips van de low-zonetilband en de juiste bevestiging (als een tilband wordt gebruikt).

De Jamy 3 is klaar voor gebruik. Zorg altijd voor een nette en schone werkomgeving.



Gebruik de lift of de accessoires niet als de toestand ervan onvoldoende is.



De polyurethaan scheensteunen van de Jamy 3 bevatten isocyanaten, die overgevoeligheid van de huid kunnen veroorzaken. Informeer of de patiënt/zorgvrager allergisch is voor dit materiaal voordat u het product gebruikt.

4.2 De patiënt/zorgvrager in zittende houding brengen

1. Zorg ervoor dat de hefarm in de laagste stand staat.
2. Breng de tilband aan op de patiënt/zorgvrager in het midden van de rug van de patiënt/zorgvrager. Zorg ervoor dat u de uiteinden van de tilband onder de oksels trekt en plaats de armen van de patiënt/zorgvrager buiten de tilband. In het geval van de het tilvest, bevestig de fixatiebanden.
3. Beweeg de lift naar de patiënt/zorgvrager toe. De breedte van de poten kan indien nodig worden aangepast.
4. Plaats de voeten van de patiënt/zorgvrager op de voetsteun. Beweeg de lift verder zodat de knieën de kniesteunen zo ver mogelijk raken.
5. Bevestig de low-zonetilband of het tilvest aan de hefarm. Altijd zo kort/strak mogelijk. Dit is om de gebruiker zo goed mogelijk tot stilstand te brengen. Zorg ervoor dat de tilband of het tilvest niet gedraaid is wanneer u het vastmaakt.
6. Pak de handbediening en ga zo dicht mogelijk bij de patiënt/zorgvrager staan. Leg indien mogelijk één hand op zijn of haar schouder. Druk op de omhoog-knop op de handbediening om de patiënt/zorgvrager op te tillen.
7. Breng de patiënt/zorgvrager zo ver mogelijk in staande positie. Dit is belangrijk voor u en de zorgvrager.
8. Zorg ervoor dat de voeten van de patiënt/zorgvrager op de voetplaat blijven staan. Sluit indien nodig de poten van het frame met behulp van de handbediening. De Jamy 3 kan nu verplaatst worden.



Informeer altijd of een zorgvrager met de Jamy 3 staand kan en wil worden getild voordat u met tillen begint! Informeer de patiënt/zorgvrager dat de sta-lift wordt gebruikt.

4.3 De patiënt/zorgvrager in zittende houding brengen

1. Beweeg de lift zo dicht mogelijk naar de stoel of het bed toe.
2. Neem de handbediening en ga zo dicht mogelijk bij de patiënt/zorgvrager staan. Druk op de omlaag-knop op de handbediening en zorg ervoor dat de patiënt/zorgvrager kan gaan zitten. Zorg ervoor dat de hefarm helemaal teruggaat naar de beginpositie. Zorg dat de tillift niet op de rem staat, zodat deze naar achteren kan bewegen als de zorgvrager met de rug tegen de rugleuning aankomt.
3. Maak de tilband los van de lift en rijd de lift weg.
4. Verwijder de low-zonetilband en/of het tilvest achter de rug van de patiënt/zorgvrager.



Als u de Jamy 3 opbergt, drukt u op de noodstopknop. Dit voorkomt dat de batterij langzaam leegloopt.

4.4 Low-zone tilband en tilvest

De Jamy 3 wordt altijd gebruikt in combinatie met een tilband. Wij noemen de standaardband een 'lowzone tilband' (rechter foto). De tilband wordt in de 'lage zone' van de rug geplaatst (halverwege de rug). De clips van de band worden met de armen van de zorgontvanger en de buitenkant van de band aan de lift bevestigd. De banden zijn voorzien van drukverdelende elementen om de druk onder de armen zoveel mogelijk te beperken. Daaroverheen zit een blauwe badstof hoes.

Aan de torso van de patiënt/zorgvrager wordt een tilvest (linker foto) bevestigd dat op de lift kan worden aangesloten. Het geeft meer steun tijdens het staan en tijdens de transfer. Als u vragen heeft of informatie wilt over levensduur of maatvoering, neem dan contact op met United Care. Raadpleeg de handleiding van de tilband voor instructies voor het aanbrengen van de tilband of tilvest.

Low-Zone tilband standaard	10109034 X
Low-Zone tilband XL	10109044 X
Low-Zone tilband, borstfixatie	30109644 X

X = type bevestiging:

C = United Care clips

Q = iQ clips

Vest, maat S, deluxe	30100352 X
Vest, maat M, deluxe	30100353 X
Vest, maat L, deluxe	30100354 X
Draagdoek, maat XL, deluxe	30100355 X



Tilvest



Low-zone tilband

4.5 De clips van de tilband


Clips worden op tilbanden geplaatst om de riem op een eenvoudige maar veilige manier met de hefarm te verbinden. De clip is daarom essentieel voor een veilige transfer en moet daarom altijd met aandacht en zorg worden bevestigd.



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de tilband gebruikt. Het is essentieel dat u volledig begrijpt hoe u de tilband op de juiste manier moet ophangen.


UCP clip Bevestiging:

Voordat u de clip aanbrengt (en verwijdt), moet u ervoor zorgen dat de spanning van de tilband af is. Houd de band van de clip met één hand vast en trek het grote gat van de clip over de kop van het ophangpunt, controleer of de band (waar de clip aan de sling is bevestigd) niet gedraaid is. Neem de band onder de clip van de tilband en trek deze naar beneden. Trek aan de clip van de tilband zodat het ophangpunt in de kleinere opening van de clip komt. Het ophangpunt zit nu vergrendeld in de opening bovenaan de clip.

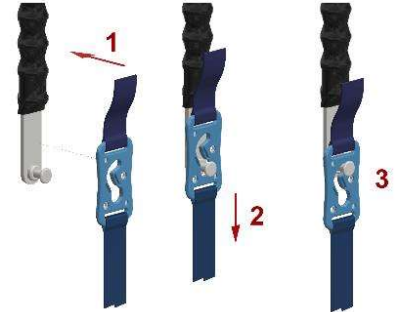

iQ clip Bevestiging:

Voordat je de clip aanbrengt (en verwijdt), moet je ervoor zorgen dat de spanning van de tilband af is. Houd de clip met één hand vast en duw de vergrendeling open met de duim. U kunt de clip ook over de pen drukken in plaats van deze eerst te openen. Controleer of de band, waarmee de clip aan de sling is bevestigd, niet gedraaid is. Haak de clip over het ophangpunt en trek hem naar beneden. De clip klikt vast.

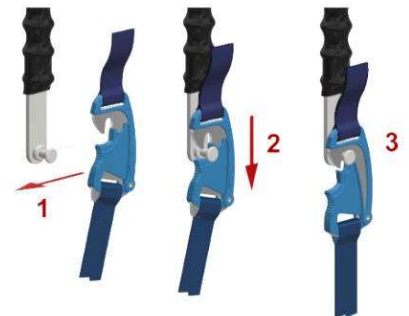

Voor zowel UCP als iQ clips: Zodra de patiënt 10-15 cm boven het bed, de stoel of de rolstoel is, controleer dan nogmaals of de clips van de tiljuk goed vastzitten aan de vier ophangpunten van de tillift.

UCP Clip losmaken

1. Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op de jukverbinding en dat de banden zijn losgemaakt. Trek de band met de clip omhoog, zodat de kop van het ophangpunt op de takel naar de grote opening van de clip beweegt.
2. Maak nu de clip los van het ophangpunt door de clip naar je toe te trekken.

iQ Clip losmaken

1. Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op de jukverbinding en dat de banden zijn losgemaakt. Open de iQ-clip. Door de dubbele beveiliging van de iQ-clip gaat deze niet open als de band strak is aangetrokken.
2. Verwijder de clip van het ophangpunt.



Controleer altijd voordat u gaat tillen of de clips goed vastzitten. Zorg ervoor dat de riem en de clip niet gedraaid zijn bevestigd.

5 Onderhoud en service

De Jamy 3 is zo ontworpen dat het onderhoud tot een minimum beperkt kan worden. Het wordt aangeraden om het onderstaande onderhoudsschema te volgen:

- Dagelijks en wekelijks onderhoud kan door de verzorgers van de Jamy 3 gedaan worden.
- Jaarlijks onderhoud moet worden uitgevoerd door de technische dienst.
- De jaarlijkse inspectie en eventuele reparatie dat daaruit voortkomt dient door United Care te worden uitgevoerd of een door United Care getrainde partner partij.



Onderhoud of wijzigingen moeten altijd worden uitgevoerd door een daartoe getraind persoon. Onbevoegde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan de lift kunnen leiden tot letsel of defecten aan de lift. Als er onderdelen van de lift onderhouden, gereinigd of gerepareerd moeten worden die niet in dit gedeelte van de handleiding beschreven staan, neem dan contact op met United Care of een erkende wederverkoper.

5.1 Dagelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen dagelijks (en tussen het gebruik door verschillende patiënten/zorgvragers, indien nodig) door de verzorgers van de Jamy 3 uitgevoerd worden. Probeer nooit service- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren terwijl de lift in gebruik is.

De lift

Controleer of alle onderdelen van de lift aanwezig zijn, zoals handbedieningen, batterijen, enz. De lift kan regelmatig gereinigd worden met een normaal huishoudelijk schoonmaakmiddel zonder risico op beschadiging of corrosie. Als desinfectie vereist is, gebruik dan een product dat bedoeld is voor het reinigen van dergelijke producten. Gebruik een reinigingsmiddel met maximaal 5% alcohol of maximaal 1% salicylzuur. Het product is niet bedoeld voor sterilisatie of reiniging met stoom.

De tilband(en)

Controleer de low-zone tilband en/of het tilvest voor gebruik altijd volgens de instructies van de fabrikant op schade aan de band of clips, rafelen van de stof, loszittende stiksels en naden. Als een van deze beschadigingen wordt geconstateerd, mag de tilband niet meer worden gebruikt en moet deze worden weggegooid.

Batterijen

Zorg ervoor dat wanneer u een batterij hebt vervangen, u de lege batterij op de lader plaatst.



Neem bij twijfel over de toestand van de lift altijd contact op met de technische dienst van United Care!

5.2 Wekelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen wekelijks door zorgverleners van de Jamy 3 worden uitgevoerd:

De lift

De lift kan regelmatig worden gereinigd met een normaal huishoudelijk schoonmaakmiddel. Als desinfectie vereist is, gebruik dan een product dat bedoeld is voor het reinigen van dergelijke producten. Gebruik een reinigingsmiddel met maximaal 5% alcohol of maximaal 1% salicylzuur. Het product is niet bedoeld om gesteriliseerd of met stoom gereinigd te worden. Controleer het volgende elke week:

- De bediening van de lift en de werking van de noodstop.
- Dat alle beweegbare onderdelen gemakkelijk bewegen, zonder storend geluid.

Maak de voetensteun schoon.

Maak de kniesteun en de voetensteun wekelijks schoon met de aanbevolen reinigingsmiddelen.

De low-zone tilband en het tilvest

Inspecteer, reinig en desinfecteer de tilband of het vest volgens de instructies van de fabrikant.

Batterijen

Het wordt aanbevolen om de batterijen minstens één keer per week op te laden (ook als u ze niet gebruikt).

- Controleer de leesbaarheid van het serienummerlabel, de aanwezigheid van een handleiding, snelle referentiekaart en logboek.

5.3 Halfjaarlijks onderhoud

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst om de zes maanden aan de Jamy 3 kan uitvoeren.

1. De tilband is veilig te gebruiken na inspectie volgens de instructies van de fabrikant.
2. De noodstopfunctie werkt zoals bedoeld.
3. De noodneerfunctie werkt zoals bedoeld.
4. De controlebox werkt zoals bedoeld.
5. Alle bewegende delen van de lift moeten soepel bewegen.
6. De pootspreiding produceert geen storend geluid en functioneert naar behoren.
7. Plastic onderdelen zijn niet beschadigd
8. De wielen moeten gemakkelijk draaien en de rem moet goed werken.
9. Alle bouten moeten goed vastzitten en mogen niet los zitten.
10. De lift mag geen lakschade hebben.
11. De batterijen moeten goed opladen en de behuizing is in goede staat.
12. De bekabeling heeft geen zichtbare schade.
13. De batterijlader moet functioneren zoals bedoeld en de kabels mogen niet beschadigd zijn.



Als de lift niet voldoet aan één of meer van de bovenstaande punten, moet de lift tijdelijk buiten gebruik worden gesteld en moet er contact worden opgenomen met United Care.

5.4 Jaarlijks onderhoud

Volgens NEN7506 moet een tillift één keer per jaar gekeurd worden. Dit moet gebeuren door United Care of een andere erkende instantie. United Care biedt u de mogelijkheid om uw lift één keer per jaar grondig te laten keuren, door middel van een onderhoudsovereenkomst.

De volgende inspectiedatum vindt u op het label voor servicecontrole (zie afbeelding rechts). Dit label bevindt zich altijd op de Jamy 3, vlakbij het serienummerplaatje. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met United Care.



Het servicecontrolelabel geeft de datum aan waarop de volgende periodieke inspectie van de Jamy 3 moet worden uitgevoerd. Laders moeten ook eenmaal per jaar worden geïnspecteerd, volgens de geldende voorschriften.



Service en onderhoud aan de lift is alleen toegestaan door getrainde personen.



Als de onderstaande reparatietabel de klacht niet oplost of in geval van twijfel, gebruik de lift/tilband dan niet en neem contact op met United Care.

United Care zal op verzoek schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie beschikbaar stellen die geautoriseerd onderhoudspersoneel kunnen helpen bij het repareren van die onderdelen die door United Care zijn aangewezen als repareerbaar door onderhoudspersoneel. Neem contact op met United Care als een dergelijke situatie zich voordoet.

5.5 Vervanging/Verwijdering van onderdelen

Als het product niet meer bruikbaar is, moet het gerecycled worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving in het betreffende land. Alle elektrische onderdelen, inclusief batterijen, moeten worden verwijderd en gerecycled als elektrische onderdelen. Vraag uw plaatselijke recyclingstation om meer informatie over hoe de verschillende materialen in het product (metalen, plastic, elektronica) gerecycled moeten worden. Gebruikte batterijen kunnen ook worden ingeleverd bij United Care, Direct Healthcare Group of een distributeur van Direct Healthcare Group voor recycling.



6 Probleemoplossing en reparatie

Als onderstaande reparatietabel de klacht niet oplost of in geval van twijfel, gebruik de lift/tilband dan niet en neem contact op met United Care.



Werkt de lift nog steeds niet, neem dan contact op met de technische dienst, de leverancier of United care.

Klacht	Mogelijke oorzaak	Actie
Lift werkt niet	• Batterij verkeerd/niet geïnstalleerd. • Stekker van de handbediening niet goed aangesloten op de controlebox. • Noodstop uit.	• Installeer de batterij. • Controleer de stekker tussen de handbediening en de controlebox. • Draai de noodstop rechtsom.
Lift gaat niet omhoog	De motorstekker is niet goed aangesloten op de schakelkast.	Steek het snoer in de juiste poort van de controlebox (poort 1).
Lift gaat niet omlaag	• De motorstekker is niet goed aangesloten op de schakelkast. • Hefarm beweegt niet soepel.	• Hefarm is stijf. Steek het snoer in de juiste poort van de controlebox (poort 1). • Trek de hefarm lichtjes van bovenaf.
Lift kraakt	Drooglopen van de lagers.	Gebruik penetrerende olie.
Poot / poten zitten los	Stel poten of gebroken kogelgewricht of draadstang af.	Stel de poten opnieuw af of vervang kapotte onderdelen.
Lift heeft weinig kracht	• Batterij bijna leeg • Slechte batterij	• Batterij opladen • Batterij vervangen • Motor vervangen
Batterij snel leeg	Slechte batterij	Vervang de batterij.

7 Technische gegevens

7.1 Technische specificaties

Algemeen	
Gewicht lift	62 kg
Maximale belasting	200 kg
Totaal maximaal gewicht	262 kg
Geluidsniveau	Max 40 dB(A)

Hefmotor	
Spanning	24 V $\overline{=}$ (gelijkstroom)
Stroom	10,5 A max.
Bescherming tegen binnendringen	IPX4
Duwkracht	7500 N
Arbeidscyclus	10%

Controlebox	
Type	6 functies
Spanning	24 V $\overline{=}$ (gelijkstroom)
Wattage	250 W
Bescherming tegen binnendringen	IPX5

Lader	
Spanning	100-240 V $\sim$ (prim.), 29,5 V $\overline{=}$ (sec.)
frequentie	50/60 Hz (prim.)
Stroom	400 mA (prim.)
Wattage	19 W max. (sec.)
Zekering	1,25 A, 250 V $\sim$

Handbediening	
Type	HB3, 4 functies
Bescherming tegen binnendringen	IPX7

Batterij	
Spanning	24 V $\overline{=}$ (prim.)
Stroom	2,9 Ah (prim.)
Wattage	74 Wh (prim.)
Bescherming tegen binnendringen	IP65

7.2 Bedieningskrachten



Bij gebruik volgens de instructies mogen de bedieningskrachten de waarden in de onderstaande tabel niet overschrijden:

Bediening	Maximaal vereiste kracht
Knoppen voor handbediening	0,2 kg / 2 N
Controlebox met noodknop	0,3 kg / 3 N
Noodstopmotor	10 kg / 100 N
Zwenkwielremmen	10 kg / 100 N
De lift verplaatsen/handelen	5 kg / 50 N

7.3 Dimensiespecificaties

Hoofdafmetingen	
Hoogte	1096 mm
Max. hoogte	1667 mm
Lengte	1077 mm
Breedte	679 mm

(Alle afmetingen zijn in mm)

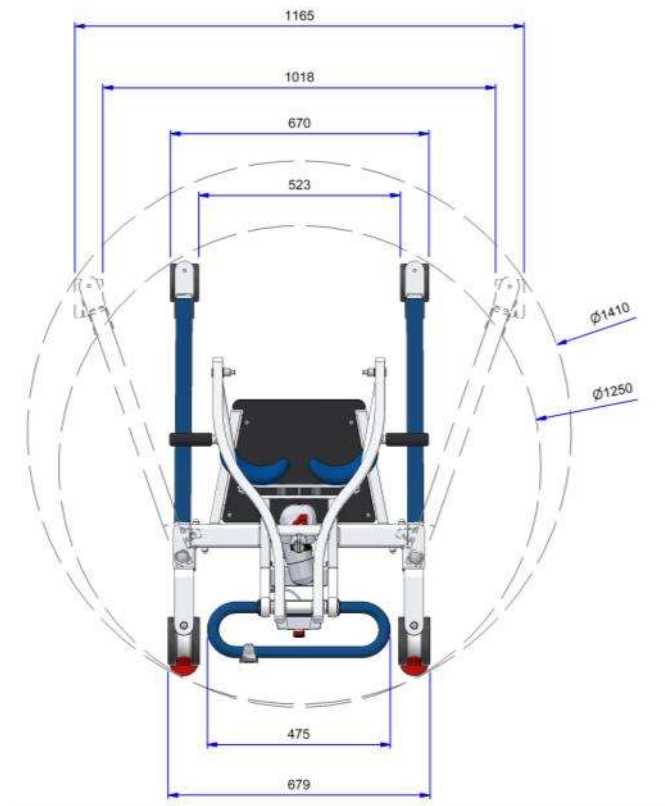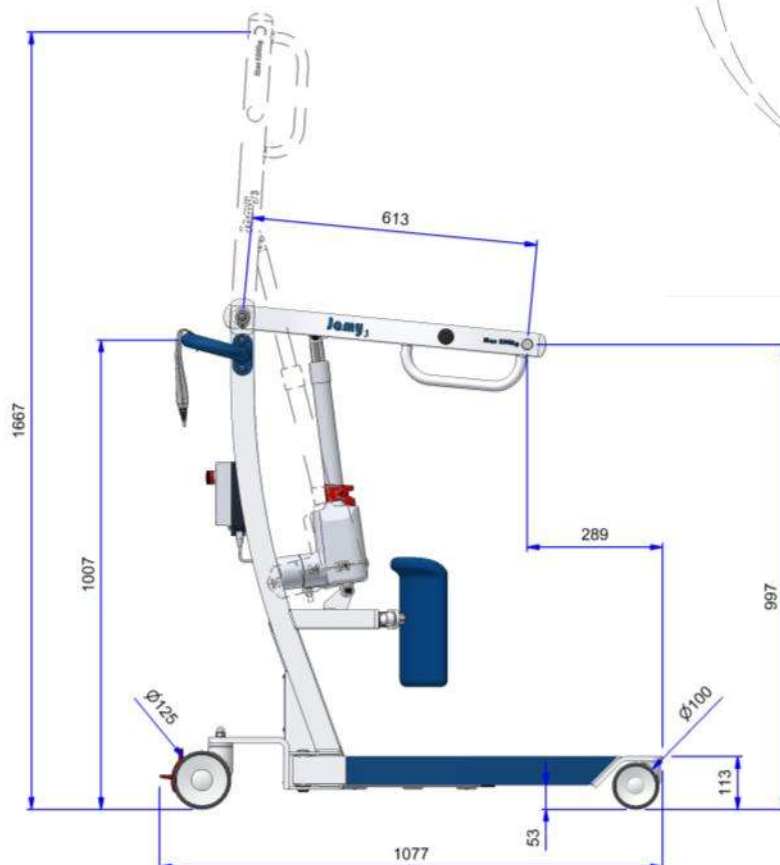


8 Onderdelenlijst

8.1 Onderdelenlijst lift



Alle bouten en moeren zonder eigen borging of met borgringen hebben schroefdraadborging nodig (kleur blauw, middelsterk 11101110).

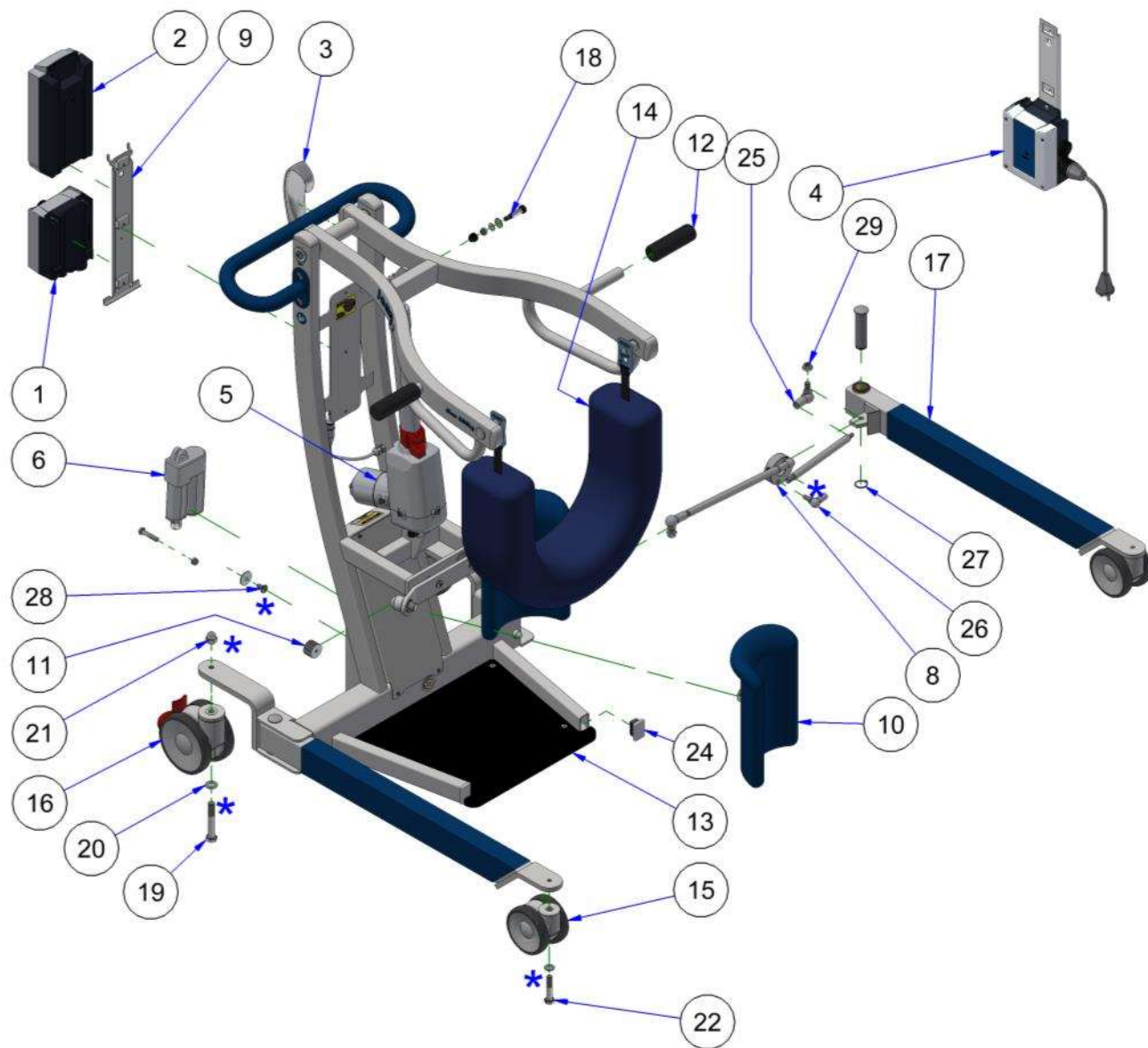


*Schroefdraadborgmiddel

Nr.	Beschrijving	Art. nr.
1	Controlebox, Jumbo Care, open bus	11101501
2	Batterij	31101070
3	Handbediening, HB3, 4F, open bus	11101530
	Handbediening, HB3, Flexibel snoer	11101532
4	Jumbo lader compleet	32106680
5	Motor La34, slag 250	20100352
6	MOtor TA16, slag 45mm	11100800
7	Excenter hoofdas	11300591
8	Excenter compleet	11400060
9	Bevestigingsbeugel CB	11100360
10	Kniebandage zwart	10100156
	Kniebandage blauw	10100155
11	Kniesteun rubber	20100280
12	Handgreep zwart	10100256
13	Voetensteun	20100360
14	Low-zone Tilband - Standaard	10101034
15	Zwenkwiel ø100	22100170
16	Zwenkwiel ø125 met rem	22100181
17	Pootkap blauw, L=580	10100541
18	Bevestigingsbouten set 30mm	11400440
19	Zeskantbout M12x75 elvz	10101860
20	Sluitring M12 elvz	14100090
21	Dopmoer M12 elvz	20100400
22	Zeskantbout M10x60 elvz	11100300
23	Sluitring M10 elvz	11100220
24	Lamellenstop 40x25	20100180
25	Kogelgewricht M10	11100140
26	Kogelgewricht M8	11100150
27	Asborgring ø22	11100550
28	Lage balkopschroef M8x16 elvz	10101710
29	Borgmoer M10 elvz	11100250

8.2 Onderdelenlijst lader


Lader compleet 32106680

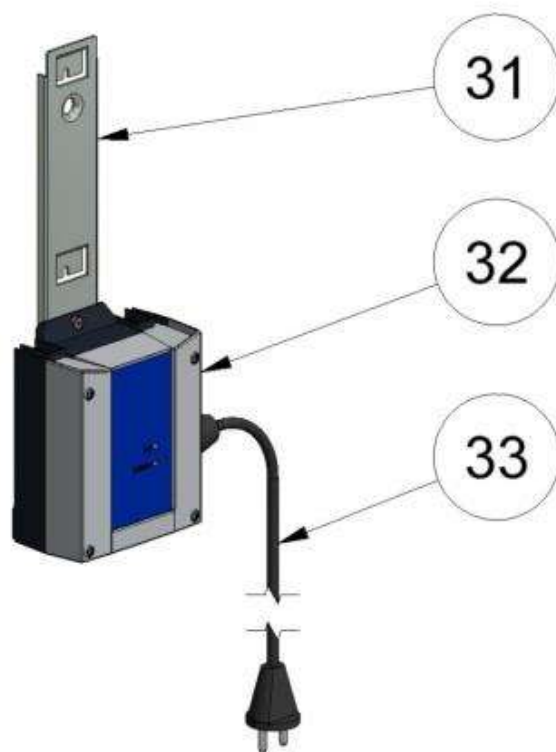

Nr.	Naam	Art. Nr.
31	Montagebeugel	11100340
32	Batterijlader	31101040
33	Netsnoer	11100350

9 Opslag- en transportomstandigheden

- Niet opbergen in vochtige omgevingen.
- Laad de batterijen niet op in vochtige omgevingen.
- Niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen bewaren.
- Niet bewaren met scherpe voorwerpen.
- Bewaar de lift niet in omgevingen met hoge temperaturen, hoge druk en hoge vochtigheid. De lift moet worden vervoerd en opgeslagen bij 5 °C tot + 50 °C en bij een normale luchtvochtigheid van 10% - 85%. De luchtdruk moet tussen 70 en 106 kPa liggen.

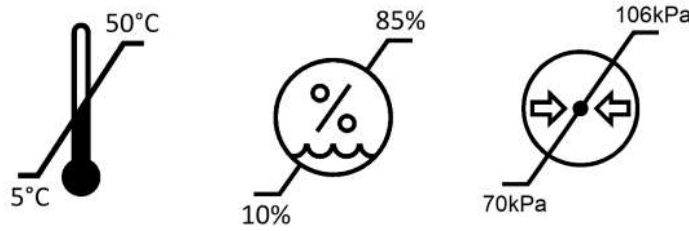

De lift is niet bedoeld om gedemonteerd of ingeklapt te worden voor opslag of transport.




10 Levensduur van het product

Bij normaal en regelmatig onderhoud gaat de Jamy 3 naar verwachting tien jaar mee. De totale levensduur is afhankelijk van het gebruik, het onderhoud en de opslag van het product.

11 Garantie

United Care Products geeft 1 jaar garantie op de Jamy 3. United Care Products geeft geen garantie op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of onzorgvuldig gebruik (zoals wielen en batterijen). Verder is de garantie niet van toepassing op schade of defecten die kunnen ontstaan aan de Jamy 3 als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling ligt bij United Care Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger. United Care-producten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen die afwijken van wat in deze handleiding is beschreven. United Care hoeft hiervoor geen verantwoording af te leggen.

12 Symbolen en tekens

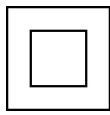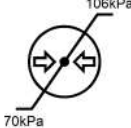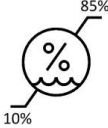	Het product voldoet aan alle wettelijke vereisten voor producten die binnen de Europese Unie worden verkocht		Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
	Medisch hulpmiddel		Klasse II elektrische apparatuur
	Algemene waarschuwing		Maximaal toelaatbaar gewicht/belasting van patiënt/zorgvrager.
	Wettelijke Fabrikant		Geeft het totale maximale gewicht van de lift en de patiënt/zorgvrager aan.
	Type BF toegepast onderdeel. Geeft aan dat onderdelen gemiddeld tot lang in contact zijn met de patiënt.		Raadpleeg de gebruikershandleiding
	WEEE-symbool Mag niet bij het huisvuil.		Geplaatst naast een aanvullend bord. Geeft aan dat het bord een verplichte actie is.
	Arbeidscyclus: 2 min in actieve (AAN) modus 18 min in ruststand (OFF)		Opslag- en transportomstandigheden Drukbereik: 70kPa-106kPa
	Lees de handleiding		Opslag- en transportomstandigheden vochtigheidsbereik: 10% - 85%
	Referentienummer		Opslag- en transportomstandigheden temperatuurbereik: 5°C -50°C
	Houd de actuator niet vast		Droog houden
	Product voldoet aan alle wettelijke vereisten voor producten die binnen Groot-Brittannië verkocht worden.	IPX4	weerstand tegen omgevingselementen. IPX4 - Beschermt tegen spatwater, ongeacht de richting

13 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De Jamy 3 is getest op naleving van de huidige regelgevende normen met betrekking tot zijn vermogen om EMI (elektromagnetische interferentie) van externe bronnen te blokkeren. De Jamy 3 is getest volgens IEC60601-1-2 Editie 4. Sommige procedures kunnen elektromagnetische interferentie helpen verminderen, zoals het volgen van de bedoelde omgeving.

Beoogde omgeving: Thuiszorgomgeving en professionele zorgomgeving.

De volgende zijn uitzonderingen op de bovenstaande bedoelde omgeving: In de buurt van HF-chirurgische apparatuur en in een RF-afgeschermd ruimte van een ME-SYSTEEM voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie.



Als de lift stopt met werken, zich op een onverwachte manier gedraagt, of ongewild beweegt vanwege mogelijke elektromagnetische storing of interferentie, moet de lift worden uitgeschakeld. Schakel het weer in en controleer de werking voor gebruik. Als het probleem blijft bestaan, moet de lift in een andere ruimte of omgeving worden gebruikt. Als er andere apparatuur wordt gestoord, moet de werking ervan worden gecontroleerd voordat u de lift weer gebruikt.



Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden omdat dit kan leiden tot onjuiste werking. Als dergelijk gebruik toch noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te controleren of ze normaal functioneren.



Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij 30 cm (12 inch) bij een onderdeel van de Jamy worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur verslechteren.



Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die welke door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en een onjuiste werking tot gevolg hebben.

Emissietest		Naleving
RF-emissies CISPR 11		Groep 1
RF-emissies CISPR 11		Klasse B
Harmonische emissies IEC 61000-3-2		Klasse A
Spanningsschommelingen/flikkering IEC 61000-3-3		Voldoet
Immuniteitstest		IEC60601-1-2 Editie 4 Testniveaus en conformiteit
Schommelingen IEC 61000-4-5		± 0,5 kV, ± 1 kV

Spanningsdips IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0 % UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli Enkele fase: bij 0
Spanningsonderbrekingen IEC 61000-4-11	0% UT; 250/300 cycli
Elektrostatische ontlading IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht
Geleidingsstoringen geïnduceerd door RF-velden IEC 61000-4-6	Home Gezondheidszorg Omgeving 3V 0,15 MHz - 80 MHz 6V in ISM- en amateurbanden tussen 0,15 MHz en 80 MHz 80% AM bij 1 kHz
Uitgestraalde RF elektromagnetische velden IEC 61000-4-3	Home Gezondheidszorg Omgeving 10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM bij 1 kHz
Nabijheidsvelden van draadloze RF- communicatieapparatuur IEC 61000-4-3	385 MHz - 27 V/m 450 MHz - 28 V/m 710, 745, 780 MHz - 9 V/m 810, 860, 930 MHz - 28 V/m 1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz - 9 V/m
Elektrische snelle overgang/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz herhalingsfrequentie
RATED Vermogensfrequentie Magnetische velden IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz of 60 Hz

14 Een incident melden

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de zorgverlener en/of de patiënt is gevestigd.

Over United Care

Het uitvoeren van patiëntentransfers in de gezondheidszorg vergt aanzienlijke inspanningen van diverse betrokken partijen, en met name van zorgverleners die een aanzienlijke deskundigheid moeten inzetten.

United Care is een bedrijf dat zich toelegt op het aanbieden van diensten en producten voor diegenen die dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van patiëntentransfers. Ons primaire doel is om de mobiliteit van gebruikers te ondersteunen. We werken nauw samen met zorgverleners en zorgvragers om oplossingen te ontwikkelen die de mobiliteit behouden en zelfs verbeteren.

Ons uitgangspunt is het streven naar optimale zorgkwaliteit voor de zorgvrager, terwijl we tegelijkertijd de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener verbeteren. Dit realiseren we door aan te sluiten bij de bewegingsmogelijkheden van de zorggebruiker en deze optimaal te benutten. Zo dragen we bij aan het verhogen van de algehele kwaliteit van zorg in de gezondheidssector.

United Care levert hiervoor de volgende producten/diensten:

- Actieve mobiele liften
- Passieve mobiele liften
- Zit-naar-stahulpmiddelen
- Plafondliften
- Douche Stoelen
- Douchebrancards
- Accessoires voor transferhulpmiddelen
- Training en advies

Door haar visie, diensten en producten is United Care een uitstekende partner in samenwerking met zorgverleners en zorgontvangers.

Voor de meest recente versie van deze handleiding, handleidingen in andere talen of informatie voor gebruikers met een lees- of visuele beperking, kunt u contact opnemen met United Care.



Medisch hulpmiddel klasse I. Het product voldoet aan de vereisten van de Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



Product van klasse I voor medische hulpmiddelen voldoet aan de vereisten van UK MDR 2002 voor medische hulpmiddelen (MDD 93/42/EEG)



United Care B.V.
Bremenweg 5
9723 TC Groningen
Nederland
+31 (0)50 3050980
Info@unitedcare.nl
www.unitedcare.nl

UK Responsible person:

Direct Healthcare Group
Withey Court, Western Industrial Estate,
Caerphilly CF3 1BF, United Kingdom
+44 (0) 800 043 0881
www.directhealthcaregroup.com
Info@directhealthcaregroup.com

