



OptiFlo™ Kathetermanagement

Foley katheteronderhoud



Foley Katheteronderhoud

Wat is OptiFlo™

OptiFlo™-producten zijn bestemd voor het onderhoud van urinaire verblijfskatheters. Katheteronderhoudsoplossingen zijn ontworpen om de katheter door te spoelen, zonder dat blaasspoelen nodig is.



Katheteronderhoud

- Helpt bij het verwijderen van obstructies
- Helpt blokkades in de katheter te voorkomen
- Vermindert het risico op verstoppingen




Mogelijke voordelen voor patiënten

- Helpt de levensduur van de katheter te verlengen
- Helpt onnodige katheterwissels te voorkomen
- Slechts 60 seconden nodig per behandeling

Wanneer gebruikt u OptiFlo™?

Kijk eerst of er geen mechanische problemen zijn, zoals:

- Controleer of de slang niet geknikt of gedraaid is
- Zorg dat de drainagezak onder blaashoogte hangt
- Zorg ervoor dat de drainagezak niet meer dan 2/3 gevuld is
- Controleer of de katheter goed gefixeerd is

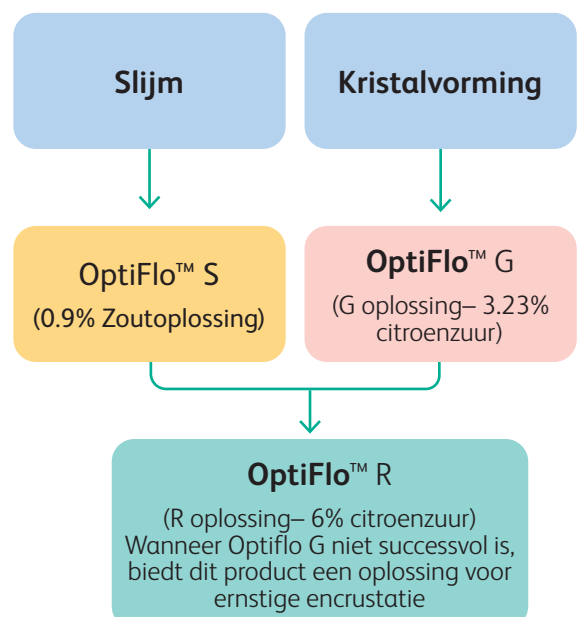

Foley Katheteronderhoud

OptiFlo™ biedt een uitgebreid gamma spoeloplossingen. Dankzij het harmonica-ontwerp kunt u de katheter gemakkelijk en gecontroleerd spoelen. Enkel verkrijgbaar op voorschrift.



OptiFlo™ S (0.9% zoutoplossing)

Deze zoutoplossing is geschikt bij lichte irritatie en wordt gebruikt bij aanwezigheid van slijm in de katheter. (Niet geschikt voor het verwijderen van katheteraanslag)

Product code: 50ml – CSS50

100ml – CSS100



OptiFlo™ G (Suby G - 3.23% citroenzuur)

Citroenzuuroplossing. Reinigt de katheter over de volledige lengte en voorkomt alkaleaanslag. Bevat magnesiumoxide om weefselirritatie te beperken.

Product code: 50ml – CSG50

100ml – CSG100



OptiFlo™ R (Oplossing R – 6% citroenzuur)

Oplossing met verhoogd citroenzuurgehalte. Lost blokkeringen op. Ook geschikt voor het wegspoelen van grote, korrelige afzettingen voorafgaand aan het verwijderen van de katheter.

Product code: 50ml – CSR50


100ml – CSR100

	%	Product code	Volume	Z-index	Eenheden
Optiflo™ S	0.9% Zoutoplossing	CSS50	50ml	15606791	12
		CSS100	100ml	15606805	12
Optiflo™ G	3.23% Citroenzuur (Oplossing G)	CSG50	50ml	15606775	12
		CSG100	100ml	15768481	12
Optiflo™ R	6.0% Citroenzuur (Oplossing R)	CSR50	50ml	15606783	12
		CSR100	100ml	15768473	12


Gebruiksaanwijzing OptiFlo™




- 1** Controleer of de inhoud helder is en of de flexibele verpakking intact is. Gebruik het product niet indien de verpakking lekt of indien er geknoeid werd met de verzegeling van de dop.

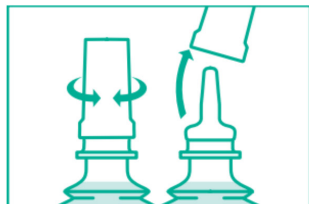


- 2** Draai de dop in beide richtingen om de verzegeling te verbreken en verwijder de dop.

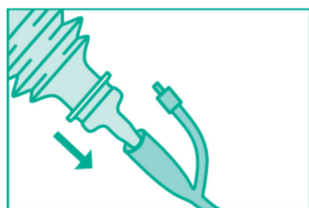


- 3** Breng de tip van de flacon in de katheter.

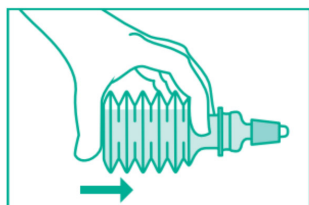

- 4** Houd de hals van de verpakking tussen wijsvinger en middenvinger en knijp in de fles door op de onderkant te drukken met de duim, zodat de vloeistof op een gecontroleerde wijze in de katheter stroomt zonder dat er luchtballen gevormd worden.

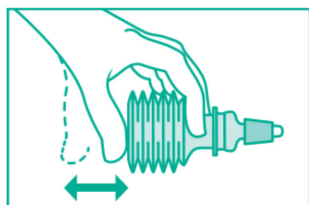

- 5** U verkrijgt een gecontroleerde spoeling door de blaasbalg gedurende ongeveer een minuut onafgebroken zachtjes in te drukken en weer los te laten. De vloeistof loopt direct weer terug in de flacon.

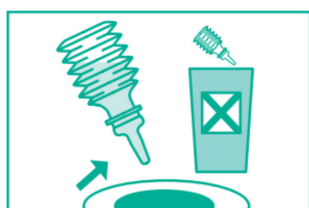

- 6** Giet de inhoud van de verpakking in een toilet, afvoer of vergelijkbaar systeem en gooi de verpakking weg.

www.bd.com



Becton Dickinson N.V.
Erembodegem-Dorp 86
B - 9320 Erembodegem
Tel: +32 53 28 05 04

Becton Dickinson B.V.
Marconilaan 6
NL - 9207 JC Drachten
Tel: +31 347 788 117

CustServiceBenelux@bd.com