



**SMOVE** Manueel 3.1

**Hef-armen**

Clip-bevestiging

Lus-bevestiging

A B **C** D E

**MAXIMAAL TILGEWICHT 200 kg**

**Betrouwbaar en comfortabel voor cliënt en zorgverlener**

## Wendbare sta-lift met aangename opsta-curve

De **SMOVE** is een actieve tillift en biedt de cliënt een comfortabele ondersteuning van een zittende tot een staande positie. Het stimuleren van de eigen functionaliteit en sta-functie is hierbij belangrijk. Zo is de **SMOVE** voorzien van flexibele beensteunen en laaggeplaatste verlengde voetenplaat. De staande positie maakt de noodzakelijke verzorging voor de toiletgang of het verwisselen van incontinentiemateriaal makkelijker.

De verstelmogelijkheden van de tillift zijn volledig elektrisch te bedienen. Met de afneembare handbediening zijn de elektrisch verstelbare pootspreiding en de hoog-laag beweging van de hefarm te activeren. Zo is de breedte van de tillift snel en geluidloos aan te passen en is de hefarm ook vanuit een positie naast de cliënt met een aangename en comfortabele tilsnelheid te

bedienen. De gelijktijdige bediening van de knoppen op de handbediening maakt het werken met de tillift snel en eenvoudig.

De **SMOVE** is standaard uitgerust met een hefarm voor een tilband met clips. Bij gebruik van tilbanden met lussen kan een hefarm met lus-bevestiging worden toegepast.



Manueel

## Specificaties

|                                       |           |                                        |        |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|
| Hoogste positie tilarm                | 158 cm    | Maximale totale hoogte                 | 158 cm |
| Laagste positie tilarm                | 90 cm     | Maximale breedte                       | 105 cm |
| Hoogte van de poten                   | 11,5 cm   | Interne breedte bij maximale spreiding | 90 cm  |
| Ruimte onder de poten                 | 6 cm      | Minimale breedte                       | 64 cm  |
| Bereik tilarm op laagste positie      | 31 cm     | Interne breedte bij minimale spreiding | 54 cm  |
| Bereik tilarm op hoogste positie      | (-)23* cm | Maximale draaicirkel                   | 132 cm |
| Lengte tilarm                         | 59 cm     | Totaal gewicht                         | 70 kg  |
| Volledige lengte                      | 109 cm    | Tijdsduur volledige tilbeweging        | 15 sec |
| Hoogte duwbeugel & min. totale hoogte | 115 cm    | Maximaal tilgewicht                    | 200 kg |

\* Bereik valt achter de knie/beensteun.

\*\*\* De **SMOVE** tillift is ook verkrijgbaar als **touch&move** uitvoering.